

ProCare

Med 30 C

Neutraliseringsmedel baserat på organisk syra

Bruksanvisning

Användning

ProCare Med 30 C är ett surt neutraliseringsmedel för diskdesinfektorer som används efter mildt alkalisk automatiserad rengöring av återanvändbara, värmestabila och värmekänsliga, invasiva och icke-invasiva medicintekniska produkter som exempelvis kirurgiska, mikrokirurgiska och MIS-instrument, stela endoskop, anestesi- och ventilationsutrustning, redskap för vårdavdelningar, steriliseringsbehållare i aluminium och annan medicinsk utrustning.

Egenskaper

ProCare Med 30 C är ett mildt surt neutraliseringsmedel med följande egenskaper:

- Avlägsnar varsamt alkaliska rester från bearbetade objekt.
- Kan förlänga livslängden på instrument genom att förhindra fläckar på objekt som bearbetats med alkaliska rengöringsmedel som kan orsaka irreversibla skador på materialen senare i bearbetningscykeln, t.ex. under sterilisering.
- Lämpligt för anestesimaterial.
- Kompatibelt med aluminium.
- Fritt från ytaktiva ämnen.
- Fosfatfritt.

Materialkompatibilitet

Lämpligt för rostfritt stål, (anodiserat) aluminium, plastmaterial, gummi, glas och keramik.

Kontakta din lokala representant för att få information om lämpligheten för andra material som inte nämns ovan.

Dosering och användning

Optimal dosering beror i huvudsak på mängden av alkaliska rester. Se till att sköljvätskan runnit av helt före neutralisering.

En neutraliseringsfas med en dosering på 1–3 ml/l ger goda resultat med en tid på minst 1 minut efter rengöring med alkaliska rengöringsmedel som exempelvis ProCare Med 10 MA. Mer information finns i bruksanvisningen till ProCare Med 10 MA.

Genomför en mellanliggande sköljning i minst 1 minut efter neutraliseringsfasen med ProCare Med 30 C för att säkerställa att inga märken kvarstår på de bearbetade objekten och för att undvika korrosion.

För diskdesinfektorer från Miele och Steelco finns specifik information om fullständiga programcykler för olika medicinska specialiteter i respektive bruksanvisning.

Obs!

Blanda inte med andra produkter. • Kontakta Miele/Steelco Service vid byte av produkter. • Bearbetningen ska följa alla bestämmelser i enlighet med förordningarna om medicintekniska produkter och ska genomföras med lämpliga validerade processer. • I enlighet med nationella riktlinjer och/eller EN ISO 15883 krävs en prestandakvalificering. • Följ rekommendationerna för rekonditionering från instrumentens tillverkare med avseende på kraven i ISO 17664. • Följ bruksanvisningarna till diskdesinfektorerna från Miele/Steelco. • För användning i diskdesinfektorer från andra tillverkare än Miele/Steelco hänvisas till bruksanvisningarna från respektive tillverkare.

ProCare

Med 30 C

Neutraliseringsmedel baserat på organisk syra

Tekniska uppgifter

Densitet (koncentrat): 1,2 g/ml.

pH-värde (1 % lösning i demineraliserat vatten): cirka 2,6.

Utseende (koncentrat): genomskinligt, färglöst.

Ingredienser

Organisk syra.

Transport och förvaring

Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

Information om kassering och återvinning

Behållare, skruvlock och etiketter är tillverkade av återvinningsbar polyeten. Lokala bestämmelser om avfall och avloppsvatten ska följas vid kassering av använda behållare, inklusive behållare med restprodukt och bearbetad lösning.

Information om kassering av oanvänd produkt finns i säkerhetsdatabladet.

Säkerhetsinformation

Information om säkerhet i arbetet finns i säkerhetsdatabladet.

CE-märkning

ProCare Med 30 C uppfyller kraven för medicintekniska produkter enligt förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Tillgänglighet

Fråga din lokala representant om aktuella storlekar på behållare.

Kontaktuppgifter**Tyskland**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 SOLNA
Tel.+46 8 56229-000
Fax +46 8 56229-209
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Tillverkare**Schweiz**

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch