

ProCare

Med 64 LUB

Lubrificante per applicazioni manuali

Istruzioni d'uso

Applicazione

ProCare Med 64 LUB è un prodotto per la cura di strumentazione di alta qualità in formato spray, progettato per il trattamento manuale di dispositivi medici termostabili riutilizzabili, invasivi e non-invasivi, come strumenti chirurgici con componenti mobili come giunti, cerniere, filettature, chiusure e altre superfici di scorrimento come morsetti, forcipi, punzoni, porta-ago, retrattori, legature ecc. Viene applicato dopo accurata pulizia e disinfezione e prima della sterilizzazione a vapore.

Proprietà

ProCare Med 64 LUB è un lubrificante per strumentazione manuale avente le seguenti proprietà:

- A base esclusivamente di olio bianco di gradazione medica
- Privo di qualsiasi additivo potenzialmente allergenico
- Lascia uno strato sottile sulle superfici trattate per prevenire l'attrito tra metallo e metallo
- Impedisce in modo efficace l'attrito tra metallo e metallo, proteggendo gli strumenti incernierati da corrosione per sfregamento, ruggine, annerimento, macchiatura e usura prematura degli strumenti
- Permeabilità dimostrata al vapore
- Compatibile con la sterilizzazione a vapore
- Tossicologicamente sicuro ai sensi dei regolamenti farmaceutici e alimentari
- Inserto nebulizzatore regolabile a qualsiasi lunghezza desiderata

Compatibilità dei materiali

Adatto a tutti i metalli comunemente utilizzati nei dispositivi medici. Può sussistere incompatibilità con polimeri a seconda della tipologia di polimero.

Per materiali non elencati in precedenza si prega di contattare il rappresentante locale per stabilire l'idoneità del materiale.

Dosaggio e applicazione

Per una cura ottimale dello strumento, dopo un'accurata pulizia, disinfezione e asciugatura, gli strumenti dovrebbero essere raffreddati a temperatura ambiente prima di essere applicati per evitare l'abrasione del metallo e danni alla superficie. Gli strumenti devono essere completamente asciutti prima dell'applicazione di ProCare Med 64 LUB.

Spruzzare ProCare Med 64 LUB in modo rapido e selettivo su giunti, cerniere, superfici scorrevoli, filettature e altri componenti mobili dalla distanza più breve possibile, utilizzando l'inserto nebulizzatore in dotazione. Mantenere la bomboletta spray in posizione verticale durante lo spruzzo. La successiva movimentazione dei componenti mobili favorisce la distribuzione del lubrificante. L'olio in eccesso deve essere eliminato con un panno pulito prima della sterilizzazione.

Attenzione!

Non miscelare con altri prodotti! • Contattare il Servizio Assistenza Miele/Steelco in caso di conversione ad altri prodotti. • Attenersi alle raccomandazioni sul ricondizionamento emesse dai produttori della strumentazione in relazione alle disposizioni della norma ISO 17664.

ProCare

Med 64 LUB

Lubrificante per applicazioni manuali

Dati tecnici

Densità: 0,9 g/mL

Valore di pH: neutro

Aspetto: incolore

Componenti

Olio bianco medicinale (Farmacopea Europea), propellente (propano, butano)

Trasporto e conservazione

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5 °C e 25 °C.

Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta e mantenerlo lontano da fonti di calore e innesco.

Informazioni relative a smaltimento e riciclaggio

La bomboletta è realizzata in alluminio riciclabile. Per lo smaltimento delle bombolette vuote, attenersi ai regolamenti locali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di sicurezza

Per informazioni sulla sicurezza sul lavoro e sul corretto smaltimento del prodotto inutilizzato, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Evitare la formazione di aerosol; non inalare aerosol.

Marcatura CE

ProCare Med 64 LUB è conforme ai requisiti per dispositivi medici ai sensi del Regolamento relativo ai dispositivi medici (UE) 2017/745.

Disponibilità

Contattare il rappresentante locale riguardo alle attuali dimensioni dei contenitori.

Dati di contatto**Germania**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia G.m.b.H
Strada di Circonvallazione, 27
39057 San Michele Appiano (BZ)
Tel. +39 0471 666319
Fax +39 0471 666350
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional
www.miele.it/de/professional

Italy

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Svizzera

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Produttore**Svizzera**

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch