

# ProCare

Med 30 C

## Środek neutralizujący na bazie kwasu organicznego

### Instrukcja użytkowania

#### Zastosowanie

ProCare Med 30 C to kwasowy środek neutralizujący do myjni-dezynfektorów do zastosowania po łagodnie zasadowym odczynie, maszynowym myciu termostabilnych i termolabilnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, inwazyjnych i nieinwazyjnych, takich jak narzędzia chirurgiczne, mikrochirurgiczne i instrumenty MIS, sztywne endoskopy, sprzęt do znieczulania i układu oddechowego, przyrządy oddziałowe, aluminiowe kontenery sterylizacyjne i inny sprzęt medyczny.

#### Właściwości

ProCare Med 30 C to łagodnie kwasowy środek neutralizujący, posiadający poniższe właściwości:

- Łagodnie usuwa osady zasadowe z przedmiotów poddawanych obróbce
- Może przedłużyć żywotność narzędzi, zapobiegając powstawaniu plam na przedmiotach mytych detergentami zasadowymi, które mogłyby spowodować nieodwracalne uszkodzenie materiałów w późniejszym cyklu przygotowania do użytku, np. podczas sterylizacji
- Nadaje się do materiałów do znieczulania
- Kompatybilny z aluminium
- Wolny od środków powierzchniowo czynnych
- Wolny od fosforanów

#### Zgodność materiałowa

Nadaje się do stali nierdzewnej, (anodowanego) aluminium, tworzyw sztucznych, gumy, szkła i ceramiki.

W przypadku materiałów niewymienionych powyżej prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu ustalenia, czy materiał jest odpowiedni.

#### Dozowanie i użycie

Optymalne dozowanie zależy głównie od ilości osadów zasadowych. Zapewnić całkowite spuszczenie płynu myjącego przed neutralizacją.

W praktyce faza neutralizacji z dozowaniem od 1 do 3 mL/L zapewnia dobre wyniki po upływie co najmniej 1 minuty od czyszczenia detergentami zasadowymi, takimi jak ProCare Med 10 MA. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji użytkowania ProCare Med 10 MA.

Zapewnić prawidłowe płukanie pośrednie po fazie neutralizacji przy użyciu ProCare Med 30 C przez co najmniej 1 minutę, aby upewnić się, że na elementach poddawanych obróbce nie pozostały żadne ślady oraz dla uniknięcia korozji.

W przypadku myjni-dezynfektorów Miele i Steelco szczegółowe informacje na temat pełnych cykli programu są podane dla różnych dziedzin medycyny w odpowiednich instrukcjach użytkowania.

#### Uwaga!

Nie mieszać z innymi produktami! • W przypadku zmiany produktów należy skontaktować się z serwisem Miele/Steelco. • Przygotowanie do użycia powinno być zgodne ze wszystkimi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi wyrobów medycznych oraz wykonywane przy użyciu odpowiednich, zatwierdzonych procesów. • Zgodnie z wytycznymi krajowymi i/lub normą EN ISO 15883 konieczna jest ocena skuteczności działania. • Należy postępować zgodnie z zaleceniami w zakresie dekontaminacji wydanymi przez producentów narzędzi z uwzględnieniem przepisów ISO 17664. • Należy przestrzegać instrukcji obsługi myjni-dezynfektorów Miele/Steelco. • W przypadku stosowania w myjniach-dezynfektorach innych niż dostarczane przez Miele/Steelco, należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania i zaleceniami odpowiedniego producenta.

# ProCare

**Med 30 C**

## Środek neutralizujący na bazie kwasu organicznego

**Dane techniczne**

Gęstość (koncentrat): 1.2 g/mL

Wartość pH (1% roztwór w wodzie demineralizowanej): ok. 2.6

Wygląd (koncentrat): przezroczysty, bezbarwny

**Skład**

Kwas organiczny

**Transport i przechowywanie**

Przechowywać produkt w temperaturze od 5°C do 25°C.

**Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu**

Pojemniki, nakrętki i etykiety zostały wykonane z nadającego się do recyklingu polietylenu. Przy utylizacji zużytych pojemników, w tym pojemników z pozostałościami produktu i przetworzonym roztworem, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących odpadów i ścieków.

Informacje dotyczące utylizacji niewykorzystanego produktu dostępne są w karcie charakterystyki.

**Informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy dostępne są w karcie charakterystyki.

**Oznaczenie CE**

ProCare Med 30 C spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745.

**Dostępność**

Zapytaj lokalnego przedstawiciela o obecne wymiary pojemników.

**Dane kontaktowe****Niemcy**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**Polska**

Miele Sp. z o.o.  
Ul. Czerniakowska 87A  
00-718 Warszawa  
Tel. +48 22 335-0000  
Fax +48 22 548-4010  
info@miele.pl  
www.miele.pl/professional

**Włochy**

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

**Producent****Szwajcaria**

Borer Chemie AG  
Gewerbstrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch