

ProCare Dent 10 A

Reinigingsmiddel

Gebruik:

Vloeibaar concentraat, alkalisch. Voor de automatische behandeling van tandheelkundige instrumenten in thermodesinfectoren van Miele Professional.

ProCare Dent 10 A ondersteunt de verwijdering van organische verontreiniging zoals bloed en speeksel en voorkomt opnieuw neerslaan. Grove resten van composieten, tandheelkundig cement en afdrukpasta moeten worden verwijderd voordat ze tijd hebben gehad om zich af te zetten.

ProCare Dent 10 A is niet geschikt voor het reinigen van transmissie-instrumenten. Hiervoor wordt het gebruik van het vloeibare reinigingsmiddel *ProCare Dent 10 MA* aanbevolen.

Kwaliteitskenmerken:

ProCare Dent 10 A voldoet aan de Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen.  

Als zich een ernstig incident voordoet met het product, meld dit dan aan de fabrikant en de relevante nationale autoriteit.

Producteigenschappen:


- Uitstekende materiaalcompatibiliteit en corrosiebescherming voor instrumenten en trays gemaakt van roestvrij staal.
- Bevat geen oxidanten of tensides.

Gebruik en dosering:

ProCare Dent 10 A is geformuleerd voor gebruik in processen in thermodesinfectoren van Miele Professional.

- Nauwkeurige en zuinige dosering via doseerpomp.
- Er moeten geschikte doseerdispensers worden gebruikt.
- Gebruiksconcentratie: 3 ml/l
- Programmaselectie: Vario TD
- Minimum doseertemperatuur: $\geq 40^\circ\text{C}$

Programmaverloop:

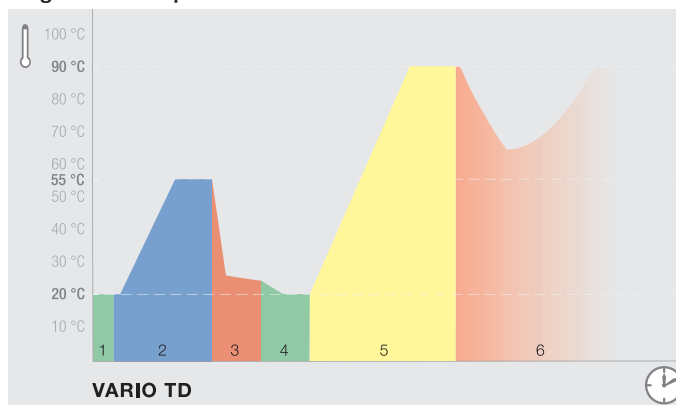

Vario TD-proces:

- 1 Voorspoelen**
Koud water (onthard), geen verwarming, geen proceschemicaliën
- 2 Hoofdreinigingsfase**
Koud/heet water (onthard), met verwarming, met *ProCare Dent 10 A*
- 3 Neutralisatie**
Koud/heet water (onthard), geen verwarming, met *ProCare Dent 30 P*
- 4 Tussentijdse spoeling**
Koud/heet water (onthard), geen verwarming
- 5 Thermische desinfectie**
bij $> 90^\circ\text{C}$ met 5 minuten houdtijd tijdens het naspoelen
- 6 Drogen**

Het product in de oplossing moet volledig worden afgespoeld met water. Bij thermodesinfectoren van Miele Professional wordt dit gegarandeerd door het Vario TD-programma bij juist gebruik (bijv. correct spoelgoed). Verificatie vindt plaats door de toename van de geleidbaarheid tijdens het naspoelen te meten tijdens ingebruikneming en routine-onderhoud.

Miele adviseert gedemineraliseerd water te gebruiken in de naspoeling om het spoelgoed en de thermodesinfector te beschermen tegen vlekken en aanslag.

Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Spoel het doseersysteem, inclusief de watertoevoerslangen, met water voordat u van product wisselt.
- De behandeling moet voldoen aan alle verordeningen volgens de regelgeving voor medische hulpmiddelen en moet worden uitgevoerd met de juiste gevalideerde processen.
- Volg de aanbevelingen voor behandeling op van fabrikanten van medische hulpmiddelen met betrekking tot de bepalingen van DIN EN ISO 17664.
- Gebruiksaanwijzingen voor thermodesinfectoren van Miele Professional moeten in acht worden genomen.
- Alleen voor professionele kwaliteit.

ProCare Dent 10 A

Reinigingsmiddel

Technische gegevens

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,5 g/cm³
- pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C) 3 ml/l: ca. 11,6

Inhoudsstoffen volgens Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende wasmiddelen:

- 15% tot 30% fosfaten

Opslaginstructies:

- Opslagtemperatuur: -15 °C tot 30 °C
- Kan 3 jaar gebruikt worden onder de juiste opslagomstandigheden.
- Houdbaarheidsdatum: zie etiket naast zandlopersymbool 

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze leeg en verzegeld zijn. Verwijdering van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

Alle informatie hierin is actueel en voor zover wij weten correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen proeven en experimenten uit te voeren. Dit kan niet worden beschouwd als een wettelijke garantie van productkenmerken of -eigenschappen.

Verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
<i>ProCare Dent 10 A</i>	Jerrycan van 5 l
Opener	voor jerrycans van 5 l, 10 l en 20 l
DTD2 Opvangschaal	voor jerrycans van 5 l en 10 l

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
BELGIEN
Tel. +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
NIEDERLANDE
Tel. +31 347 378-911
info@miele.nl
www.miele.nl



Duitsland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg, Duitsland
www.drweigert.com