

ProCare Dent 10 MA

Reinigingsmiddel

Gebruik:

Vloeibaar concentraat, licht alkalisch. Voor de automatische instrumentenbehandeling van tandheelkundige instrumenten, inclusief transmissie-instrumenten in thermodesinfectoren van Miele Professional.

ProCare Dent 10 MA ondersteunt de verwijdering van organische verontreiniging zoals bloed en speeksel en voorkomt opnieuw neerslaan. Grove resten van composieten, tandheelkundig cement en afdrukpasta moeten worden verwijderd voordat ze tijd hebben gehad om zich af te zetten.

Kwaliteitskenmerken:

ProCare Dent 10 MA voldoet aan de Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen. **CE MD**

Als zich een ernstig incident voordoet met het product, meld dit dan aan de fabrikant en de relevante nationale autoriteit.

Producteigenschappen:


- Zeer goede materiaalcompatibiliteit.
- Geanodiseerd aluminium moet eerst gecontroleerd worden op geschiktheid.
- Bevat alkaliën, tensides en enzymen.

Gebruik en dosering:

ProCare Dent 10 MA is samengesteld voor gebruik in processen in thermodesinfectoren van Miele Professional.

- Nauwkeurige en zuinige dosering via doseerpomp.
- Er moeten geschikte doseerdispensers worden gebruikt.
- Gebruiksconcentratie: 3 ml/l tot 7 ml/l, 5 min tot 10 min, 45 °C tot 55 °C
- Programmaselectie: Vario TD
- Minimum doseertemperatuur: ≥ 40 °C

Programmaverloop:

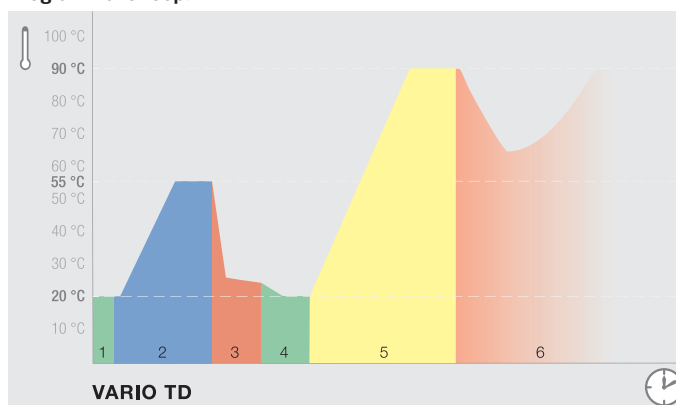

Vario TD-proces:

- 1 Voorspoelen**
Koud water (onthard), geen verwarming, geen proceschemicaliën
- 2 Hoofdreinigingsfase**
Koud/heet water (onthard), met verwarming, met *ProCare Dent 10 MA*
- 3 Neutralisatie**
Koud/heet water (onthard), geen verwarming, met *ProCare Dent 30 C*
- 4 Tussentijdse spoeling**
Koud/heet water (onthard), geen verwarming
- 5 Thermische desinfectie**
bij > 90 °C met 5 minuten houdtijd tijdens het naspoelen
- 6 Drogen**

Het product in de oplossing moet volledig worden afgespoeld met water. Bij thermodesinfectoren van Miele Professional wordt dit gegarandeerd door het Vario TD-programma bij juist gebruik (bijv. correct spoelgoed). Verificatie vindt plaats door de toename van de geleidbaarheid tijdens het naspoelen te meten tijdens ingebruikneming en routine-onderhoud.

Miele adviseert het gebruik van gedemineraliseerd water in de naspoeling om het spoelgoed en de thermodesinfector te beschermen tegen vlekken en aanslag en om geanodiseerd aluminium te beschermen.

Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Spoel het doseersysteem, inclusief de watertoevoerslangen, met water voordat u van product wisselt.
- De behandeling moet voldoen aan alle verordeningen volgens de regelgeving voor medische hulpmiddelen en moet worden uitgevoerd met de juiste gevalideerde processen.
- Volg de aanbevelingen voor behandeling op van fabrikanten van medische hulpmiddelen met betrekking tot de bepalingen van DIN EN ISO 17664.
- Gebruiksaanwijzingen voor thermodesinfectoren van Miele Professional moeten in acht worden genomen.
- Alleen voor professionele kwaliteit.

ProCare Dent 10 MA

Reinigingsmiddel

Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,1 g/cm³
- pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C) 3 ml/l tot 7 ml/l: ongeveer 10,6 tot 10,7

Inhoudsstoffen volgens Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende wasmiddelen:

- < 5% niet-ionische en anionische tensides
- Daarnaast enzymen

Opslaginstructies:

- Opslagtemperatuur: 0 °C tot 25 °C
- Uit de buurt van zonlicht houden.
- Kan 2 jaar gebruikt worden onder de juiste opslagomstandigheden.
- Houdbaarheidsdatum: zie etiket naast zandlopersymbool 

Kleurveranderingen van het product kunnen optreden bij opslag in door de fabriek verzegelde verpakkingseenheden. Dit heeft geen invloed op de eigenschappen van het product die relevant zijn voor de toepassing.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze leeg en verzegeld zijn. Verwijdering van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

Alle informatie hierin is actueel en voor zover wij weten correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen proeven en experimenten uit te voeren. Dit kan niet worden beschouwd als een wettelijke garantie van productkenmerken of -eigenschappen.

Verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
<i>ProCare Dent 10 MA</i>	Jerrycan van 5 l
Opener	voor jerrycans van 5 l, 10 l en 20 l
DTD2 Opvangschaal	voor jerrycans van 5 l en 10 l

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
BELGIEN
Tel. +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
NIEDERLANDE
Tel. +31 347 378-911
info@miele.nl
www.miele.nl



Duitsland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg, Duitsland
www.drweigert.com