

### Agente de aclarado final

#### Utilización:

Concentrado líquido. Para la preparación automatizada de instrumental odontológico, incluido el instrumental de transmisión en lavadoras desinfectadoras Miele Professional.

#### Características de calidad:

ProCare Dent 40 cumple los requisitos derivados de la normativa europea sobre productos sanitarios.



Si se produce un incidente grave con este producto, debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

#### Características del producto:


- Mejora y acelera el secado del instrumental dental durante su preparación.
- Neutralización de los residuos alcalinos arrastrados y de las aguas alcalinas.

#### Aplicación y dosificación:

ProCare Dent 40 se adapta a las secuencias de proceso de las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.

- Para la dosificación deben utilizarse aparatos de dosificación adecuados.
- Concentración de la aplicación: 0,3 ml/l mediante el dosificador para el abrillantador situado en la puerta
- Programa: Vario TD
- Temperatura mínima de dosificación:  $\geq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

#### Desarrollo del programa:

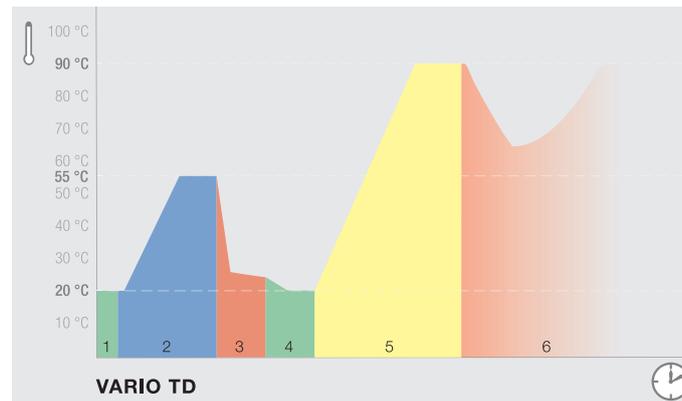

#### Desarrollo del procedimiento Vario TD:

- 1 Prelavado**  
Agua fría (descalcificada), sin calentamiento
- 2 Limpieza**  
Agua fría/caliente (descalcificada), con calentamiento, con productos químicos de procesos
- 3 Neutralización**  
Agua fría/caliente (descalcificada), sin calentamiento, con productos químicos de procesos
- 4 Aclarado intermedio**  
Agua fría/caliente (descalcificada), sin calentamiento
- 5 Desinfección térmica**  
a  $> 90\text{ }^{\circ}\text{C}$  durante 5 minutos, incluido el aclarado final con ProCare Dent 40
- 6 Secado**

Se recomienda el uso de agua completamente desmineralizada en el aclarado final para evitar la formación de depósitos y manchas de agua y para proteger el aluminio anodizado.

#### Tener en cuenta:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Antes del cambio de producto hay que enjuagar el sistema de dosificación y las mangueras de aspiración con agua.
- La preparación debe realizarse de acuerdo con la legislación sobre productos sanitarios y la normativa aplicable, utilizando procedimientos adecuados y validados.
- Tenga en cuenta las recomendaciones de preparación del fabricante del dispositivo médico de acuerdo con los requisitos de la norma DIN EN ISO 17664.
- Deben respetarse las instrucciones de uso de las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.
- Solo para uso industrial.

### Agente de aclarado final

**Datos técnicos:**

- Densidad (20 °C): aprox. 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- Valor pH (Determinado con agua completamente desmineralizada, 20 °C) 0,3 ml/l: aprox. 3,8

**Componentes del detergente según el reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004:**

- < 5 % fosfonatos
- 15 % a 30 % de tensioactivos no iónicos
- También conservantes (metilcloroisotiazolinonas/metilisotiazolinonas)

**Indicaciones de almacenamiento:**

- Temperatura de almacenamiento: 0 °C hasta 30 °C
- Válido durante 3 años si se conserva correctamente.
- Usar no más tarde de: ver impresión en la etiqueta detrás del símbolo 

**Indicaciones de peligro y seguridad:**

Para saber más sobre las advertencias medioambientales y de seguridad consulte las hojas de datos de seguridad. Disponibles en la página web de Miele que se indica abajo.

Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias. De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

**Unidad de empaquetado suministrada:**

| Denominación    | Envase         |
|-----------------|----------------|
| ProCare Dent 40 | Botella de 1 l |

**Datos de contacto:****Alemania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 800 22 446 44  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**España**

Miele S.A.U.  
Avda. de Bruselas, 31  
28108 ALCOBENDAS/MADRID  
Tel. +34 902575175  
professional@miele.es  
professionalservice@miele.es  
www.miele.es/professional

**Alemania**

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlhagen 85  
20539 Hamburgo  
www.drweigert.de