

ProCare Dent 30 C

Agente neutralizante

Utilización:

Concentrado líquido, ácido, a base de ácidos cítricos. Para la preparación a máquina de instrumental dental, incluyendo el instrumental de transmisión en lavadoras desinfectadoras de Miele Professional.

Se recomienda el uso de *ProCare Dent 30 C* sobre todo para los casos en los que el instrumental no se puede preparar con un producto neutralizante de ácidos fosfóricos (p. ej., instrumental de transmisión).

Características de calidad:

ProCare Dent 30 C cumple con las indicaciones resultantes de la legislación europea sobre productos sanitarios. **CE MD**

Si se produce un suceso grave con este producto, se debe informar al fabricante y a las autoridades responsables.

Características del producto:


- Buena compatibilidad con los materiales
- No contiene tensioactivos

Aplicación y dosificación:

Miele *ProCare Dent 30 C* se adapta a las secuencias de proceso de las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.

- Dosificación exacta y económica mediante una bomba dosificadora.
- Debe garantizarse que tanto la carga como las tuberías de desagüe son resistentes a los ácidos.
- Para la dosificación deben utilizarse dispositivos de dosificación adecuados.
- Concentración de la aplicación: 1 ml/l
- Selección de programas: varioTD

Desarrollo del programa:

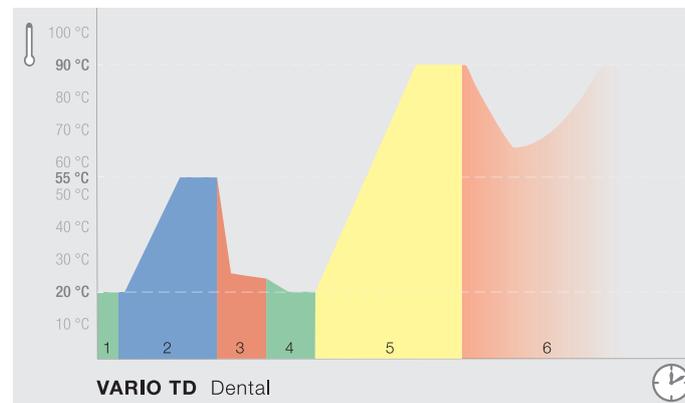

Desarrollo del proceso varioTD:

- Prelavado con agua fría, para eliminar la suciedad mayor (p. ej., sangre)
- Limpieza
- Neutralización con *ProCare Dent 30 C*
- Aclarado intermedio con agua fría
- Desinfección térmica a 93 °C durante 5 minutos de tiempo de mantenimiento en el último aclarado
- Secado

La solución de la aplicación debe enjuagarse completamente con agua. En caso de utilizar una lavadora desinfectadora de Miele Professional, esto queda garantizado si se utiliza correctamente el programa Vario TD (p. ej., con la clasificación correcta de la carga). Durante la puesta en funcionamiento o el mantenimiento rutinario de la lavadora desinfectadora se realiza una verificación midiendo el aumento de conductancia en el último aclarado.

Para el último aclarado se recomienda utilizar agua completamente desmineralizada y de esta forma evitar la formación de depósitos, manchas de agua y a la vez proteger el aluminio anodizado.

¡Importante!

- No se debe mezclar con otros productos.
- Para sustituir el producto, contactar con el Servicio Post-venta de Miele.
- La preparación debe realizarse de acuerdo con la legislación sobre productos sanitarios y la normativa aplicable, siguiendo procedimientos adecuados y validados.
- Tenga en cuenta las recomendaciones de preparación del fabricante de los productos sanitarios, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma DIN EN ISO 17664.
- Se deben respetar las instrucciones de uso de las lavadoras desinfectadoras de Miele Professional.
- Solo para uso industrial.

ProCare Dent 30 C

Agente neutralizante

Datos técnicos:

- Densidad (20 °C): aprox. 1,2 g/cm³
- Valor pH (determinado con agua completamente desmineralizada a 20 °C) 1 ml/l: aprox. 3,0

Componentes del detergente, de acuerdo con el reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004:

- Producto conservante (2-octil-2 H-isotiazol-3-ona)

Indicaciones de almacenaje:

- Temperatura de almacenaje: -3 °C hasta 30 °C
- Caduca a los 3 años con almacenaje correcto.
- Usar no más tarde de: ver impresión en la etiqueta detrás del símbolo 

Durante el tiempo de almacenaje pueden producirse cambios de color en los envases cerrados originales. Esto no afecta las propiedades técnicas de aplicación.

Indicación de seguridad y de peligro:

Puede encontrar más información sobre las advertencias sobre el medio ambiente y de seguridad en las hojas de datos de seguridad. Las puede encontrar en la página web de Miele que se indica abajo.

Elimine el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Los datos de la ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar sus propias pruebas y comprobaciones. De ello no se puede derivar una garantía jurídicamente vinculante sobre ciertas propiedades.

Envases de suministro y accesorios

Denominación	Envase	Número del material
ProCare Dent 30 C	Botella de 1 l	12392640

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 Alcobendas/Madrid
Tel.: +34 91 62 32 000
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional



Alemania

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de