

ProCare

Med 40

Produit de rinçage biocompatible

Instructions d'utilisation

Application

ProCare 40 est un produit de rinçage et de séchage, dosé dans l'eau de rinçage finale des laveurs-désinfecteurs pour les dispositifs médicaux réutilisables, invasifs et non invasifs, thermostables et thermolabiles, tels que les instruments chirurgicaux, microchirurgicaux et les instruments de chirurgie mini-invasive (CMI), les ustensiles, ainsi que les laveurs-désinfecteurs Steelco de grande capacité pour les lits d'hôpitaux, etc.

Propriétés

ProCare Med 40 est un produit de rinçage présentant les propriétés suivantes :

- Limite la tension de surface de l'eau
- Réduit les traces d'eau sur les marchandises
- Diminue considérablement le temps de séchage
- Biocompatibilité approuvée
- pH neutre

Compatibilité des matériaux

Convient pour l'acier inoxydable, l'aluminium (anodisé), les métaux non ferreux, le PVC, le caoutchouc, les matières plastiques, la céramique. Pour les appareils et les composants en polysulfone (PSU) et en polyphénylsulfone (PPSU), en PVC et en caoutchouc, des fissures de tension peuvent se produire. Selon le matériau, des tests doivent être réalisés avant utilisation.

Pour les matériaux non mentionnés ci-dessus, veuillez contacter votre représentant local afin de déterminer si le matériau est compatible.

Dosage et application

Selon la qualité de l'eau, un dosage de 0.3 à 1.0 mL/L donne de bons résultats. De l'eau déionisée/osmosée doit toujours être utilisée pour la désinfection thermique ou thermo-chimique/(le rinçage final). La température de dosage minimum est de 40 °C.

Pour les laveurs-désinfecteurs Miele et Steelco, des informations spécifiques sur les cycles de programme complets sont indiquées selon les différentes disciplines médicales dans leur mode d'emploi respectif.

Remarque !

Ne convient pas pour les ustensiles d'anesthésie. • Ne pas mélanger à d'autres produits ! • Contacter le service Miele/Steelco en cas de changement de produit. • Le traitement doit se conformer à toutes les ordonnances conformément aux réglementations relatives aux dispositifs médicaux et doit être réalisé selon des processus appropriés et validés. • Conformément aux directives nationales et/ou à la norme EN ISO 15883, une qualification de performance est nécessaire. • Suivre les recommandations sur le retraitement publiées par les fabricants d'instruments au regard des dispositions de la norme ISO 17664. • Les instructions d'utilisation des laveurs-désinfecteurs Miele/Steelco doivent être respectées. • En cas d'utilisation d'autres laveurs-désinfecteurs que ceux fournis par Miele/Steelco, veuillez vous référer au fabricant du laveur-désinfecteur et à ses instructions d'utilisation.

ProCare

Med 40

Produit de rinçage biocompatible

Données techniques

Densité (concentré) : 1.0 g/mL

Valeur pH (1 % de solution dans de l'eau déminéralisée) : environ 7.9

Apparence (concentré) : transparent, incolore à jaune

Ingrédients

Tensio-actifs, acides organiques, conservateurs

Transport et stockage

Transporter et entreposer ce produit entre 5 et 25 °C.

Ce dispositif médical est sensible au froid. Si la température ambiante de transport est susceptible d'être inférieure à 5 °C, ce produit doit être expédié par camion/conteneur maritime à une température contrôlée supérieure à 5 °C, ou en utilisant des caches de protection pour éviter que la température ambiante ne descende en dessous de moins 5 °C pendant plus de 10 heures lors du transport.

Informations relatives à l'élimination et au recyclage

Les conteneurs, les bouchons à vis et les étiquettes sont fabriqués en polyéthylène recyclable. Pour l'élimination de conteneurs usagés, y compris ceux contenant du produit résiduel et une solution de traitement, les réglementations locales en matière de déchets et d'eaux usées doivent être respectées.

Pour l'élimination du produit non usagé, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Consignes de sécurité

Pour obtenir des informations concernant la sécurité au travail, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Marquage CE

ProCare Med 40 satisfait aux exigences relatives aux dispositifs médicaux conformément à la réglementation sur les dispositifs médicaux (EU) 2017/745.

Disponibilité

Veuillez contacter votre représentant local pour en savoir plus sur les dimensions actuelles du conteneur.

Coordonnées

Allemagne

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 LE BLANC-MESNIL
Tel. +33 1 4939-4444
Fax +33 1 4939-4438
advpro@miele.fr
savpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Suisse

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Italie

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Luxembourg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 LUXEMBOURG
Tel. +352 49711-25
Fax +352 49711-39
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional
www.miele.lu/fr/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
Tel. +32 2 4511-540
Fax +32 2 4511-414
professional@miele.be
www.miele.be/fr/professional
www.miele.be/nl/professional

Fabricant

Suisse
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch