

ProCare

Med 13 PRE

Schiuma enzimatica pretrattante, leggermente alcalina

Istruzioni d'uso

Applicazione

ProCare Med 13 PRE è una schiuma detergente enzimatica leggermente alcalina, pronta per l'uso, a base di una speciale combinazione di enzimi e tensioattivi, progettata per mantenere umidi dispositivi medici termostabili e termolabili riutilizzabili, invasivi e non-invasivi, contaminati da tessuti ematici e organici, come strumenti e utensili chirurgici, strumenti MIS, endoscopi rigidi e altre attrezzature mediche, e proteggerli dalla corrosione durante il trasporto dal punto di utilizzo alla zona di trattamento.

Proprietà

A base di una speciale formulazione enzimatica, ProCare Med 13 PRE mantiene gli strumenti umidi in modo efficiente e offre le seguenti proprietà:

- Riduce al minimo l'adesione di contaminazioni organiche chirurgiche e consente pertanto una pulizia più semplice nel termodisinfettatore
- Protegge dalla corrosione
- Ottima risciacquabilità già a temperatura ambiente
- Schiuma stabile
- Adatto ad alluminio e alluminio anodizzato
- Sicuro e sostenibile per l'utente e il paziente

Compatibilità dei materiali

Adatto ad acciaio inossidabile, alluminio (anodizzato), titanio e altri metalli non ferrosi, materiali cromati, materie plastiche, elastomeri, incluso poliuretano e silicone, politetrafluoretilene (PTFE, ad es. Teflon), gomma e lattice, vetro e ceramica. Nessuna incompatibilità con materiali nota.

Per materiali non elencati in precedenza si prega di contattare il rappresentante locale per stabilire l'idoneità del materiale.

Dosaggio e applicazione

ProCare Med 13 PRE è una schiuma pronta per l'uso da applicare direttamente su oggetti contaminati nel punto di utilizzo del dispositivo medico immediatamente dopo l'uso. Va spruzzato in modo da assicurare una copertura e una bagnatura completa degli strumenti al fine di ottenere l'efficacia ottimale.

Il risciacquo della schiuma prima dell'ulteriore trattamento o il sufficiente pre-risciacquo nel termodisinfettatore potrebbero favorire la stabilità del processo automatizzato.

Attenzione!

Non miscelare con altri prodotti! • Contattare il Servizio Assistenza Miele/Steelco in caso di conversione ad altri prodotti. • Attenersi alle raccomandazioni sul ricondizionamento emesse dai produttori della strumentazione in relazione alle disposizioni della norma ISO 17664.

ProCare

Med 13 PRE

Schiuma enzimatica pretrattante, leggermente alcalina

Dati tecnici

Densità (soluzione pronta per l'uso): 1,0 g/mL

Valore di pH (soluzione pronta per l'uso): circa 8.4

Aspetto (soluzione pronta per l'uso): trasparente, incolore

Componenti

Tensioattivi, enzimi, solubilizzanti, conservanti

Trasporto e conservazione

Conservare il presente prodotto a temperature comprese tra 5 °C e 25 °C.

Il presente dispositivo medico è sensibile alle temperature fredde. Se si prevede che la temperatura ambiente di trasporto sia inferiore a 5 °C, il presente prodotto deve essere spedito in camion/container marittimo a temperatura controllata superiore a 5 °C o utilizzando coperture protettive per il trasporto in caso di temperatura ambiente non inferiore a -5 °C per più di 10 ore.

Informazioni relative a smaltimento e riciclaggio

I contenitori, i tappi a vite e le etichette sono realizzati in polietilene riciclabile. Per lo smaltimento dei contenitori usati, inclusi quelli contenenti residui di prodotto e soluzione trattata, attenersi ai regolamenti locali sullo smaltimento di rifiuti e acque reflue.

Per lo smaltimento di prodotto inutilizzato, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Informazioni di sicurezza

Per informazioni sulla sicurezza sul lavoro, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Marcatura CE

ProCare Med 13 PRE è conforme ai requisiti per dispositivi medici ai sensi del Regolamento relativo ai dispositivi medici (UE) 2017/745.

Disponibilità

Contattare il rappresentante locale riguardo alle attuali dimensioni dei contenitori.

Dati di contatto**Germania**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia G.m.b.H
Strada di Circonvallazione, 27
39057 San Michele Appiano (BZ)
Tel. +39 0471 666319
Fax +39 0471 666350
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional
www.miele.it/de/professional

Italy

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Svizzera

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Produttore**Svizzera**

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch