


### Käyttökohteet:

Teline E 444 sopii kylmävalokaapelien ja imuletkujen puhdistukseen ja desinfiointiin. Teline E 444 ripustetaan MIC-instrumenttien suorasuihkuvaunuun tai työnnetään vedentuloputkeen. Suorasuihkuvaunun mukana toimitetaan erillinen käyttöohje.

 Noudata ehdottomasti puhdistus- ja desinfiointiautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita. Käsittele laitteessa ainoastaan sellaisia välineitä/lääkinnällisiä kohteita, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfioinnin, ja noudata kunkin välineen omia puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Käytettävä puhdistus- ja desinfiointiohjelma, johon tulisi sisältyä lämpödesinfiointi, on tarvittaessa sopeutettava puhdistettavien lääkinällisten välineiden materiaalin laatuun sopivaksi.

### Kylmävalokaapelit ja letkut

- Kiinnitä kaapelien ja imuletkujen ylemmät päät telineen ylempään kiinnityspuristimeen.
- Kierrä kylmävalokaapelit ja imuletkut tasaisesti rinnakkain telineen ympäri.

Imuletkut on kierrettävä alaspäin suuntautuvalla kierteelle, jotta pesuvesi pääsee virtaamaan ylöspäin letkujen sisäpuolta pitkin ja jotta pesuvesi pääsee valumaan vapaasti ulos letkuista huuhteluiden päätyttyä.

- Kiinnitä kaapeleiden alemmat päät telineen alemmaan kiinnityspuristimeen.
- Liitä imuletkujen alemmat päät suihkusuuttimiin, jolloin pesuvesi pääsee virtaamaan ylöspäin letkun sisäpuolta pitkin.

Älä taita kylmävalokaapeleita jyrkille mutkille, jottei niiden sisällä olevat valokuidut katkea. Valokuidun katkeaminen tekee kaapelista käyttökelvottoman.



### Användningsområde

Med insats E 444 kan ljusledarkablar och slangar rengöras. Insats E 444 hängs i injektorvagn för MIC-instrument eller över vattentilloppsröret. En separat bruksanvisning bifogas injektorvagnen.

⚠ Läs igenom säkerhetsanvisningarna och varningarna i bruksanvisningen för diskdesinfektorn noggrant. Rengör endast instrument/medicinprodukter vilka av tillverkaren är deklarerade som maskinellt disk- och desinfektionsbara och beakta de specifika rengöringsanvisningarna. Det diskprogram som används med termisk desinfektion måste även anpassas till medicinprodukternas materialkvalitet.

### Ljusledarkablar och slangar

- Fixera de övre ändarna på kabel och sugslang i den övre låsanordningen på insatsen.
- Linda på ljusledarkabel och slang parallellt på insatsen.

Slangarna måste lindas i en nedåtgående spiral så att diskvattnet kan skölja genom ordentligt nerifrån och upp och så att det vid slutet av rengöringen kan rinna ur.

- Fixera den undre änden på kabeln i den undre låsanordningen på insatsen.
- Anslut den undre änden på slang till en spoldysa. Diskvattnet kan på så sätt spola genom håligheter.

Ljusledarkabeln får inte knyckas till, då kan den förstöras.