

# ProCare

Med 13 PRE

## Bruksanvisning

### Milt alkaliskt, enzymatiskt förbehandlingsskum

#### Användning

ProCare Med 13 PRE är ett bruksfärdigt, mildt alkaliskt, enzymatiskt rengöringsskum baserat på en speciell kombination av enzymer och ytaktiva ämnen. Skummet är avsett för att hålla återanvändbara, invasiva och icke-invasiva, värmestabila och värmekänsliga medicintekniska produkter som kontaminerats med blod och organiska vävnader fuktiga och skydda dem mot korrosion under transporten från användningsplatsen till bearbetningsplatsen. De medicintekniska produkterna kan exempelvis vara kirurgiska instrument och redskap, MIS-instrument, stela endoskop och annan medicinsk utrustning.

#### Egenskaper

ProCare Med 13 PRE är baserat på en speciell enzymformulering och håller effektivt instrumenten fuktiga. Produkten erbjuder följande egenskaper:

- Minimerar vidhäftningen av organisk smuts från kirurgi och förenklar därigenom rengöring i diskdesinfektor.
- Skyddar mot korrosion.
- Kan sköljas bort redan vid rumstemperatur.
- Stabilt skum.
- Lämpligt för aluminium och anodiserat aluminium.
- Säkert och hållbart för användare och patient.

#### Materialkompatibilitet

Lämpligt för rostfritt stål, (anodiserat) aluminium, titan och andra icke-järnmetaller, förkromade material, plastmaterial, elastomerer som exempelvis polyuretan och silikon, polytetrafluoreten (PTFE, t.ex. teflon), gummi och latex, glas och keramiska material. Det finns ingen känd materialinkompatibilitet.

Kontakta din lokala representant för att få information om lämpligheten för andra material som inte nämns ovan.

#### Dosering och användning

ProCare Med 13 PRE är en bruksfärdig skumspray som används direkt på kontaminerade objekt på den medicintekniska produktens användningsplats omedelbart efter användningen. Den ska sprayas så att instrumenten täcks och våts helt för att uppnå optimal effekt. Att skölja av skummet före vidare bearbetning, eller en tillräcklig försköljning i diskdesinfektor, kan vara gynnsamt för den automatiserade bearbetningens stabilitet.

#### Obs!

Blanda inte med andra produkter. • Kontakta Miele/Steelco Service vid byte av produkter.  
• Följ rekommendationerna för rekonditionering från instrumentens tillverkare med avseende på kraven i ISO 17664.

# ProCare

**Med 13 PRE**

## Milt alkaliskt, enzymatiskt förbehandlingskum

### Tekniska uppgifter

Densitet (bruksfärdig lösning): 1,0 g/ml.

pH-värde (bruksfärdig lösning): cirka 8,4.

Utseende (bruksfärdig lösning): klar, färglös.

### Ingredienser

Ytaktiva ämnen, enzym, hjälplösningsmedel och konserveringsmedel.

### Transport och förvaring

Transportera och förvara produkten vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

Den här medicintekniska produkten är känslig för låga temperaturer. Om omgivningstemperaturen under transport sannolikt kommer att vara lägre än 5 °C måste produkten transporteras i temperaturreglerad lastbil/fraktcontainer över 5 °C, eller i skyddande omslag för transport och i en omgivningstemperatur som inte sjunker under -5 °C under längre än 10 timmar.

### Information om kassering och återvinning

Behållare, skruvlock och etiketter är tillverkade av återvinningsbar polyeten. Lokala bestämmelser om avfall och avloppsvatten ska följas vid kassering av använda behållare, inklusive behållare med restprodukt och bearbetad lösning.

Information om kassering av oanvänd produkt finns i säkerhetsdatabladet.

### Säkerhetsinformation

Information om säkerhet i arbetet finns i säkerhetsdatabladet.

### CE-märkning

ProCare Med 13 PRE uppfyller kraven för medicintekniska produkter enligt förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

### Tillgänglighet

Fråga din lokala representant om aktuella storlekar på behållare.

### Kontaktuppgifter

#### Tyskland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Sverige

Miele AB  
Industrivägen 20  
171 48 SOLNA  
Tel. +46 8 56229-000  
Fax +46 8 56229-209  
professionalservice@miele.se  
www.miele.se/professional

#### Italien

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

### Tillverkare

#### Schweiz

Borer Chemie AG  
Gewerbstrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch