

# ProCare

Med 40

## Neutralizante biocompatível

### Instruções de utilização

#### Aplicação

O ProCare 40 é um agente neutralizante, doseado na água de lavagem final em máquinas de lavar e desinfetar para dispositivos médicos reutilizáveis, invasivos e não invasivos, termoestáveis e termolábeis como instrumentos cirúrgicos, instrumentos microcirúrgicos e MIS, utensílios tais como, máquinas de lavar e desinfetar Steelco de grande capacidade, por exemplo, para camas de hospital, etc.

#### Propriedades

O ProCare Med 40 é um neutralizante com as seguintes propriedades:

- Baixa a tensão superficial da água
- Reduz as marcas de água nos produtos
- Diminui significativamente o tempo de secagem
- Biocompatibilidade aprovada
- pH-neutro

#### Compatibilidade de materiais

Adequado para aço inoxidável, alumínio (anodizado), metais não ferrosos, PVC, borracha, materiais plásticos, cerâmica. Para dispositivos e componentes fabricados em polissulfona (PSU) e polifenilsulfona (PPSU), PVC, borracha, pode ocorrer rachaduras devido a esforço. Os testes de adequação devem ser realizados antes da utilização.

Para saber sobre materiais não mencionados acima, contacte o seu representante local para verificar se o material é adequado.

#### Dosagem e aplicação

Dependendo da qualidade da água, a dosagem de 0,3 a 1,0 mL/L proporciona bons resultados. A água DI/RO deve ser sempre utilizada para a desinfecção térmica ou químico-térmica (lavagem final). A temperatura mínima de dosagem é de 40 °C.

As máquinas de lavar e desinfetar da Miele e Steelco são fornecidas com informações específicas sobre os ciclos completos do programa para diferentes disciplinas médicas nas suas respetivas instruções de uso.

#### Atenção!

Não é adequado para utensílios anestésicos. • Não misture com outros produtos! • Ligue para a assistência técnica da Miele/Steelco quando trocar de produtos. • O reprocessamento deve cumprir todos os decretos de acordo com os regulamentos dos dispositivos médicos e deve ser executado com processos apropriados e validados. • Em conformidade com as diretivas nacionais e/ou com a norma EN ISO 15883, é necessária uma qualificação de desempenho. • Siga as recomendações sobre reprocessamento emitidas pelos fabricantes de instrumentos, no que diz respeito às disposições da norma ISO 17664. • Deve seguir as instruções de funcionamento relativas às máquinas de lavar e desinfetar Miele/Steelco. • Para a utilização em máquinas de lavar e desinfetar que não sejam fornecidas pela Miele/Steelco, por favor, consulte o manual de instruções e indicações do fabricante da máquina de lavar e desinfetar.

# ProCare

**Med 40**

## Neutralizante biocompatível

### Dados técnicos

Densidade (concentrado): 1,0 g/mL

Valor de pH (solução a 1% em água desmineralizada): aprox. 7.9

Aparência (concentrado): transparente, incolor a amarelo

### Ingredientes

Tensioativos, ácidos orgânicos, conservantes

### Transporte e armazenamento

Transporte e armazene o produto a temperaturas entre 5 °C e 25 °C.

Este dispositivo médico é sensível a temperaturas frias. Se a temperatura ambiente do transporte for provavelmente inferior a 5 °C, este produto deve ser enviado através de camião com temperatura controlada/contentor marítimo com temperatura acima de 5 °C, ou com capas de proteção para transporte, sem que a temperatura desça abaixo dos 5 °C durante mais de 10 horas.

### Informações sobre eliminação e reciclagem

Recipientes, tampas de rosca e rótulos são feitos de polietileno reciclável. Para eliminar recipientes usados, incluindo aqueles que tenham produtos residuais e solução processada, devem ser respeitadas as normas locais relativas ao lixo e às águas residuais.

Para a eliminação de produtos não utilizados, consulte a ficha de dados de segurança.

### Informações sobre segurança

Para saber informações sobre segurança no trabalho, consulte a ficha de dados de segurança.

### Marcação CE

O ProCare Med 40 cumpre os requisitos para dispositivos médicos de acordo com o Regulamento dos Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.

### Disponibilidade

Consulte o seu representante local para obter informações sobre os tamanhos de recipientes atualmente disponíveis.

### Dados de contacto

#### Alemanha

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Portugal

Miele Portuguesa Lda.  
Av. do Forte, n°5  
2790-073 CARNAXIDE  
Tel. +351 21 4248-100  
Fax +351 21 4248-109  
professional@miele.pt  
professionalservice@miele.pt  
www.miele.pt/professional

#### Itália

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

#### Fabricante

**Suíça**  
Borer Chemie AG  
Gewerbstrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch