

ProCare

Med 30 P

Neutraliseringsmedel baserat på oorganisk syra

Bruksanvisning

Användning

ProCare Med 30 P är ett surt neutraliseringsmedel för diskdesinfektorer som används efter alkalisk automatiserad rengöring av återanvändbara, invasiva och icke-invasiva, värme-stabila medicintekniska produkter som exempelvis kirurgiska instrument och redskap.

Egenskaper

ProCare Med 30 P är ett surt neutraliseringsmedel med följande egenskaper:

- Avlägsnar varsamt alkaliska rester från bearbetade objekt.
- Kan förlänga livslängden på instrument genom att förhindra fläckar på objekt som bearbetats med alkaliska rengöringsmedel som kan orsaka irreversibla skador på materialen senare i bearbetningscykeln, t.ex. under sterilisering.
- Fritt från ytaktiva ämnen.

Materialkompatibilitet

Lämpligt för rostfritt stål, plastmaterial, glas och keramik. Inte kompatibelt med (anodiserat) aluminium och zink.

Kontakta din lokala representant för att få information om lämpligheten för andra material som inte nämns ovan.

Dosering och användning

Optimal dosering beror i huvudsak på mängden av alkaliska rester. Se till att sköljvätskan runnit av helt före neutralisering.

En neutraliseringsfas med en dosering på 1–3 ml/l ger goda resultat med en tid på minst 1 minut efter rengöring med ProCare Med 10 A. Mer information finns i bruksanvisningen till ProCare Med 10 A.

Genomför en mellanliggande sköljning i minst 1 minut efter neutraliseringsfasen med ProCare Med 30 P för att säkerställa att inga märken kvarstår på de bearbetade objekten och för att undvika korrosion.

För diskdesinfektorer från Miele och Steelco finns specifik information om fullständiga programcykler för olika medicinska specialiteter i respektive bruksanvisning.

Obs!

För rekonditionering av anestesimaterial och oftalmologiska instrument rekommenderas användning av ProCare Med 30 C. • Blanda inte med andra produkter. • Kontakta Miele/Steelco Service vid byte av produkter. • Bearbetningen ska följa alla bestämmelser i enlighet med förordningarna om medicintekniska produkter och ska genomföras med lämpliga validerade processer. • I enlighet med nationella riktlinjer och/eller EN ISO 15883 krävs en prestandakvalificering. • Följ rekommendationerna för rekonditionering från instrumentens tillverkare med avseende på kraven i ISO 17664. • Följ bruksanvisningarna till diskdesinfektorerna från Miele/Steelco. • För användning i diskdesinfektorer från andra tillverkare än Miele/Steelco hänvisas till bruksanvisningarna från respektive tillverkare.

ProCare

Med 30 P

Neutraliseringsmedel baserat på oorganisk syra

Tekniska uppgifter

Densitet (koncentrat): 1,1 g/ml.

pH-värde (1 % lösning i demineraliserat vatten): cirka 2,3.

Utseende (koncentrat): genomskinligt, färglöst.

Ingredienser

Oorganisk syra.

Transport och förvaring

Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

Information om kassering och återvinning

Behållare, skruvlock och etiketter är tillverkade av återvinningsbar polyeten. Lokala bestämmelser om avfall och avloppsvatten ska följas vid kassering av använda behållare, inklusive behållare med restprodukt och bearbetad lösning.

Information om kassering av oanvänd produkt finns i säkerhetsdatabladet.

Säkerhetsinformation

Information om säkerhet i arbetet finns i säkerhetsdatabladet.

CE-märkning

ProCare Med 30 P uppfyller kraven för medicintekniska produkter enligt förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Tillgänglighet

Fråga din lokala representant om aktuella storlekar på behållare.

Kontaktuppgifter**Tyskland**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 SOLNA
Tel. +46 8 56229-000
Fax +46 8 56229-209
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Tillverkare**Schweiz**

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch