

# ProCare

Med 10 A

## Emäksinen monitoimipesuaine automatisoituun käsittelyyn

### Käyttöohjeet

#### Käyttö

ProCare Med 10 A on materiaalia säästävä, pesu- ja desinfektio-laitteissa käytettävä emäksinen pesuaine. Sitä käytetään uudelleenkäytettävien, lämmönkestävien, invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden, kuten kirurgisten, mikrokirurgisten ja mini-invasiivisissa leikkauksissa käytettävien instrumenttien, anestesia- ja hengityslaitteiden sekä muiden lääkinnällisten laitteiden automatisoituun käsittelyyn.

#### Ominaisuudet

ProCare Med 10 A on emäksinen pesuaine, jolla on seuraavat ominaisuudet:

- poistaa verta, kudossäelmiä ja proteiineja hellävaraisesti mutta tehokkaasti
- poistaa ja hajottaa erinomaisesti epäpuhtauksia
- kehitetty käytettäväksi erityisesti pesu- ja desinfektio-laitteissa
- erinomainen materiaalien yhteensopivuus
- ei sisällä tensidejä tai syövyttäviä emäksiä.

#### Materiaalien yhteensopivuus

Soveltuu seuraaville: ruostumaton teräs, muovimateriaalit, elastomeerit, kumi, lateksi, keraamiikka ja lasi. Ei sovellu (eloksoidulle) alumiinille tai titaanille.

Jos haluat lisätietoja muista kuin edellä mainituista materiaaleista, voit kysyä materiaalin yhteensopivuudesta paikalliselta edustajalta.

#### Annostelu ja käyttö

Optimaalinen annostelu riippuu muun muassa veden kovuudesta ja epäpuhtauden tyypistä. Yleisesti ottaen pehmenneen veden käyttäminen parantaa pesutuloksia, ja tällöin annosta voidaan pienentää.

Käytännössä 3–10 mL/L:n annostus tuottaa hyvät tulokset vähintään 10 minuutin käsittelyllä 60 °C:ssa.

Puhdistusvaiheen jälkeen on suoritettava kunnollinen, vähintään yhden minuutin kestävä väliluuhtelu vedellä tai ProCare Med 30 P -tuotteella (ProCare Med 30 C, jos kyseessä on anestesiainmateriaali). Katso lisätietoja ProCare Med 30 P -tuotteen käyttöohjeista.

Miele- ja Steelco-pesu- ja desinfektio-laitteiden käyttöohjeissa on yksityiskohtaiset tiedot kokonaisista ohjelmista eri lääketieteen aloille.

#### Huomautus!

Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa! • Jos vaihdat tuotteita, ota yhteys Miele-/Steelco-palveluun. • Käsittelyssä on noudatettava kaikkia lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia sekä asianmukaisia hyväksytyjä prosesseja. • Suorituskyvyn hyväksyntä vaaditaan kansallisten ohjeiden ja/tai EN ISO 15883 -standardin mukaisesti. • Lisäksi on noudatettava ISO 17664 -standardin määräyksiin liittyviä instrumenttien valmistajien antamia suosituksia uudelleen käsittelystä. • Miele-/Steelco-pesu- ja desinfektio-laitteiden käyttöohjeita on noudatettava. • Jos käytössä on muu kuin Mielen/Steelcon toimittama pesu- ja desinfektio-laite, on noudatettava pesu- ja desinfektio-laitteen valmistajan toimittamia käyttöohjeita.

# ProCare

**Med 10 A**

## Emäksinen monitoimipesuaine automatisoituun käsittelyyn

**Tekniset tiedot**

Tiheys (tiiviste): 1.4 g/mL

pH-arvo (1 %:n liuos suoloista puhdistetussa vedessä): noin 11.3

Ulkonäkö (tiiviste): läpinäkyvä, väritön

**Ainesosat**

Emäkset, kompleksinmuodostajat, korroosionestoaine, sekvestrausaineet

**Kuljetus ja varastointi**

Tuote on säilytettävä 5–25 °C:n lämpötilassa.

**Hävittäminen ja kierrätys**

Säiliöt, kierrekorkit ja etiketit on valmistettu kierrätettävästä polyeteenistä. Käytettyjen säiliöiden hävittämisessä on noudatettava paikallisia jätteen ja jäteveden käsittelymääräyksiä riippumatta siitä, sisältävätkö säiliöt tuotejäämiä tai käsittelyliuosta.

Lisätietoja käyttämättömän tuotteen hävittämisestä on käyttöturvallisuustiedotteessa.

**Turvallisuustiedot**

Lisätietoja työturvallisuudesta on käyttöturvallisuustiedotteessa.

**CE-merkintä**

ProCare Med 10 A täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset.

**Saatavuus**

Nykyisiä säiliökokoja koskevia tietoja saa paikalliselta edustajalta.

**Yhteystiedot****Saksa**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**Suomi**

Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 VANTAA  
Tel. +358 9 87597-500  
Fax +358 9 87597-299  
asiakaspalvelu@miele.fi  
professional@miele.fi  
www.miele.fi/professional

**Italia**

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

**Valmistaja****Sveitsi**

Borer Chemie AG  
Gewerbstrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch