

ProCare

Med 10 A

Alkalischer Allround-Reiniger für die maschinelle Aufbereitung

Gebrauchsanweisung

Verwendung

ProCare Med 10 A ist ein materialschonendes, alkalisches Reinigungsmittel, das für die maschinelle Aufbereitung von wiederverwendbaren thermostabilen, invasiven und nicht-invasiven Medizinprodukten in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten verwendet wird, darunter chirurgische Instrumente, mikrochirurgische Instrumente und Instrumente der minimal invasiven Chirurgie, Anästhesie- und Beatmungsmaterial und andere Medizinprodukte.

Produkteigenschaften

ProCare Med 10 A ist ein alkalisches Reinigungsmittel mit folgenden Eigenschaften:

- Entfernt sanft, aber effektiv Blut, Geweberückstände, Eiweiße
- Hervorragende schmutzlösende und dispergierende Eigenschaften
- Speziell für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte entwickelt
- Hohe Materialverträglichkeit
- Frei von Tensiden und Ätzalkalien

Materialverträglichkeit

Geeignet für Edelstahl, Kunststoffe, Elastomere, Gummi, Latex, Keramik und Glas. Nicht geeignet für (eloxiertes) Aluminium und Titan.

Für Materialien, die oben nicht erwähnt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort, um in Erfahrung zu bringen, ob das Produkt für das Material geeignet ist.

Dosierung und Anwendung

Die optimale Dosierung hängt im Wesentlichen von Faktoren wie Wasserhärte und Art der Verschmutzung ab. Grundsätzlich verbessert die Verwendung von enthärtetem Wasser die Reinigungsleistung, sodass die Dosiermenge in diesem Fall reduziert werden kann.

In der Praxis hat sich eine Dosierung von 3 bis 10 mL/L bewährt, wobei die Reinigungsdauer mindestens 10 Minuten bei einer Temperatur von 60 °C betragen sollte.

Stellen Sie sicher, dass nach jeder Reinigung eine sorgfältige, mindestens einminütige Zwischenspülung mit Wasser oder Neutralisation mit ProCare Med 30 P (ProCare Med 30 C bei Anästhesiematerial) durchgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung zu ProCare Med 30 P.

Für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von Miele und Steelco werden spezielle Informationen zu den vollständigen Programmzyklen für verschiedene medizinische Fachrichtungen in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen angegeben.

Bitte beachten!

Nicht mit anderen Produkten mischen. • Vor einem Produktwechsel wenden Sie sich bitte an Miele/Steelco. • Die Aufbereitung muss entsprechend aller Vorschriften im Rahmen der geltenden Bestimmungen zu Medizinprodukten erfolgen und mit geeigneten, validierten Verfahren durchgeführt werden. • Im Rahmen nationaler Vorschriften bzw. der EN ISO 15883 ist eine Leistungs-Qualifikation (LQ) erforderlich. • Halten Sie sich an die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukte-Herstellers entsprechend den Anforderungen der ISO 17664. • Beachten Sie die Bedienungsanleitung für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von Miele/Steelco. • Wenn Sie das Produkt für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von einem anderen Anbieter als Miele/Steelco verwenden wollen, beachten Sie die Bedienungsanleitung und Anweisungen des entsprechenden Herstellers.

ProCare

Med 10 A

Alkalischer Allround-Reiniger für die maschinelle Aufbereitung

Technische Daten

Dichte (Konzentrat): 1.4 g/mL

pH-Wert (1 % Lösung in vollentsalztem Wasser): ca. 11.3

Aussehen (Konzentrat): transparent, farblos

Inhaltsstoffe

Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor, Sequestriermittel

Lagerung und Transport

Das Produkt ist bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C zu lagern.

Entsorgung und Recycling

Behälter, Verschlüsse und Etiketten bestehen aus recycelbarem Polyethylen. Für die Entsorgung gebrauchter Behälter, einschliesslich solcher mit Produktrückständen und aufbereiteter Lösung, müssen die lokalen Abfall- und Abwasservorschriften beachtet werden. Für die Entsorgung des ungebrauchten Produkts beachten Sie bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Informationen zur Arbeitssicherheit finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

CE-Kennzeichnung

ProCare Med 10 A erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäss Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745.

Verfügbarkeit

Bei Fragen zu aktuellen Behältergrössen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

Kontaktdaten

Deutschland

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Geschäftsbereich Professional
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 800 22 44 644
Fax +49 800 33 55 533
vertrieb@miele-professional.de
service@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Schweiz

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Luxemburg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 LUXEMBOURG
Tel. +352 49711-25
Fax +352 49711-39
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional
www.miele.lu/fr/professional

Hersteller

Schweiz

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch