

ProCare Dent 10 A

Détergent

Utilisation :

Concentré liquide alcalin. Pour le traitement automatisé des instruments dentaires dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

ProCare Dent 10 A garantit l'élimination des salissures organiques telles que le sang et la salive et empêche leur redéposition. Les résidus grossiers issus de composites, ciments dentaires et produits de prise d'empreintes dentaires doivent être éliminés sans attendre afin d'éviter leur incrustation. *ProCare Dent 10 A* n'est pas adapté au nettoyage des pièces à main. L'utilisation du détergent liquide *ProCare Dent 10 MA* est recommandée à cet effet.

Caractéristiques :

ProCare Dent 10 A est conforme aux lignes directrices européennes concernant les dispositifs médicaux.  

En cas d'incident sérieux relatif au produit, veuillez le signaler au fabricant ainsi qu'à l'autorité nationale compétente.

Propriétés du produit :


- Excellente compatibilité des matériaux et protection contre la corrosion pour les instruments et plateaux en acier inoxydable
- Ne contient ni oxydants ni tensio-actifs

Utilisation et dosage :

ProCare Dent 10 A de Miele est formulé pour être utilisé dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

- Dosage précis et économique grâce à la pompe de dosage.
- Des distributeurs de dosage appropriés doivent être utilisés.
- Concentration d'application : 3 ml/l (0,3 %)
- Sélection de programme : Vario TD

Déroulement du programme :

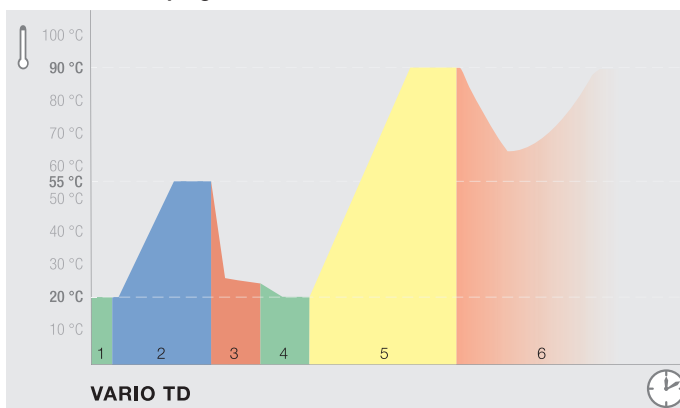

Processus Vario TD :

- 1 Prélavage à l'eau froide pour éliminer toutes les salissures grossières (par ex. du sang).
- 2 Lavage principal avec *ProCare Dent 10 A* à 55 °C (température de dosage 40 °C)
- 3 Neutralisation avec *ProCare Dent 30 P*
- 4 Rinçage intermédiaire à l'eau froide
- 5 Désinfection thermique à 93 °C avec temps de maintien de 5 minutes pour le rinçage final
- 6 Séchage

La solution doit être entièrement rincée à l'eau. Sur les laveurs-désinfecteurs Miele Professional, cela est garanti par une utilisation correcte du programme Vario TD (par ex. chargement correct). La vérification est assurée en mesurant l'augmentation de la conductivité lors du rinçage final au moment de la mise en service et des interventions d'entretien programmées. Miele recommande d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final afin de protéger la charge et le laveur-désinfecteur contre les taches et les dépôts.

Remarques importantes !

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Appelez le service technique Miele si vous changez de produit.
- Le traitement doit être conforme à toutes les ordonnances concernant la réglementation relative aux dispositifs médicaux et doit être effectué selon des processus appropriés et validés.
- Suivez les recommandations des fabricants de dispositifs médicaux sur le traitement en ce qui concerne les dispositions de la norme CAN/CSA-Z17664 (ISO 17664).
- Les indications du mode d'emploi des laveurs-désinfecteurs Miele Professional doivent être respectées.
- Pour applications professionnelles uniquement.

ProCare

Dent 10 A

Détergent


Données techniques :

- Densité (à 20 °C) : env. 1,5 g/cm³
- Valeur de pH (déterminée avec de l'eau totalement déminéralisée à 20 °C) 3 ml/l : env. 11,6

Ingrédients selon le règlement (CEE) 648/2004 relatif aux détergents :

- 15 à 30 % de phosphates

Informations sur le stockage :

- Température de stockage : -15 °C à 30 °C
- Peut être utilisé pendant 3 ans dans les conditions de stockage adéquates
- Date limite d'utilisation : consulter l'étiquette à côté du symbole du sablier. 

Consignes de sécurité et mises en garde :

Consultez les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Web de Miele indiqués ci-dessous.

Éliminez uniquement les réservoirs vides et fermés. Élimination des restes de produit : consultez la fiche de données de sécurité.

Toutes les informations fournies dans ce document sont actualisées et correctes à notre connaissance. Cela ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer ses propres essais et expériences. Ces informations ne peuvent pas être considérées comme une garantie des caractéristiques et propriétés du produit.

Unités d'emballage et accessoires :

Désignation	Unité d'emballage	N° mat.
<i>ProCare Dent 10 A</i>	Bidon de produit de 5 l	12 186 660
Clé ouvre-bidon	Pour bidon de produit de 5 l et 20 l	11 851 600
Plat récupérateur DTD 2	Pour des bidons de produit de 5 l et 10 l	10 695 460

Coordonnées de contact :

Allemagne

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tél. : +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Canada

Miele Limited
161 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 4V8
Tél. : 1-888-325-3957
professional@miele.ca
www.mieleprofessional.ca



Allemagne

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlentagen 85
20539 Hamburg, Allemagne
www.drweigert.de