

ProCare

Dent 11 A

Detersivo

Uso:

in polvere, alcalino. Per il trattamento in macchina di strumenti odontoiatrici nei termodisinfettori Miele Professional.

ProCare Dent 11 A serve per la rimozione di sporco organico come p.es. sangue e saliva e impedisce che queste sostanze possano rideposarsi. Si consiglia di rimuovere i residui di compositi, cemento e materiale da impronta prima che induriscano.

ProCare Dent 11 A non è adatto al lavaggio degli strumenti di trasmissione. Per questo si consiglia il detergente liquido *ProCare Dent 10 MA*.

Caratteristica di qualità:

ProCare Dent 11 A soddisfa le norme indicate nella legislazione europea sui dispositivi medici. **CE MD**

Se si verifica un incidente grave con questo prodotto, deve essere segnalato al produttore e alle autorità competenti.

Caratteristiche del prodotto:

- elevata protezione del materiale
- protezione dalla corrosione per strumenti e tray in acciaio inox


Uso e dosaggio:

ProCare Dent 11 A di Miele è destinato ai processi nei termodisinfettori Miele Professional.

- Concentrazione: 3 g/l tramite dosatore nello sportello per detersivi in polvere
- Selezione programma: Vario TD

Deve essere dosata sempre la stessa quantità di detersivo, preferibilmente utilizzando il cucchiaino dosatore fornito con il prodotto.

Svolgimento del programma:

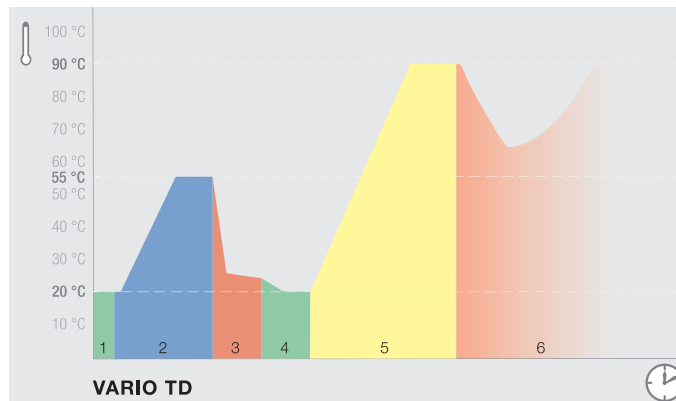

Svolgimento del processo Vario TD:

- 1 Prelavaggio con acqua fredda, per eliminare lo sporco grossolano (p.es. sangue)
- 2 Lavaggio con *ProCare Dent 11 A* a 55 °C (temperatura di dosaggio 40 °C)
- 3 Neutralizzante con *ProCare Dent 30 P*
- 4 Risciacquo intermedio con acqua fredda
- 5 Disinfezione termica a 93 °C per 5 minuti compreso risciacquo finale
- 6 Asciugatura

La soluzione d'uso deve essere completamente risciacquata con acqua. Al termine del processo non devono essere visibili residui di detersivo. In caso di utilizzo nei termodisinfettori Miele Professional, ciò è garantito dal programma Vario TD, se utilizzato correttamente (p.es. corretta disposizione del carico). Un accertamento viene eseguito tramite la misurazione del valore della conducibilità dell'acqua nel ciclo di risciacquo finale durante la messa in servizio o la manutenzione ordinaria del termodisinfettore. Nel risciacquo finale si consiglia l'impiego di acqua demineralizzata per evitare che si formino patine o macchie di acqua.

Attenzione!

- Non mescolare ad altri prodotti.
- Il trattamento deve essere eseguito ai sensi della legislazione sui dispositivi medici e delle regolamentazioni in vigore con processi adatti e convalidati.
- Rispettare le raccomandazioni sul trattamento del produttore dei dispositivi medici in base alla norma DIN EN ISO 17664.
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso dei termodisinfettori Miele Professional.
- Solo per uso professionale.

ProCare

Dent 11 A

Detersivo


Dati tecnici:

- Densità ca. da 1.015 g/l a 1.065 g/l
- Valore pH (definito in acqua demineralizzata, ca. 20 °C) 3 g/l: ca. 11,5

Componenti per detersivo secondo la normativa sui detersivi CE 648/2004:

- < 5 % tensioattivi non ionici
- > 30 % fosfati

Indicazioni per la conservazione:

- Temperatura di conservazione da rispettare: da 0 °C a 30 °C
- Richiudere il coperchio dopo aver prelevato il prodotto. Il prodotto potrebbe formare dei grumi a causa dell'umidità e perdere di efficacia
- Utilizzabile per 2 anni se la conservazione è corretta
- Scadenza: vedi stampa sull'etichetta dietro il simbolo 

Indicazioni di pericolo e avvertenze sulla sicurezza:

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate sotto.

Smaltire i fusti solo vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza.

Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore da effettuare propri test e indagini. Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

Confezione disponibile:

Denominazione	Tanica	Numero materiale
ProCare Dent 11 A	Secchio da 10 kg	12 186 990

Contatti:**Germania**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27,
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel. +39 (0) 471666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional/index.htm

**Germania**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de