

ProCare

Med 40

Bioyhteesopiva huuhteluaine

Käyttöohjeet

Käyttö

ProCare 40 on huuhtelu- ja kuivausaine, joka annostellaan uudelleenkäytettävien, invasiivisten ja ei-invasiivisten, lämmönkestävien ja lämpöherkkien lääkkinnällisten laitteiden, kuten kirurgisten, mikrokirurgisten ja mini-invasiivisissa leikkauksissa käytettävien instrumenttien ja välineiden, pesu- ja desinfektiolaitteiden sekä sairaalasängyille tarkoitettujen suurikammioisten Steelco-pesu- ja desinfektiolaitteiden viimeiseen huuhteluveteen.

Ominaisuudet

ProCare Med 40 on huuhteluaine, jolla on seuraavat ominaisuudet:

- pienentää veden pintajännitystä
- vähentää esineisiin vedestä aiheutuvia raitoja
- lyhentää huomattavasti kuivumisaikaa.
- Hyväksytty bioyhteesopivuus
- neutraali pH

Materiaalien yhteensopivuus

Soveltuu seuraaville: ruostumaton teräs, (eloksoitu) alumiini, ei-rautametallit, PVC, kumi, muovimateriaalit ja keramiikka. Polysulfonista (PSU), polyfenyylisulfonista (PPSU), PVC:stä ja kumista valmistetuissa laitteissa ja osissa voi ilmetä jännityssäröilyä. Ennen käyttöä on tehtävä asianmukaiset soveltuvuustestit.

Jos haluat lisätietoja muista kuin edellä mainituista materiaaleista, voit kysyä materiaalin yhteensopivuudesta paikalliselta edustajalta.

Annostelu ja käyttö

Hyvät tulokset saadaan 0.3–1.0 mL/L:n annostuksella veden laadun mukaan. Lämpödesinfointiin ja kemialliseen lämpödesinfointiin (viimeiseen huuhteluun) on aina käytettävä deionisoitua vettä tai käänteisosmoosivettä. Annostelun vähimmäislämpötila on 40 °C.

Miele- ja Steelco-pesu- ja desinfektiolaitteiden käyttöohjeissa on yksityiskohtaiset tiedot kokonaisista ohjelmista eri lääketieteen aloille.

Huomautus!

Ei sovellu anestesiavälineille. • Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa! • Jos vaihdat tuotteita, ota yhteys Miele-/Steelco-palveluun. • Käsitellessä on noudatettava kaikkia lääkkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia sekä asianmukaisia hyväksytyjä prosesseja. • Suorituskyvyn hyväksyntä vaaditaan kansallisten ohjeiden ja/tai EN ISO 15883 -standardin mukaisesti. • Lisäksi on noudatettava ISO 17664 -standardin määräyksiin liittyviä instrumenttien valmistajien antamia suosituksia uudelleen käsittelystä. • Miele-/Steelco-pesu- ja desinfektiolaitteiden käyttöohjeita on noudatettava. • Jos käytössä on muu kuin Mielen/Steelcon toimittama pesu- ja desinfektio laite, on noudatettava pesu- ja desinfektio laitteen valmistajan toimittamia käyttöohjeita.

ProCare

Med 40

Bioyhteensopiva huuhteluaine

Tekniset tiedot

Tiheys (tiiviste): 1.0 g/mL

pH-arvo (1 %:n liuos suoista puhdistetussa vedessä): noin 7.9

Ulkonäkö (tiiviste): läpinäkyvä, väritön tai keltainen

Ainesosat

Tensidit, orgaaniset hapot, säilöntäaineet

Kuljetus ja varastointi

Tuote on kuljetettava ja säilytettävä 5–25 °C:n lämpötilassa.

Tämä lääkinällinen laite on herkkä kylmille lämpötiloille. Jos ympäristön lämpötila kuljetettaessa on todennäköisesti alle 5 °C, tuote on kuljetettava lämpötilavalvotussa kuorma-auto-/merikontissa, jonka lämpötila on yli 5 °C. Jos kuljetettaessa tuote joutuu olemaan yli kymmenen tuntia enintään -5 asteen lämpötilassa, on tuote suojattava suojakuomulla.

Hävittäminen ja kierrätys

Säiliöt, kierrekorkit ja etiketit on valmistettu kierrätettävästä polyeteenistä. Käytettyjen säiliöiden hävittämisessä on noudatettava paikallisia jätteen ja jäteveden käsittelymääräyksiä riippumatta siitä, sisältävätkö säiliöt tuotejäämiä tai käsittelyliuosta.

Lisätietoja käyttämättömän tuotteen hävittämisestä on käyttöturvallisuustiedotteessa.

Turvallisuustiedot

Lisätietoja työturvallisuudesta on käyttöturvallisuustiedotteessa.

CE-merkintä

ProCare Med 40 täyttää lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset.

Saatavuus

Nykyisiä säiliökokoja koskevia tietoja saa paikalliselta edustajalta.

Yhteystiedot

Saksa

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Tel. +358 9 87597-500
Fax +358 9 87597-299
asiakaspalvelu@miele.fi
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional

Italia

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Valmistaja

Sveitsi

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch