

ProCare

Med 13 PRE

Miedosti emäksinen, entsyymaattinen esikäsitteilyvaahto

Käyttöohjeet

Käyttö

ProCare Med 13 PRE on käyttövalmis miedosti emäksinen entsyymaattinen puhdistusvaahto, joka perustuu erityiseen entsyymien ja tensidien yhdistelmään ja joka pitää verellä ja orgaanisella kudoksella kontaminoituneet uudelleenkäytettävät, invasiiviset ja ei-invasiiviset, lämmönkestävät ja lämpöherkät lääkinälliset laitteet, kuten kirurgiset instrumentit ja välineet, mini-invasiivisissa leikkauksissa käytettävät instrumentit, jäykät endoskoopit ja muut lääkinälliset laitteet, kosteutettuna ja suojaa niitä korroosiolta, kun niitä kuljetetaan käyttöpaikasta käsittelyalueelle.

Ominaisuudet

Eriyisen entsyymaattisen koostumuksensa ansiosta ProCare Med 13 PRE pitää instrumentit tehokkaasti kosteutettuina, ja sillä on seuraavat ominaisuudet:

- vähentää orgaanisen kirurgisen lian kiinnittymistä ja helpottaa siten puhdistusta pesu- ja desinfektio-laitteessa
- suojaa korroosiolta
- huuhtoutuu hyvin jo huoneenlämpötilassa
- vakaa vaahto
- soveltuu alumiinille ja eloksoidulle alumiinille
- turvallinen ja kestävä kehityksen mukainen sekä käyttäjälle että potilaalle.

Materiaalien yhteensopivuus

Soveltuu seuraaville: ruostumaton teräs, (eloksoitu) alumiini, titaani ja muut ei-rautametallit, kromatut materiaalit, muovimateriaalit, elastomeerit, mukaan lukien polyuretaani ja silikoni, polytetrafluorieteeni (PTFE kuten Teflon), kumi ja lateksi, lasi- ja keramiikkamateriaalit. Yhteensopimattomia materiaaleja ei ole tiedossa.

Jos haluat lisätietoja muista kuin edellä mainituista materiaaleista, voit kysyä materiaalin yhteensopivuudesta paikalliselta edustajalta.

Annostelu ja käyttö

ProCare Med 13 PRE on käyttövalmis suihkutettava vaahto, jota levitetään suoraan kontaminoituihin esineisiin lääkinällisen laitteen käyttöpaikassa heti käytön jälkeen. Tuotetta on suihkutettava siten, että se peittää ja kastelee instrumentit kokonaan. Näin saavutetaan optimaalinen teho.

Vaahdon huuhtelu ennen lisäkäsitteilyä tai riittävä esihuuhtelu pesu- ja desinfektio-laitteessa voi olla hyödyllistä automaattisen käsittelyn vakauden kannalta.

Huomautus!

Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa! • Jos vaihdat tuotteita, ota yhteys Miele-/Steelco-palveluun. • Lisäksi on noudatettava ISO 17664 -standardin määräyksiin liittyviä instrumenttien valmistajien antamia suosituksia uudelleenkäsitteilystä.

ProCare

Med 13 PRE

Miedosti emäksinen, entsymaattinen esikäsittelyvaaho

Tekniset tiedot

Tiheys (käyttövalmis liuos): 1.0 g/mL

pH-arvo (käyttövalmis liuos): noin 8.4

Ulkonäkö (käyttövalmis liuos): kirkas, väritön

Ainesosat

Tensidit, entsyymi, liuotusaineet, säilöntäaineet

Kuljetus ja varastointi

Tuote on kuljetettava ja säilytettävä 5–25 °C:n lämpötilassa.

Tämä lääkinällinen laite on herkkä kylmille lämpötiloille. Jos ympäristön lämpötila kuljettaessa on todennäköisesti alle 5 °C, tuote on kuljetettava lämpötilavalvotussa kuorma-auto-/merikontissa, jonka lämpötila on yli 5 °C. Jos kuljettaessa tuote joutuu olemaan yli kymmenen tuntia enintään -5 asteen lämpötilassa, on tuote suojattava suojakuomulla.

Hävittäminen ja kierrätys

Säiliöt, kierrekorkit ja etiketit on valmistettu kierrätettävästä polyeteenistä. Käytettyjen säiliöiden hävittämisessä on noudatettava paikallisia jätteen ja jäteveden käsittelymääräyksiä riippumatta siitä, sisältävätkö säiliöt tuotejäämiä tai käsittelyliuosta.

Lisätietoja käyttämättömän tuotteen hävittämisestä on käyttöturvallisuustiedotteessa.

Turvallisuustiedot

Lisätietoja työturvallisuudesta on käyttöturvallisuustiedotteessa.

CE-merkintä

ProCare Med 13 PRE täyttää lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset.

Saatavuus

Nykyisiä säiliökokoja koskevia tietoja saa paikalliselta edustajalta.

Yhteystiedot

Saksa

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Tel. +358 9 87597-500
Fax +358 9 87597-299
asiakaspalvelu@miele.fi
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional

Valmistaja

Sveitsi

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch

Italia

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com