

ProCare

Med 10 BPA



Reinigingsmiddel

Gebruik:

Vloeibaar concentraat, alkalisch. Voor de machinale reiniging van bedpannen en urineflessen in Miele Professional-bedpanspoelers.

Kwaliteitskenmerk:

ProCare Med 10 BPA voldoet aan de voorschriften vanuit de wetgeving voor medische hulpmiddelen. **CE**

Producteigenschappen:

- Schuimarme instelling
- Verwijdert ook hardnekkige verontreinigingen.
- Te gebruiken bij alle waterhardheden.

ProCare Med 10 BPA is uitsluitend voor professioneel gebruik.

Toepassing en dosering:


Het reinigingsmiddel ProCare Med 10 BPA en de bedpanspoelers PWD 8541, PWD 8545, PWD 8546 en PWD 8549 zijn perfect op elkaar afgestemd.

- Het middel kan nauwkeurig en economisch met een doseerpomp worden gedoseerd.
- Toegepaste concentratie: 1 – 3 ml/l afhankelijk van de vuilgraad.
- Kort, Standaard, Intensief en gebruikersprogramma's.

De te gebruiken oplossing kan volledig met water worden afgespoeld.

Programmaverloop:

Aan de hand van het voorbeeld van een standaardprogramma van de PWD 8545.

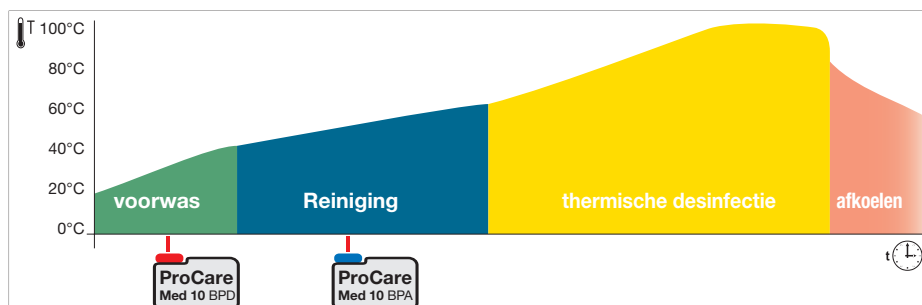

Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Spoel het doseersysteem met de aanzuigslangen met water door voordat u van product wisselt.
- De behandeling dient met geschikte processen te worden uitgevoerd volgens de daarvoor geldende adviezen van de KRINKO¹, het BfArM² en de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (Medizinprodukte-Betreiberverordnung).
- Neem de behandelingsaanbevelingen van de fabrikant van het medisch hulpmiddel overeenkomstig de eisen van DIN EN ISO 17664 in acht.
- Houd u aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzingen van de bedpanspoelers van Miele Professional.

¹Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) en het ²Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

ProCare

Med 10 BPA



Reinigingsmiddel


Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C) 1 – 3 ml/l: ca. 11,2 – 11,5

Bestanddelen van reinigingsmiddelen volgens de EG-verordening 648/2004 betreffende detergentia:

- < 5 % fosfaat
- 15 – 30 % EDTA

Opslagcondities:

- De aan te houden opslagtemperatuur: is: 0 – 30 °C
- Bij correcte opslag 3 jaar houdbaar.
- Voor de houdbaarheidsdatum zie de opdruk op het etiket achter het symbool 

Waarschuwingen en veiligheidsinformatie:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze staan op de hieronder genoemde Miele-websites ter beschikking.

Verwijder lege reservoirs volgens de voorschriften (de reservoirs moeten volledig leeg en afgesloten worden afgevoerd). Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Leverbare verpakkingseenheden en toebehoren

Aanduiding	Verpakking	Materiaalnummer
ProCare Med 10 BPA	5 l-jerrycan	11233310
Opener	voor 5 l	9066810

Contactgegevens:

Duitsland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefoon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
Telefoon +31 347378884
professional@miele.nl
www.miele.nl/professional



Duitsland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de