

# ProCare

Med 10 PRE

## Ympäristöä säästävä pesuaine manuaaliseen käyttöön

### Käyttöohjeet

#### Käyttö

ProCare Med 10 PRE on hellävarainen pesuaine, jota käytetään uudelleenkäytettävien, lämmönkestävien, invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinällisten laitteiden, kuten kirurgisten instrumenttien ja välineiden, mini-invasiivisissa leikkauksissa käytettävien instrumenttien, jäykkien endoskooppien, anestesia-laitteiden ja vastaavien välineiden, manuaaliseen käsittelyyn.

Lisäksi se soveltuu instrumenttien liottamiseen ennen automatisoitua käsittelyä, mikä vähentää instrumenttien ruostumisen ja likaantuneiden pintojen kuivumisen riskiä.

ProCare Med 10 PRE soveltuu myös ultraäänikylypyihin.

#### Ominaisuudet

ProCare Med 10 PRE sisältää optimaalisen yhdistelmän tensidejä, ja sillä on seuraavat ominaisuudet:

- neutraali pH
- kattava materiaalien yhteensopivuus
- koostumus ei sisällä NTA:ta tai fosfaatteja
- erinomainen biohajoavuus.

#### Materiaalien yhteensopivuus

Soveltuu seuraaville: ruostumaton teräs, (eloksoitu) alumiini, ei-rautametallit, PVC, kumi, muovimateriaalit ja keramiikka.

Jos haluat lisätietoja muista kuin edellä mainituista materiaaleista, voit kysyä materiaalin yhteensopivuudesta paikalliselta edustajalta.

#### Annostelu ja käyttö

Käyttö	Annostelu	Huomautukset
Lääkinällisten laitteiden manuaalinen esi(puhdistus)	0.5–1.0 %	Liota instrumentteja 2–15 minuuttia, harjaa tarvittaessa. Käytä liuosta vain kerran.
Ultraäänipuhdistus	0.5–1.0 %	Käsittelyaika on noin 5 minuuttia.
Instrumenttien liottaminen ennen automatisoitua puhdistusta	0.2–0.5 %	Käytä liuosta vain kerran.

Instrumentit on huuhdeltava vedellä puhdistuksen jälkeen tai ennen niiden laittamista pesu- ja desinfektio-laitteeseen.

#### Huomautus!

Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa! • Jos vaihdat tuotteita, ota yhteys Miele-/Steelco-palveluun. • Käsittelyssä on noudatettava kaikkia lääkinällisiä laitteita koskevia asetuksia sekä asianmukaisia hyväksytyjä prosesseja. • Lisäksi on noudatettava ISO 17664 -standardin vaatimuksiin liittyviä instrumenttien valmistajien antamia suosituksia uudelleen käsittelystä.

# ProCare

**Med 10 PRE**

## Ympäristöä säästävä pesuaine manuaaliseen käyttöön

### Tekniset tiedot

Tiheys (tiiviste): 1.1 g/mL

pH-arvo (1 %:n liuos suoloista puhdistetussa vedessä): noin 7.5

Ulkonäkö (tiiviste): läpinäkyvä, väritön tai keltainen

### Ainesosat

Tensidit, kompleksinmuodostajat, korroosionestoaine

### Kuljetus ja varastointi

Tuote on kuljetettava ja säilytettävä 5–25 °C:n lämpötilassa.

Tämä lääkinällinen laite on herkkä kylmille lämpötiloille. Jos ympäristön lämpötila kuljetettaessa on todennäköisesti alle 5 °C, tuote on kuljetettava lämpötilavalvotussa kuorma-auto-/merikontissa, jonka lämpötila on yli 5 °C. Jos kuljetettaessa tuote joutuu olemaan yli kymmenen tuntia enintään -5 asteen lämpötilassa, on tuote suojattava suojakuomulla.

### Hävittäminen ja kierrätys

Säiliöt, kierrekorkit ja etiketit on valmistettu kierrätettävästä polyeteenistä. Käytettyjen säiliöiden hävittämisessä on noudatettava paikallisia jätteen ja jäteveden käsittelymääräyksiä riippumatta siitä, sisältävätkö säiliöt tuotejäämiä tai käsittelyliuosta.

Lisätietoja käyttämättömän tuotteen hävittämisestä on käyttöturvallisuustiedotteessa.

### Turvallisuustiedot

Lisätietoja työturvallisuudesta on käyttöturvallisuustiedotteessa.

### CE-merkintä

ProCare Med 10 PRE täyttää lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset.

### Saatavuus

Nykyisiä säiliökokoja koskevia tietoja saa paikalliselta edustajalta.

### Yhteystiedot

#### Saksa

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Suomi

Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 VANTAA  
Tel. +358 9 87597-500  
Fax +358 9 87597-299  
asiakaspalvelu@miele.fi  
professional@miele.fi  
www.miele.fi/professional

### Valmistaja

#### Sveitsi

Borer Chemie AG  
Gewerbstrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch

#### Italia

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com