

ProCare

Med 10 A

Detergent o odczynie zasadowym do maszynowego przygotowania do użycia

Instrukcja użytkowania

Zastosowanie

ProCare Med 10 A to przyjazny dla materiałów detergent o odczynie zasadowym do myjni-dezynfektorów, do maszynowego przygotowania do użycia termostabilnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, inwazyjnych i nieinwazyjnych, takich jak narzędzia chirurgiczne, mikrochirurgiczne i instrumenty MIS, sprzęt do znieczulania i układu oddechowego oraz inny sprzęt medyczny.

Właściwości

ProCare Med 10 A to detergent o odczynie zasadowym posiadający poniższe właściwości:

- Delikatnie, ale skutecznie usuwa krew, pozostałości tkanek, białka
- Doskonale usuwa i dysperguje zanieczyszczenia
- Specjalnie opracowany do użytku w myjniach-dezynfektorach
- Doskonała zgodność materiałowa
- Wolny od środków powierzchniowo czynnych i żrących zasad

Zgodność materiałowa

Nadaje się do stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, elastomerów, gumy, lateksu, ceramiki i szkła. Nie jest zgodny z aluminium (anodowanym) i tytanem.

W przypadku materiałów niewymienionych powyżej prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu ustalenia, czy materiał jest odpowiedni.

Dozowanie i użycie

Optymalne dozowanie zależy od takich czynników, jak twardość wody i rodzaj zanieczyszczenia. Na ogół użycie zmiękczonej wody poprawia wyniki mycia. W konsekwencji można zmniejszyć dozowanie.

W praktyce, dozowanie od 3 do 10 mL/L zapewnia dobre wyniki po minimum 10 minutach w temperaturze 60°C.

Po zakończeniu fazy mycia należy zapewnić prawidłowe płukanie pośrednie wodą lub ProCare Med 30 P (ProCare Med 30 C w przypadku materiału do znieczulania) przez co najmniej 1 minutę. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji użytkowania ProCare Med 30 P.

W przypadku myjni-dezynfektorów Miele i Steelco szczegółowe informacje na temat pełnych cykli programu są podane dla różnych dziedzin medycyny w odpowiednich instrukcjach użytkowania.

Uwaga!

Nie mieszać z innymi produktami! • W przypadku zmiany produktów należy skontaktować się z serwisem Miele/Steelco. • Przygotowanie do użycia powinno być zgodne ze wszystkimi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi wyrobów medycznych oraz wykonywane przy użyciu odpowiednich, zatwierdzonych procesów. • Zgodnie z wytycznymi krajowymi i/lub normą EN ISO 15883 konieczna jest ocena skuteczności działania. • Należy postępować zgodnie z zaleceniami w zakresie dekontaminacji wydanymi przez producentów narzędzi z uwzględnieniem przepisów ISO 17664. • Należy przestrzegać instrukcji obsługi myjni-dezynfektorów Miele/Steelco. • W przypadku stosowania w myjniach-dezynfektorach innych niż dostarczane przez Miele/Steelco, należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania i zaleceniami odpowiedniego producenta.

ProCare

Med 10 A

Detergent o odczynie zasadowym do maszynowego przygotowania do użycia

Dane techniczne

Gęstość (koncentrat): 1.4 g/mL

Wartość pH (1% roztwór w wodzie demineralizowanej): ok. 11.3

Wygląd (koncentrat): przezroczysty, bezbarwny

Skład

Zasady, czynniki kompleksujące, inhibitor korozji, czynniki maskujące

Transport i przechowywanie

Przechowywać produkt w temperaturze od 5°C do 25°C.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Pojemniki, nakrętki i etykiety zostały wykonane z nadającego się do recyklingu polietylenu. Przy utylizacji zużytych pojemników, w tym pojemników z pozostałościami produktu i przetworzonym roztworem, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących odpadów i ścieków.

Informacje dotyczące utylizacji niewykorzystanego produktu dostępne są w karcie charakterystyki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy dostępne są w karcie charakterystyki.

Oznaczenie CE

ProCare Med 10 A spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745.

Dostępność

Zapytaj lokalnego przedstawiciela o obecne wymiary pojemników.

Dane kontaktowe

Niemcy

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Polska

Miele Sp. z o.o.
Ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. +48 22 335-0000
Fax +48 22 548-4010
info@miele.pl
www.miele.pl/professional

Włochy

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Producent

Szwajcaria

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch