

ProCare

Med 30 C

Agent neutralisant à base d'acide organique

Instructions d'utilisation

Application

ProCare Med 30 C est un neutralisant acide destiné aux laveurs-désinfecteurs après un nettoyage automatisé légèrement alcalin de dispositifs médicaux réutilisables, thermos-tables, thermolabiles, invasifs et non-invasifs tels que les instruments chirurgicaux, micro-chirurgicaux et de chirurgie mini-invasive (CMI), les endoscopes rigides, les équipements d'anesthésie et respiratoires, les ustensiles médicaux, les conteneurs de stérilisation en aluminium et autres équipements médicaux.

Propriétés

ProCare Med 30 C est un neutralisant légèrement acide présentant les propriétés suivantes :

- Élimine en douceur les résidus alcalins des éléments traités
- Peut augmenter la durée de vie des instruments en protégeant les éléments traités avec des détergents alcalins de taches qui pourraient par la suite provoquer des dommages irréversibles sur les matériaux au cours du cycle de traitement, par ex. pendant la stérilisation
- Convient pour le matériel d'anesthésie
- Compatible avec l'aluminium
- Sans tensio-actifs
- Sans phosphates

Compatibilité des matériaux

Convient pour l'acier inoxydable, l'aluminium (anodisé), les matières plastiques, le caoutchouc, le verre et la céramique.

Pour les matériaux non mentionnés ci-dessus, veuillez contacter votre représentant local afin de déterminer si le matériau est compatible.

Dosage et application

Le dosage optimal dépend principalement de la quantité des résidus alcalins. Veiller à procéder à la vidange complète de la solution de lavage avant la neutralisation.

Dans la pratique, une phase de neutralisation avec un dosage de 1 à 3 mL/L donne de bons résultats au bout d'au moins 1 min après un nettoyage avec des détergents alcalins tels que ProCare Med 10 MA. Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation de ProCare Med 10 MA pour obtenir plus de détails.

Veiller à procéder un rinçage intermédiaire approprié après la phase de neutralisation avec ProCare Med 30 C durant au moins 1 min afin de vous assurer que plus aucune marque n'existe sur les éléments traités et pour éviter toute corrosion.

Pour les laveurs-désinfecteurs Miele et Steelco, des informations spécifiques sur les cycles de programme complets sont indiquées selon les différentes disciplines médicales dans leur mode d'emploi respectif.

Remarque !

Ne pas mélanger à d'autres produits ! • Contacter le service Miele/Steelco en cas de changement de produit. • Le traitement doit se conformer à toutes les ordonnances conformément aux réglementations relatives aux dispositifs médicaux et doit être réalisé selon des processus appropriés et validés. • Conformément aux directives nationales et/ou à la norme EN ISO 15883, une qualification de performance est nécessaire. • Suivre les recommandations sur le retraitement publiées par les fabricants d'instruments au regard des dispositions de la norme ISO 17664. • Les instructions d'utilisation des laveurs-désinfecteurs Miele/Steelco doivent être respectées. • En cas d'utilisation d'autres laveurs-désinfecteurs que ceux fournis par Miele/Steelco, veuillez vous référer au fabricant du laveur-désinfecteur et à ses instructions d'utilisation.

ProCare

Med 30 C

Agent neutralisant à base d'acide organique

Données techniques

Densité (concentré) : 1.2 g/mL

Valeur pH (1 % de solution dans de l'eau déminéralisée) : environ 2.6

Apparence (concentré) : transparent, incolore

Ingrédients

Acide organique

Transport et stockage

Entreposer le produit entre 5 et 25 °C.

Informations relatives à l'élimination et au recyclage

Les conteneurs, les bouchons à vis et les étiquettes sont fabriqués en polyéthylène recyclable. Pour l'élimination de conteneurs usagés, y compris ceux contenant du produit résiduel et une solution de traitement, les réglementations locales en matière de déchets et d'eaux usées doivent être respectées.

Pour l'élimination du produit non usagé, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Consignes de sécurité

Pour obtenir des informations concernant la sécurité au travail, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Marquage CE

ProCare Med 30 C satisfait aux exigences relatives aux dispositifs médicaux conformément à la réglementation sur les dispositifs médicaux (EU) 2017/745.

Disponibilité

Veuillez contacter votre représentant local pour en savoir plus sur les dimensions actuelles du conteneur.

Coordonnées**Allemagne**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 LE BLANC-MESNIL
Tel. +33 1 4939-4444
Fax +33 1 4939-4438
advpro@miele.fr
savpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Suisse

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Italie

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Luxembourg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 LUXEMBOURG
Tel. +352 49711-25
Fax +352 49711-39
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional
www.miele.lu/fr/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
Tel. +32 2 4511-540
Fax +32 2 4511-414
professional@miele.be
www.miele.be/fr/professional
www.miele.be/nl/professional

Fabricant**Suisse**

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch