



Til injektorvognens vandforsyning skal den nederste spulearm i rengørings- og desinfektionsmaskinen udskiftes med en speciel adapter. Fremgangsmåde:

- Fingermøtrikken ① i midten af spulearmen løsnes.
- Spulearmen ② tages af.
- Omløbermøtrik med spulearmsakse ③ skrues af tilløbsrøret ④.

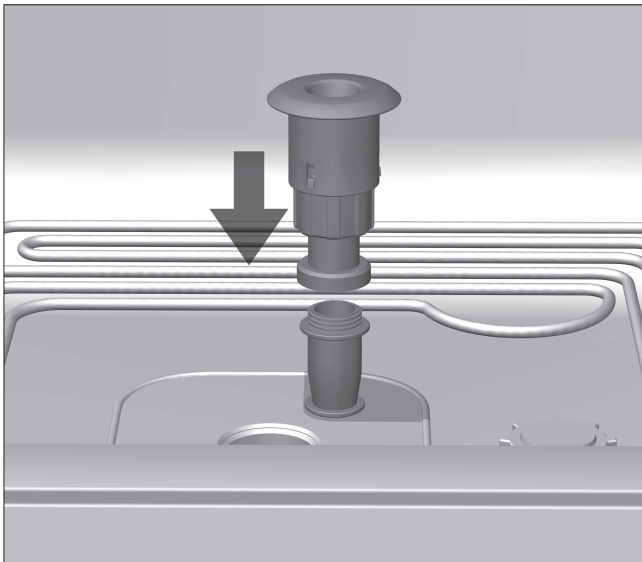


- Adapter skrues på tilløbsrøret.

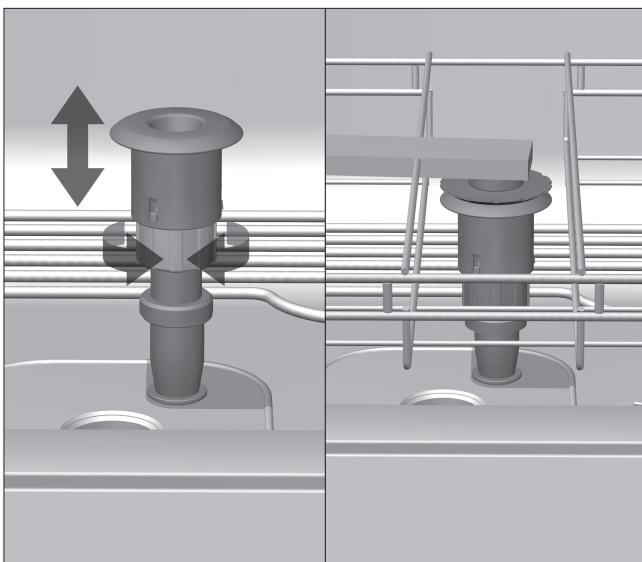


Den affjedrede adapter skal koble korrekt til vandtilførslen på den indskubbede injektorvogn. For at kunne dette skal den være indstillet 4-5 mm højere end vandtilførslen på injektorvognen.

Hvis adapterens højde skal tilpasses:


- Øverste del af adapteren løsnes.
- Adapteren trykkes opad eller nedad for at indstille højden.
- Øverste del af adapteren strammes.

 Kontroller regelmæssigt, at adapteren er justeret korrekt!

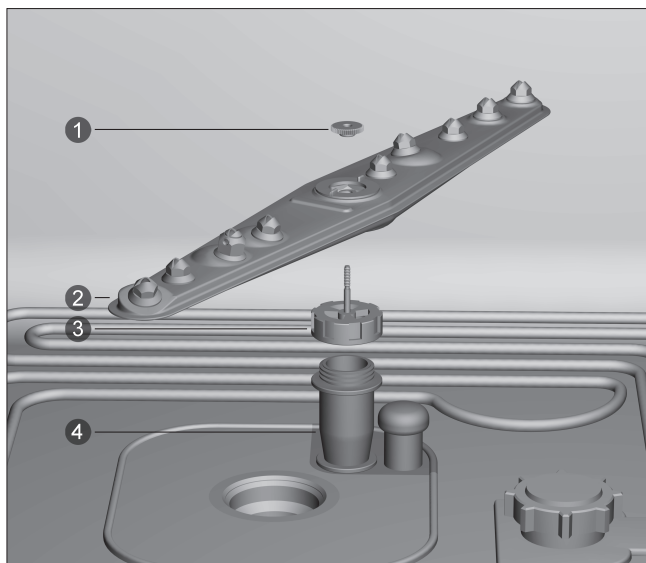


For injektorvognens vannforsyning må den nedre spylearmen i rengjørings- og desinfeksjonsautomaten skiftes ut med en spesiell adapter. Gå frem slik:

- Løsne fingermutteren ① i midten av spylearmen.
- Ta av spylearmen ②.
- Skru koblingsmutteren med spylearmakselen ③ av tilløpsrøret ④.

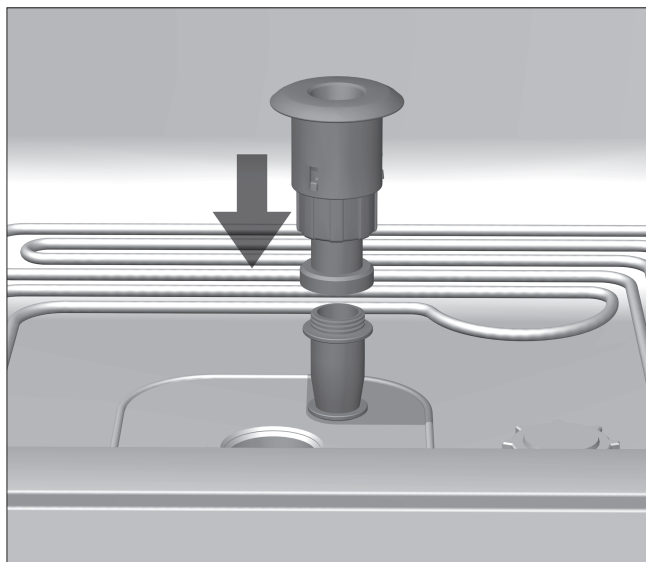

- Skru adapteren på tilløpsrøret.

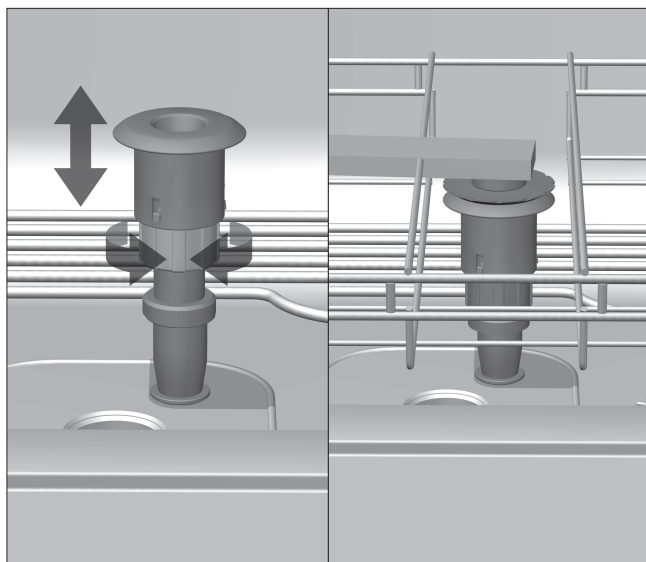

Fjæradapteren må kobles riktig på vanntilførselen til injektorvognen som er skjøvet inn. Den må være innstilt 4 til 5 mm høyere enn injektorvognens vanntilførsel.

For å tilpasse høyden på adapteren:

- Løsne adapterens øvre del.
- Skyv adapteren oppover eller nedover for å innstille høyden.
- Skru fast adapterens øvre del.

**⚠** Korrekt justering av adapteren må regelmessig kontrolleres i rutinen!