

Wagen E 900-6 voor OK-instrumentarium



 Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- en desinfectieautomaten G 7827/G 7828 of PG 8527/PG 8528. Behandel alleen instrumenten/medische producten die volgens de fabrikant van die producten geschikt zijn voor machinale behandeling. Houdt u zich aan de specifieke behandelingsvoorschriften van de fabrikant. Het te gebruiken programma, met bij voorkeur thermische desinfectie, moet indien nodig op het materiaal van de medische producten worden afgestemd. Gebruik voor het laatste spoelen bij voorkeur gedemineraliseerd water. Bij gebruik van de automatische wagenherkenning moet de codering worden aangepast!

Geleverd:

Basiswagen E 900-6 met zes niveaus, met 2 uitneembare niveaus, H 553, B 636, D 790 mm, met magneetstrip voor de automatische wagenherkenning en met sproeiarmmagneten voor de sproeiarmbewaking (alleen PG 8527/PG 8528).

Bij te bestellen accessoires

- E 142, DIN-zeefschaal
- E 473/1, inzet voor kleine voorwerpen
- E 476, houders voor instrumenten Ø 4 - 8 mm
- E 479, houders voor instrumenten Ø tot 4 mm
- E 492, inzet voor nierschalen
- E 518, slangaansluiting

Toepassing:

In de wagen E 900-6 kunt u 18 DIN-zeefschalen met OK-instrumenten behandelen. Daarnaast beschikt de wagen op 4 niveaus over telkens 4 aansluitingen voor holle instrumenten.

Beladingsafmetingen* [H x B x D in mm]	E 900-6	Zonder niveau 2	Zonder niveau 2 en niveau 4
Niveau 1	71 x 555 x 780	162 x 555 x 780	162 x 555 x 780
Niveau 2	71 x 565 x 780	–	–
Niveau 3	71 x 555 x 780	71 x 555 x 780	162 x 555 x 780
Niveau 4	71 x 565 x 780	71 x 565 x 780	–
Niveau 5	71 x 580 x 780	71 x 580 x 780	71 x 580 x 780
Niveau 6	71 x 595 x 780	71 x 595 x 780	71 x 595 x 780

* nummering niveaus van onderen

Controleer bij het beladen/voor elke programmastart:

- of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
- of de openingen van de inspueters van de sproeiarmen schoon en niet verstopt zijn.
- of de uitneembare niveaus vergrendeld zijn.
- of de ingeschoven wagen goed op de watertoevoer van de reinigings- en desinfectieautomaat is aangesloten.

Houdt u zich aan de beladingsvoorschriften die in het kader van de validatie zijn vastgelegd.

Om te kunnen waarborgen dat alle spoelsystemen over voldoende (gestandaardiseerde) spoeldruk beschikken, moet u op alle schroef-aansluitingen inspueters, adapters, spoelhulzen of blindschroeven plaatsen. Gebruik geen beschadigde spoelsystemen zoals inspueters, adapters en spoelhulzen.

Spoelsystemen die u niet voor spoelgoed gebruikt, hoeft u niet door blindschroeven te vervangen.



E 900-6



E 900-6 zonder 2e en 4e niveau


Uitneembare niveaus



Het tweede en vierde niveau van de wagen zijn uitneembaar. Hierdoor kan de beladingshoogte van de niveaus 1 en 3 worden vergroot.

Niveau verwijderen


- Til het niveau iets op en trek het eruit.

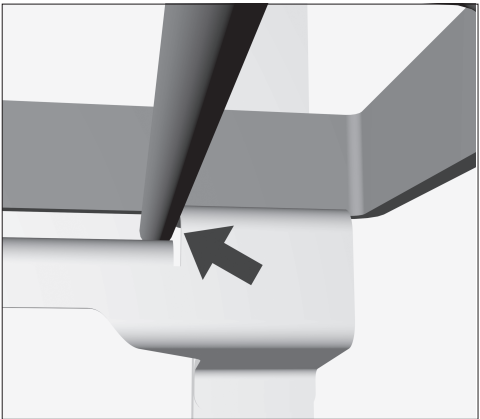


Niveau terugplaatsen

- Plaats het niveau op de geleiderails van de wagen en schuif het niveau naar binnen.
- De spijlen aan de onderkant van het niveau vallen aan beide kanten achter een lipje bij de geleiderails van de wagen.
- Het niveau moet duidelijk vastklikken, alleen dan is het correct gepositioneerd.
- Controleer of het niveau in de geleiderails vergrendeld is.


Wagen E 900-6 voor OK-instrumentarium

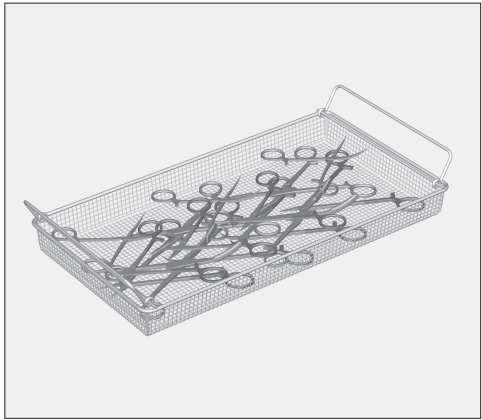

- Scharnierende instrumenten moeten geopend in de zeefschalen worden geplaatst, zodat het afgedekte vlak zo klein mogelijk is.

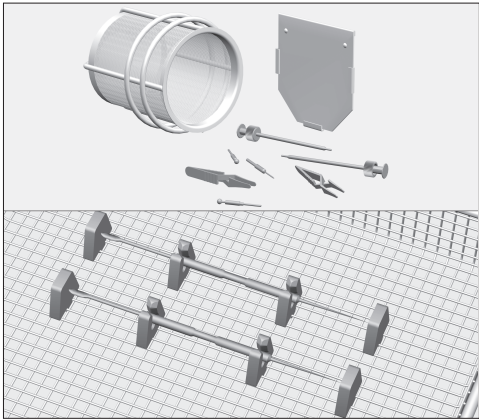




- Lichte instrumenten, zoals bulldog-klemmen en kleine voorwerpen die gemakkelijk kunnen worden weggespoeld, kunt u in afsluitbare inzetten plaatsen (o.a. E 473) of met siliconen houders vastzetten (o.a. E 476).

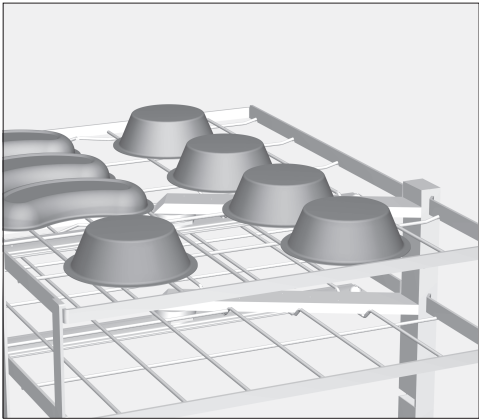

- Reservoirs (zoals bakken, bekers en nierschalen) moeten met de opening naar beneden in de wagen worden geplaatst. De reiniging van de instrumenten mag niet worden belemmerd. Voorkom dat de reservoirs kunnen kantelen.

Als holle voorwerpen met de opening naar boven worden ingeruimd, kan spoelwater in de voorwerpen achterblijven. Dit kan van invloed zijn op het naspoelresultaat.

Slangaansluitingen E 518 (niet bijgeleverd)

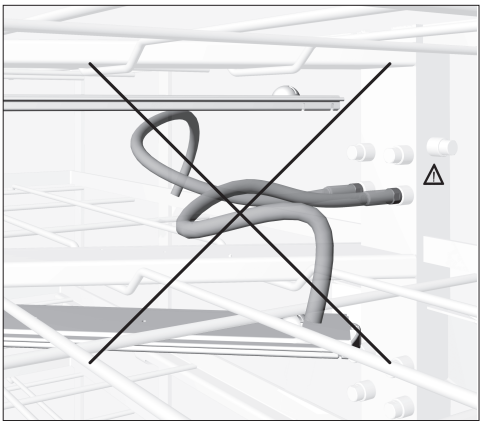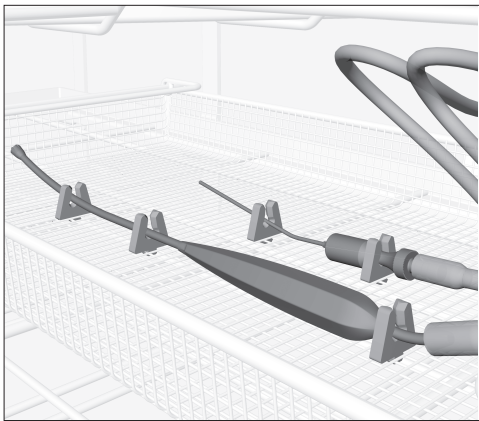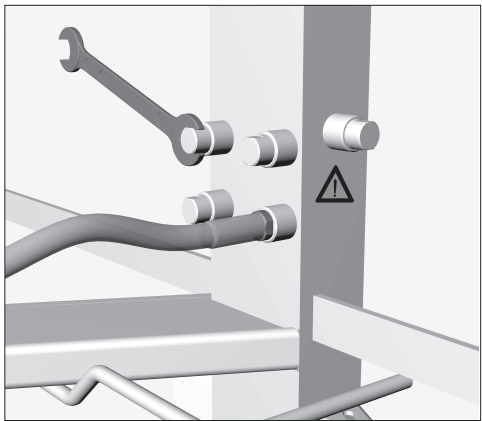

Slangaansluitingen plaatsen

Indien gewenst kunt u slangaansluitingen E 518 op de watertoevoer van de wagen monteren. Holle instrumenten, zoals chirurgische zuiginstrumenten, kunt u daarop aansluiten en in een zeefschaal op het niveau van de wagen leggen.

Ga als volgt te werk:

- Verwijder de blindschroeven met een sleutel 9 van de aansluitpunten.
- Schroef de slangaansluitingen in de aansluitingen en zet deze met een sleutel vast.

⚠ Op de slangaansluitingen mogen geen vertakkingen of verlengstukken worden aangesloten. De waterdruk neemt anders te veel af.

Holle instrumenten aansluiten

⚠ Vóór het aansluiten van de holle instrumenten moet zijn gewaarborgd dat de lumina/de kanalen goed doorgespoeld kunnen worden.

- Fixeer de holle instrumenten met houders E 476 of E 479 in een zeefschaal.
- Plaats de zeefschaal op een niveau van de wagen en verbind de holle instrumenten met een slang-aansluiting.
- Haal de instrumenten na de behandeling van de slang-aansluitingen los.

⚠ Holle instrumenten die tijdens de behandeling zijn losgeraakt, moeten opnieuw worden behandeld.

⚠ Niet gebruikte slangaansluitingen moeten door blindschroeven E 362 worden vervangen.

De losse uiteinden van de slang-aansluitingen worden anders door de waterdruk heen en weer geslingerd. Daardoor kunnen de sproeiarmen van de wagen geblokkeerd raken.

Meetingang voor spoeldrukmetingen

⚠ In het kader van prestatiebeoordelingen en validaties volgens DIN EN ISO 15883 kan met deze ingang de spoeldruk worden gemeten.

- Bij spoeldrukmetingen moet u de sluitschroef door een Luer-Lock-adapter (bijvoorbeeld E 447) vervangen.

⚠ Op de meetingang mogen nooit instrumenten, inspuitbuizen, etc. worden aangesloten!