

Chariots pour instruments OP E 900-4/1 et E 900-5/1

Miele
PROFESSIONAL

Pièces fournies :

Chariot de base E 900-4/1 à quatre niveaux, H 553, L 636, P 790 mm, avec une barrette d'aimants pour l'identification automatique de chariots et des aimants de bras de lavage pour le contrôle des bras de lavage (uniquement pour PG 8527/8528).

Chariot de base E 900-5/1 à cinq niveaux, H 600, L 636, P 790 mm, avec une barrette d'aimants pour l'identification automatique de chariots et des aimants de bras de lavage pour le contrôle des bras de lavage (uniquement pour PG 8527/8528).

Accessoires en option

- Complément à mailles DIN E 142
- Filet de protection A2 1/2, 216 x 456 mm

⚠ Veuillez impérativement respecter les prescriptions de sécurité dans le mode d'emploi des laveurs-désinfecteurs G 7827/28 et PG 8527/28. Ne traitez que des compléments / produits médicaux qui ont été déclarés adaptés à un traitement en machine par leur fabricant et respectez les indications de ce dernier. Le programme de traitement en machine utilisé avec, de préférence, une désinfection thermique doit le cas échéant être adapté à la qualité des matériaux des produits médicaux. Le dernier rinçage doit dans la mesure du possible toujours être effectué avec de l'eau déminéralisée.


En cas d'utilisation de l'identification automatique des chariots, le codage doit être adapté !




E 900-4/1




E 900-5/1

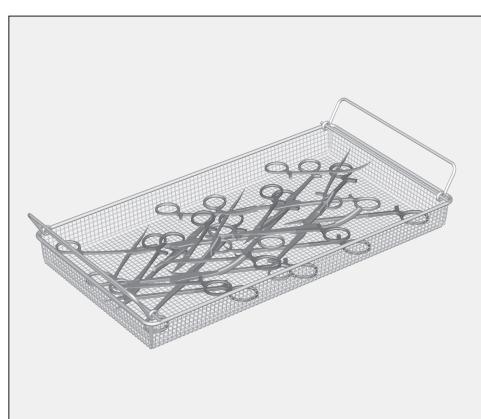

■ Les instruments à articulations doivent être déposés dépliés dans les compléments à mailles.

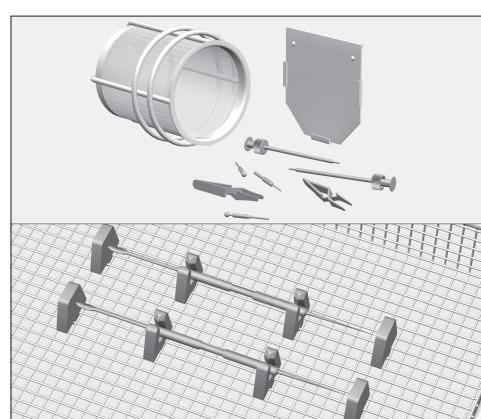

■ Les instruments légers tels que certaines pinces ou les petits éléments pouvant être facilement renversés par le bain, doivent être maintenus par les logements en silicone comme le E 473 ou les compléments pouvant être fermés comme le E 476.

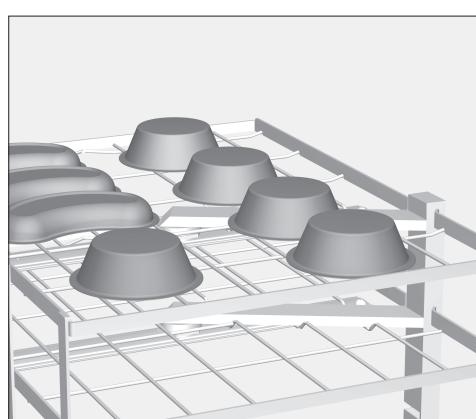

■ Les récipients comme les boîtes, les bechers, les haricots doivent être rangés avec l'ouverture vers le bas de façon à ne pas gêner et à ne pas être renversés.

Si des récipients creux sont rangés avec l'ouverture vers le haut, l'eau risque d'être prise au piège et les résultats de lavage risquent d'être altérés.

Carrello per strumentario OP E 900-4/1 ed E 900-5/1

Miele
PROFESSIONAL

Dotazione:

Carrello base E 900-4/1 con quattro livelli, H 553, L 636, P 790 mm, dotato di listello magnetico per il riconoscimento automatico del carrello e di magneti nel braccio irroratore per il controllo del braccio irroratore stesso (solo PG 8527/28).

Carrello base E 900-5/1 con cinque livelli, H 600, L 636, P 790 mm, dotato di listello magnetico per il riconoscimento automatico del carrello e di magneti nel braccio irroratore per il controllo del braccio irroratore stesso (solo PG 8527/28)

Accessori su richiesta

- Bacinella DIN E 142
- Rete di copertura A2 1/2, 216 x 456 mm

⚠ Rispettare scrupolosamente le indicazioni sulla sicurezza e le avvertenze riportate nelle istruzioni d'uso dei termodisinfettori G 7827/28 e PG 8527/28. Trattare esclusivamente strumenti/utensili che siano stati esplicitamente dichiarati riutilizzabili e trattabili in macchina dal relativo produttore e attenersi alle indicazioni da questo fornito. Il programma utilizzato, con disinfezione preferibilmente termica, deve essere adeguato alla qualità dei materiali di cui sono composti gli strumenti. L'ultimo risciacquo avviene possibilmente sempre con acqua demineralizzata. Se si usa il sistema di rilevamento automatico del carrello, adeguare la codifica.

Applicazioni:

Nel carrello E 900-4/1 possono essere lavate e disinfectate 12 bacinelle DIN o 8 bacinelle ISO con strumenti OP.


Nel carrello E 900-5/1 possono essere lavate e disinfectate 15 bacinelle DIN o 10 bacinelle ISO con strumenti OP.

Altezza di carico (Numerazione ripiani dal basso)	E 900-4/1 [H x L x P in mm]	E 900-5/1 [H x L x P in mm]
Livello 1	112,5 x 593 x 780	80 x 593 x 780
Livello 2	112,5 x 593 x 780	80 x 593 x 780
Livello 3	112,5 x 593 x 780	80 x 593 x 780
Livello 4	114 x 593 x 780	80 x 593 x 780
Livello 5	-	73 x 593 x 780


Controllare sempre durante la sistemazione / prima dell'avvio:

- che i bracci irroratori possano ruotare senza impedimenti,
- che gli ugelli dei bracci irroratori non siano intasati,
- che i carrelli siano correttamente accoppiati agli afflussi acqua del termodisinfettore.


Per le convalide, attenersi sempre ai modelli di carico.

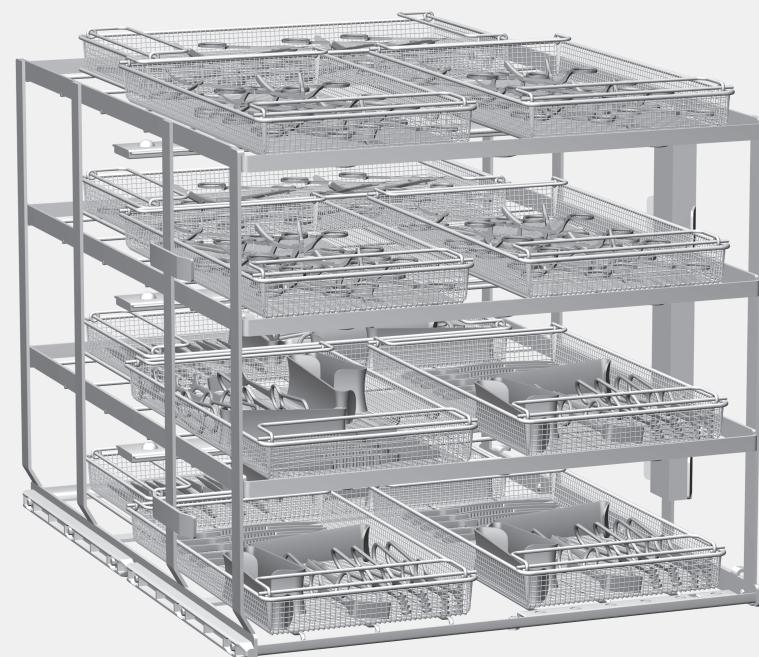


E 900-4/1

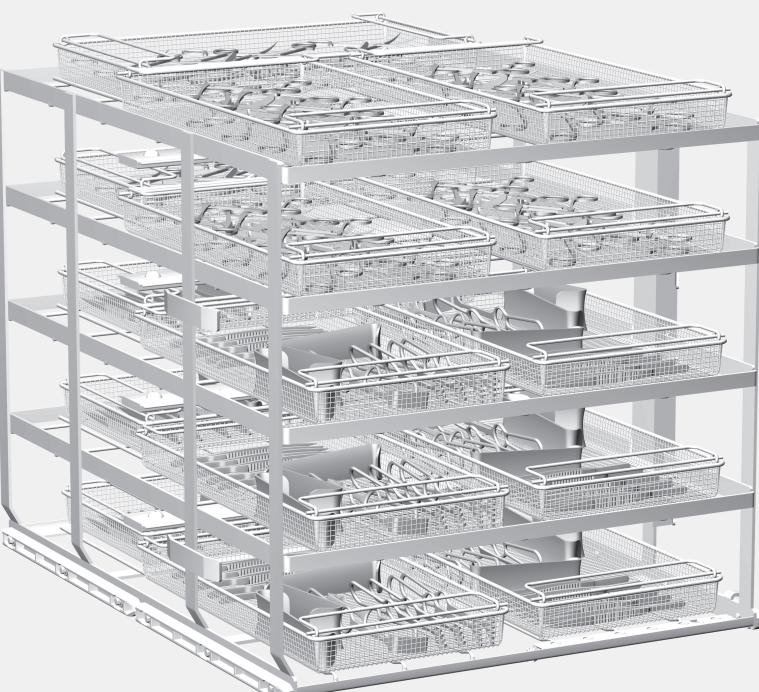


E 900-5/1

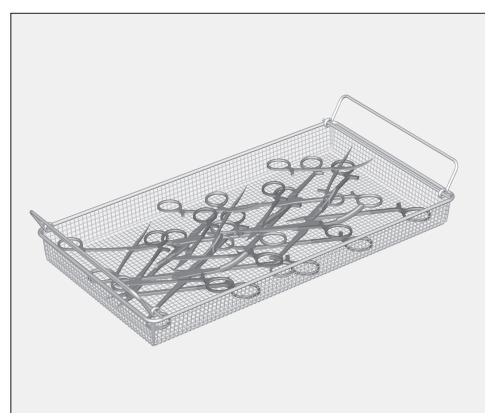

- Strumenti con snodi devono essere disposti aperti nelle bacinelle (per ridurre al minimo le superfici che si coprono).

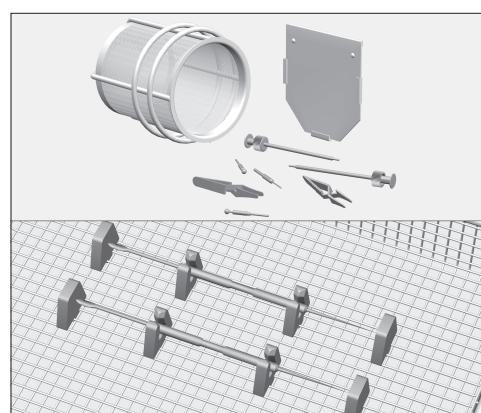

- Strumenti leggeri come le pinze bulldog o minuteria che può essere ribaltata dai getti d'acqua devono essere sistemati in inserti che possono essere chiusi, come E 473 o bloccati nelle sedi in silicone E 476.

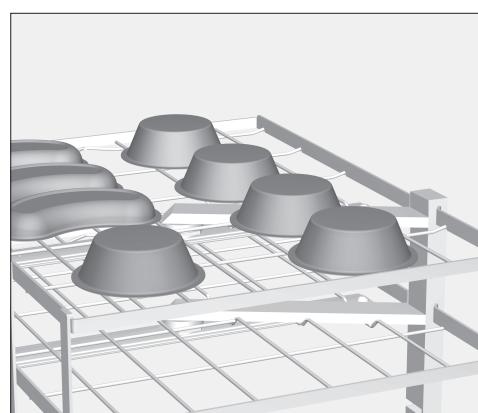

- I contenitori, ad es. barattoli, bicchieri, bacinelle reniformi devono essere disposti nel carrello con l'apertura rivolta verso il basso e in modo tale da non impedire il lavaggio degli strumenti e da non essere ribaltate dai getti d'acqua.

Se i contenitori vengono sistemati con l'apertura verso l'alto si raccoglie l'acqua di lavaggio e il risultato del risciacquo può essere pregiudicato.