

Campo de aplicación

En el complemento E 908/1 pueden esterilizarse accesorios de trabajo, con una longitud máx. de 420 mm, de instrumentos MIC de vástago.

El complemento E 908/1 se cuelga en el complemento de módulo para instrumentos MIC, p. ej., el E 906/1. Con los complementos de módulo se adjuntan las instrucciones de manejo por separado.

⚠ Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad de las instrucciones de manejo de la termodesinfectora. Para el tratamiento utilice exclusivamente instrumental/productos médicos que hayan sido declarados por el fabricante como aptos y tenga en cuenta las indicaciones específicas para el tratamiento. El programa de tratamiento utilizado, preferiblemente con desinfección térmica, deberá ajustarse a la calidad del material de los productos médicos.


Para la esterilización, los instrumentos MIC deben desmontarse cuanto se pueda. Los vástagos de los instrumentos se colocan en los manguitos de lavado y los mangos en los correspondientes difusores del complemento de módulo.

Correcta colocación de los accesorios de trabajo

Los accesorios de trabajo deben fijarse entre tres y cuatro puntos en los puentes del E 908/1. Para ello, la posición de los puentes puede ajustarse a la longitud de los accesorios de trabajo.

- Coloque ordenadamente los accesorios de trabajo en los puentes.
- Primero fije y abra aquí el extremo funcional.
- A continuación, fije los accesorios de trabajo en los otros puentes.

Los aparatos ópticos de un diámetro de hasta 5 mm, p. ej., del campo de la urología, también pueden esterilizarse en este complemento. A fin de asegurar una correcta sujeción, éstos deben disponerse en cuatro puentes.

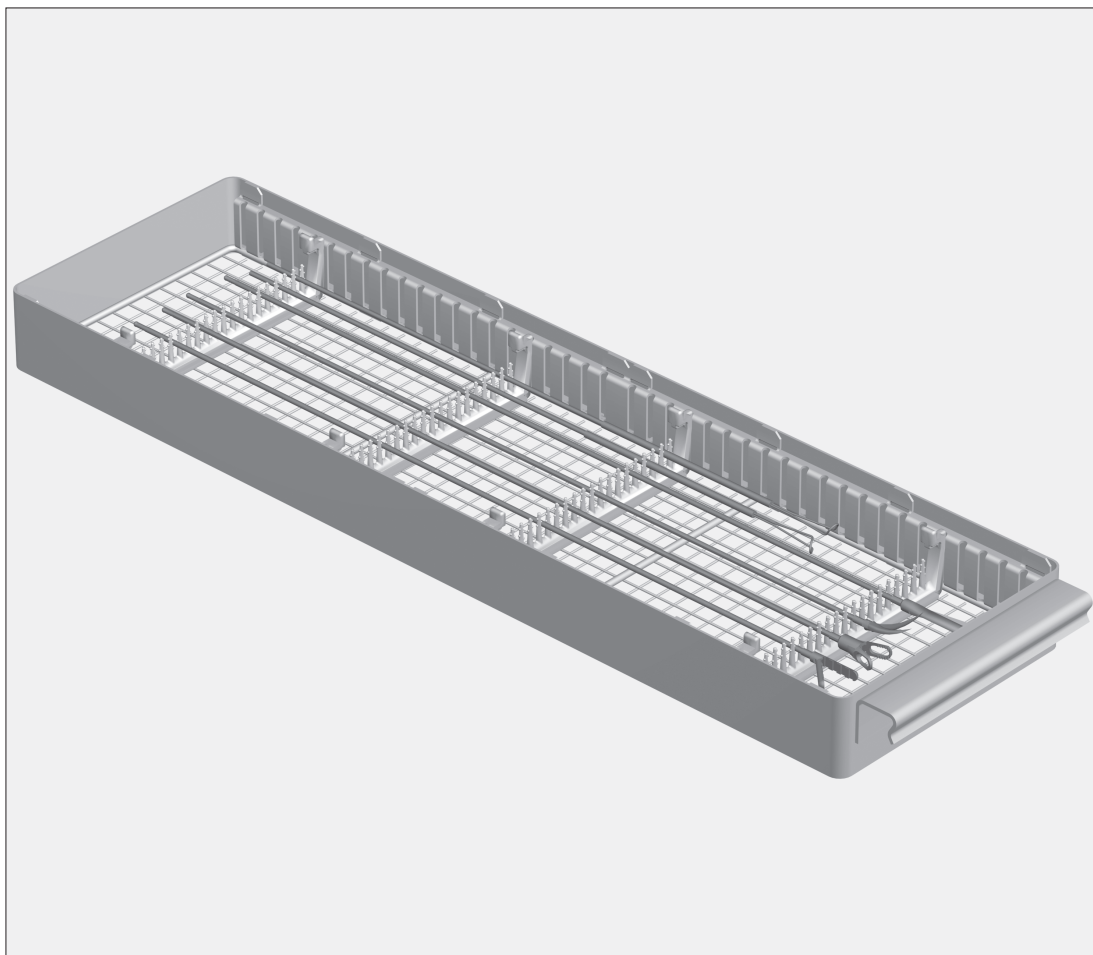

Áreas de aplicação

No complementos E 908/1 podem ser colocados instrumentos MIC com haste até 420 mm de comprimento. O complemento E 908/1 é pendurado no complemento modular para instrumentos MIC, por ex. E 906/1. Juntamente com o complemento modular é fornecido o livro de instruções.

⚠ Leia atentamente as medidas de segurança e precauções mencionadas no livro de instruções da máquina de lavar e desinfetar. Lave e desinfete somente instrumentos/produtos considerados dispositivos médicos que tenham a indicação do fabricante de que podem ser lavados na máquina e siga as indicações específicas. O programa de lavagem utilizado, de preferência com desinfecção térmica, deve ser adequado à qualidade do material dos produtos médicos.

Para a lavagem deve desmontar o mais possível os instrumentos MIC. As hastes dos instrumentos são encaixadas nos fixadores e as peças de mão nos injectores correspondentes do complemento modular.

Colocar os instrumentos

Os instrumentos devem ser fixos em três ou quatro pontos no E 908/1. Pode adaptar o posicionamento dos fixadores ao comprimento dos instrumentos.

- Colocar os instrumentos nos fixadores.
- Para isso fixe primeiro a ponta funcional e abra-a.
- Depois fixe o instrumento a outros fixadores.

Ópticas com um diâmetro até 5 mm, por ex. utilizadas em urologia, também podem ser lavadas neste complemento. Para que fiquem com estabilidade, devem ser colocadas em quatro pontos de fixação.