

Anvendelsesområde

Indsats E 908/1 kan anvendes til rengøring af arbejdende dele op til maks. 420 mm længde fra MIC-skaftinstrumenter. Indsats E 908/1 anbringes i modulindsatser til MIC-instrumenter, f.eks. E 906/1. En separat brugsanvisning følger med modulindsatserne.

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinen skal overholdes. Der må kun rengøres instrumenter/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret egnet til maskinrengøring, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet.


MIC-instrumenter skal så vidt muligt skilles ad, når de skal rengøres. Instrumenternes skafter anbringes i hylstre, og grebene anbringes på de tilsvarende dyser i modulindsatsen.

De arbejdende dele placeres

De arbejdende dele skal fastgøres 3 til 4 steder på holderne i E 908/1. Stivernes position kan tilpasses til længden på de arbejdende dele.

- Placer de arbejdende dele i stiverne.
- Klem først den arbejdende del ind, og åbn den.
- Fastgør derefter den arbejdende del i den anden holder.

OP-instrumenter med diameter op til 5 mm, f.eks. fra urologiområdet, skal ligeledes rengøres i denne indsats. For at sikre at de sidder korrekt fast, skal de anbringes i fire holdere.

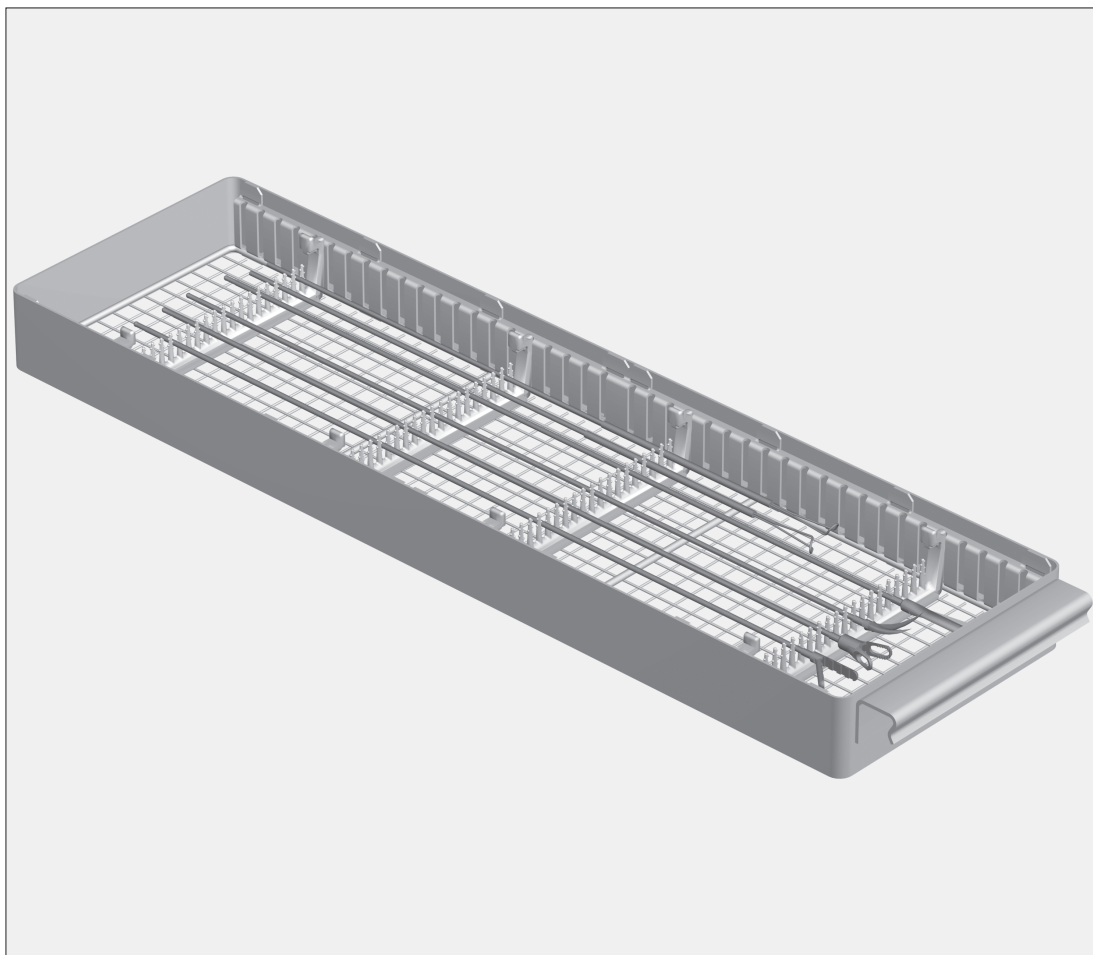

Anvendelsesområde

I innsats E 908/1 kan det klargjøres arbeidsinnlegg (hovedinstrumenter) til MIS-instrumenter med skaft. Maks. lengden til arbeidsinnleggene kan være inntil 420 mm.

Innsatsen E 908/1 henges inn i modulinnsetter for MIS-instrumenter, f.eks. E 906/1. En separat bruksanvisning er vedlagt modulinnsetsen.

⚠ Kapitlet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for rengjørings- og desinfeksjonsautomaten må absolutt følges. Klargjør bare instrumenter/medisinprodukter, som av produsenten er deklart som mulig å klargjøre for gjenbruk maskinelt og følg produsentens anvisninger for klargjøring. Klargjøringsprogrammet hvor termisk desinfeksjon foretrekkes, må eventuelt avstemmes til materialkvaliteten på medisinproduktene.

MIS-instrumentene må demonteres i størst mulig grad iht. produsentens anvisninger før klargjøring. Skaftene til instrumentene settes i spylehylsene, håndtakene settes på tilsvarende dyser i modulinnsetsen.

Plassering av arbeidsinnlegg (hovedinstrumenter)

Arbeidsinnleggene bør festes i tre til fire punkter i holderne til E 908/1. Posisjonen til holderne kan tilpasses lengden på arbeidsinnleggene.

- Legg arbeidsinnleggene i holderne.
- Klem først inn funksjonsenden og åpne den.
- Fest deretter arbeidsinnleggene i de andre holderne.

Optiske instrumenter med en diameter på inntil 5 mm, f. eks. innen området urologi, kan også klargjøres i denne innsatsen. For å sikre at de sitter skikkelig, må de festes i alle fire holderne.