

⚠ Sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskine G 7827/28 eller PG 8527/28 skal overholdes. Der må kun rengøres instrumenter/medicinprodukter, der af producenten er erklæret som egnet til maskinopvask, og producentens specifikke rengøringsråd skal overholdes. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet. Det sidste skyl udføres så vidt muligt altid med totalt afsaltet vand.

Ved anvendelse af automatisk vognidentifikation skal kodningen være tilpasset!

Leverancen omfatter:

Modul-indsats E 905/1, H 40, B 461, D 510 mm, udstyret med:

- 16 tilslutninger til adaptere, hylstre og dyser
- 2 rækker til positionering af instrumenterne

Til indretning af indsatsen medfølger:

- 1 hylster E 336 til MIC-instrumenter, længde 121 mm, Ø 11 mm
- 2 blindskruer E 362
- 1 hylster E 442 til MIC-instrumenter, længde 121 mm, Ø 11 mm med kappe Ø 6 mm
- 2 luer-lock-adaptere ♀ til luer-lock ♂ E 447
- 4 slanger E 448 med skruegevind, silikoneslange længde 300 mm, Ø 5 mm og luer lock-adapter ♀
- 2 luer-lock-adaptere ♂ til luer-lock ♀ E 449
- 4 injektordyser E 452, 2,5 x 60 mm
- 3 injektordyser E 453, 4,0 x 110 mm med holdeklammer
- 3 injektordyser E 454 til trokarer 10 - 15 mm
- 1 adapter E 464 til injektordyse E 454
- 1 klemfjeder E 472 til injektordyse Ø 4 mm
- 1 trådkurv med låg til smådele E 907

Anvendelsesområde:

Modul-indsats E 905/1 kan anvendes i vognene E 474/4, E 574/1, E 774/1 og E 902/1. Der medfølger separate brugsanvisninger til vognene.

E 905/1 er beregnet til rengøring og desinfektion af korte MIC-instrumenter, f.eks. inden for artroskopisk og laparoskopisk kirurgi.

På tilslutningerne på øverste række kan der anbringes instrumenter op til maks. 190 mm længde, i den nederste op til maks. 220 mm længde.

Kontroller ved hver fyldning/inden hver programstart:

- Findes alle silikoneholderne på hylstrene, og er de ubeskadigede?

⚠ Manglende eller beskadigede silikoneholdere i modul-indsatsen skal erstattes med nye silikoneholdere. Først herefter må modul-indsatsen anvendes igen. Under disse betingelser standardiserer silikoneholderne selv skylletrykket.


Der må ikke anvendes beskadigede dyser, adaptere eller hylstre.

Overhold altid det påfyldningseksempel, der er fastlagt i valideringen.

⚠ Før rengøring skal alle MIC-instrumenter skilles ad efter producentens anvisninger. Snæverhalsede hulrumsinstrumenter, der ikke kan skilles ad, skal forrengøres efter producentens anvisninger.

⚠ Inden tilslutningen af hulrumsinstrumenter skal det sikres, at vandet kan trænge igennem lumen/kanaler. De enkelte instrumenter må ikke berøre hinanden under rengøringen og desinfektionen.

⚠ Hulrumsinstrumenter, som har løsnet sig fra adapterne under rengøringen, skal rengøres på ny.

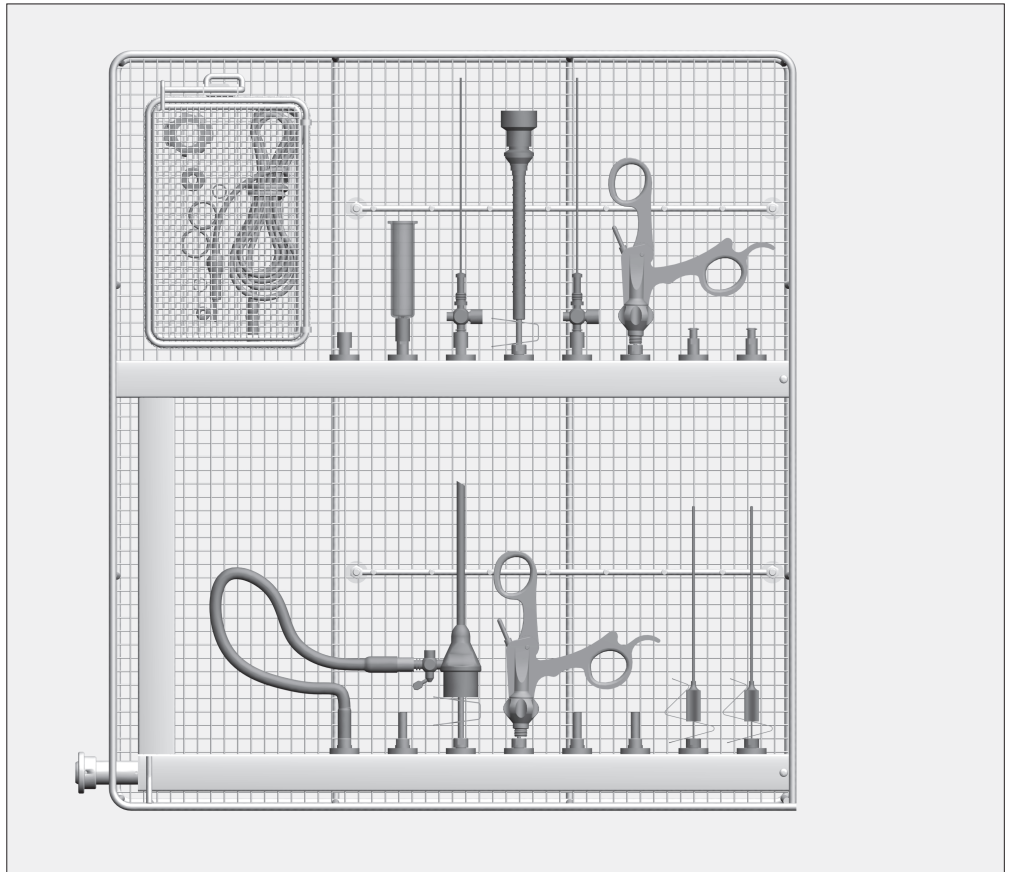


Hylstre

Hylstre E 442 er egnede til rengøring af instrumenter med lumen og instrumenter med Ø under 8 mm.

Diameteren på instrumenterne og åbningerne i hylstrene eller kapperne skal passe sammen.

- Anbring trokarer med Ø under 10 mm i hylstrene. Forbind tilslutningerne i siden med en slangeadapter E 448.
- Sæt trokarer med lumen i hylstrene.
- Forbind instrumenternes tilslutninger i siden med en slangeadapter E 448, og sæt slangeadapteren i en silikoneholder.

Modul-indsats E 905/1 til korte MIC-instrumenter

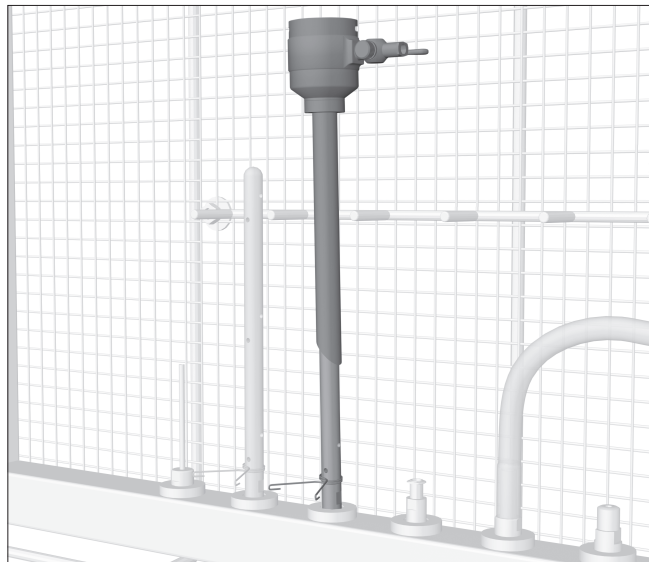


Trokarer Ø 10 - 20 mm


- Skil trokarerne ad.

Rengør smådelene i en trådkurv med låg.


- Sæt trokarerne med Ø 10 - 15 mm på en dyse E 454.
- Anvend dysekombination E 464 plus E 454 til trokarer med Ø 15 - 20 mm.
- Fastgør trokarerne med klemfjederen, så vandet kan nå kritiske områder gennem åbningerne i siden på dysen.

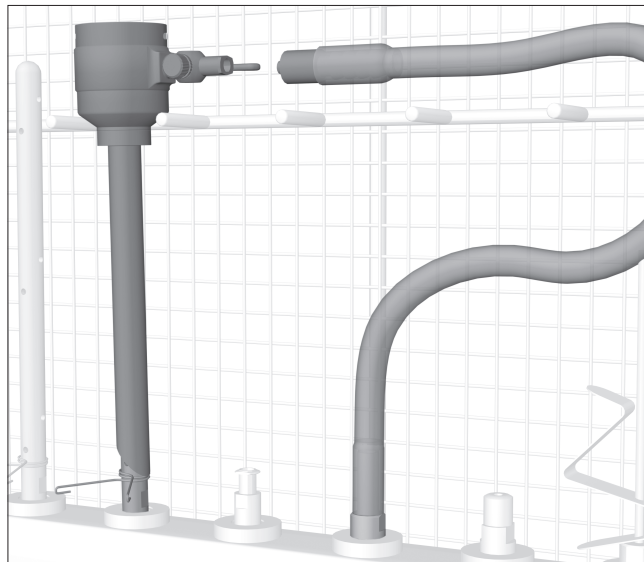

- Forbind trokarets tilslutning i siden med en slangeadapter E 448.
- Sæt slangeadapteren i en silikoneadapter.

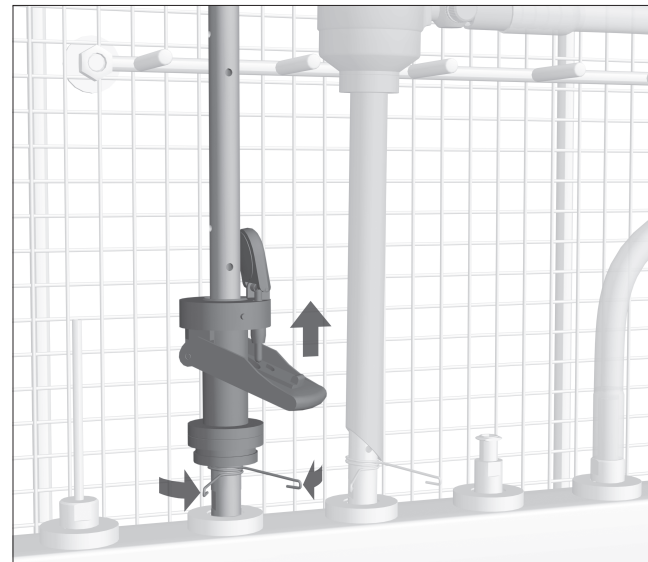


- Sæt vippeventilen på en injektordyse E 454 til trokarer eller E 453 med holdeklammer.
- Fastgør vippeventilen med klemfjeder eller holdeklamme, så vandet kan nå kritiske områder gennem åbningerne i siden på dysen.

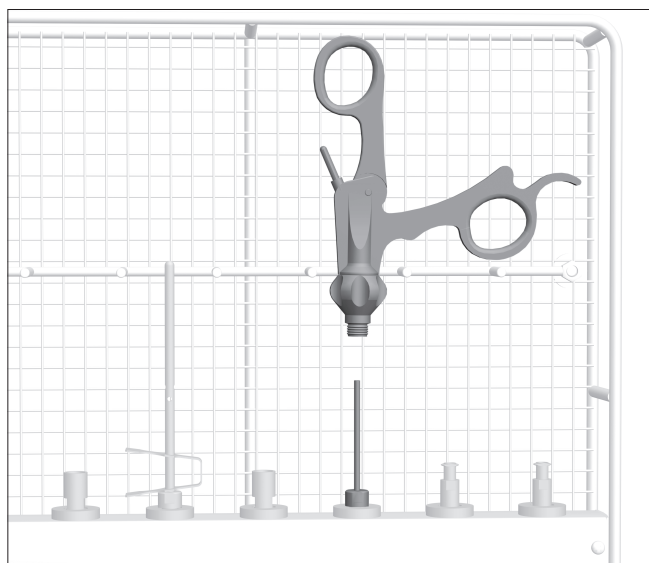


Greb

- Anbring kontaminerede greb på en dyse, f.eks. E 452.

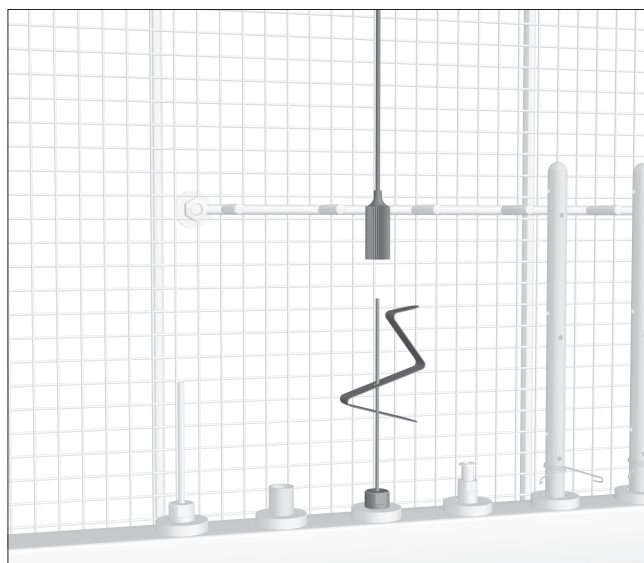


Veres-kanyler

- Skil Veres-kanylerne ad.
- Sæt den yderste del af Veres-kanylen på en dyse E 453 med klemfjeder E 472.

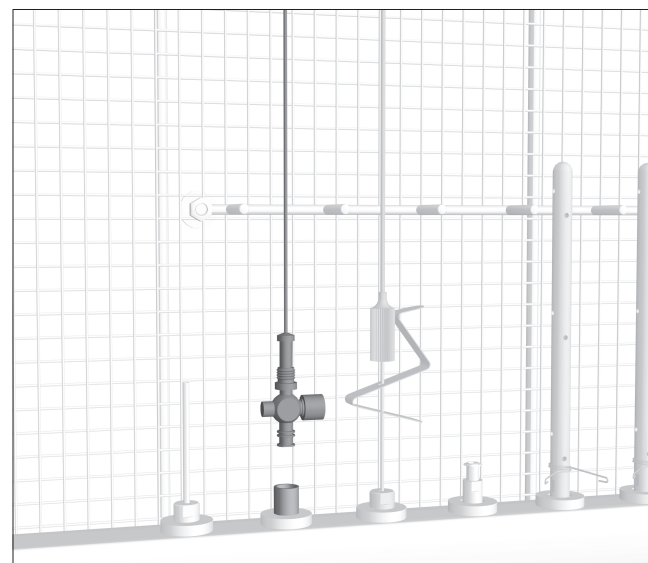

- Skru den inderste del af Veres-kanylen i en luer-lock-adapter ♂. Hanen skal være åbnet.

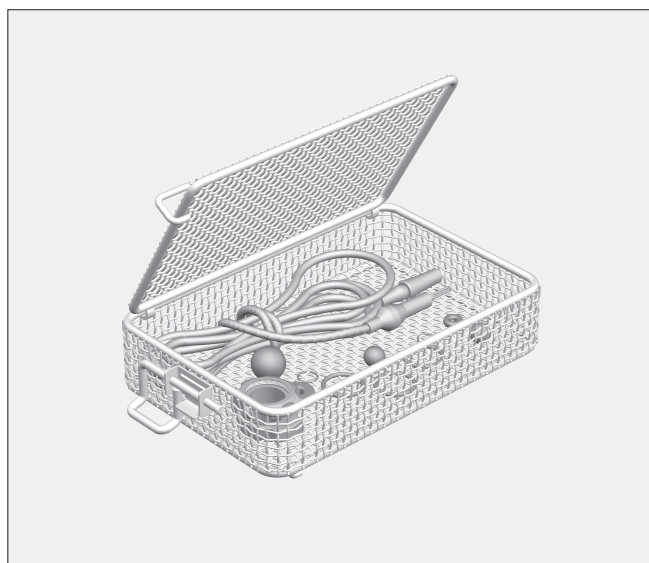

Smådele

- Anbring smådele, f.eks. pakninger, holdere o.a. i en trådkurv E 907/1 med låg.
- Anbring den lukkede trådkurv i modulindsatsen.