

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinerne G 7827/28 eller PG 8527/28 skal overholdes. Der må kun rengøres instrumenter/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret egnet til maskinopvask, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet. Det sidste skyl bør altid så vidt muligt foretages med totalt afsaltet vand.
Ved anvendelse af den automatiske vognidentifikation skal kodningen være tilpasset!

Leverancen omfatter:

Modul-indsats E 906/1, H 40, B 461, D 510 mm, udstyret med:

- 10 tilslutninger til adaptere, hylstre og dyser
- 1 holder til positionering af instrumenterne

Til indretning af indsatsen medfølger:

- 1 hylster E 336 til MIC-instrumenter, længde 121 mm, Ø 11 mm
- 2 blindskruer E 362
- 5 hylstre E 442 til MIC-instrumenter, længde 121 mm, Ø 11 mm med kappe Ø 6 mm
- 3 hylstre E 443 til MIC-instrumenter, længde 121 mm, Ø 11 mm med kappe Ø 10 mm
- 2 slanger E 448 med skruegevind, silikoneslange længde 300 mm, Ø 5 mm og luer lock-adapter ♀
- 1 injektordyse E 454 til trokarer 10 - 15 mm
- 2 åbningsfjedre E 456 til MIC-instrumenter
- 1 adapter E 464 til injektordyse E 454
- 1 trådkurv E 908 til arbejdende dele. En separat brugsanvisning er vedlagt trådkurven.

Anvendelsesområde:

Modul-indsats E 906/1 kan anvendes i vognene E 474/4, E 574/1, E 774/1 og E 902/1. Der medfølger separate brugsanvisninger til vognene.

Den er beregnet til rengøring og desinfektion af lange MIC-instrumenter op til maks. 440 mm længde, f.eks. inden for artroskopi eller laparoskopi.

Kontroller ved hver fyldning/inden hver programstart:

- Findes alle silikoneholderne på hylstrene, og er de ubeskadigede?

⚠ Manglende eller beskadigede silikoneholdere i modul-indsatsen skal erstattes med nye silikoneholdere. Først herefter må modul-indsatsen anvendes igen. Under disse betingelser standardiserer silikoneholderne selv skylletrykket.


Der må ikke anvendes beskadigede dyser, adaptere eller hylstre.

Overhold altid det påfyldningseksempel, der er fastlagt i valideringen.

⚠ Før rengøring skal alle MIC-instrumenter skilles ad efter producentens anvisninger. Snæverhalsede hulrumsinstrumenter, der ikke kan skilles ad, skal forrengøres efter producentens anvisninger.

⚠ Inden tilslutningen af hulrumsinstrumenter skal det sikres, at vandet kan trænge igennem lumener/kanaler. De enkelte instrumenter må ikke berøre hinanden under rengøringen og desinfektionen.

⚠ Hulrumsinstrumenter, som har løsnet sig fra adapterne under rengøringen, skal rengøres på ny.

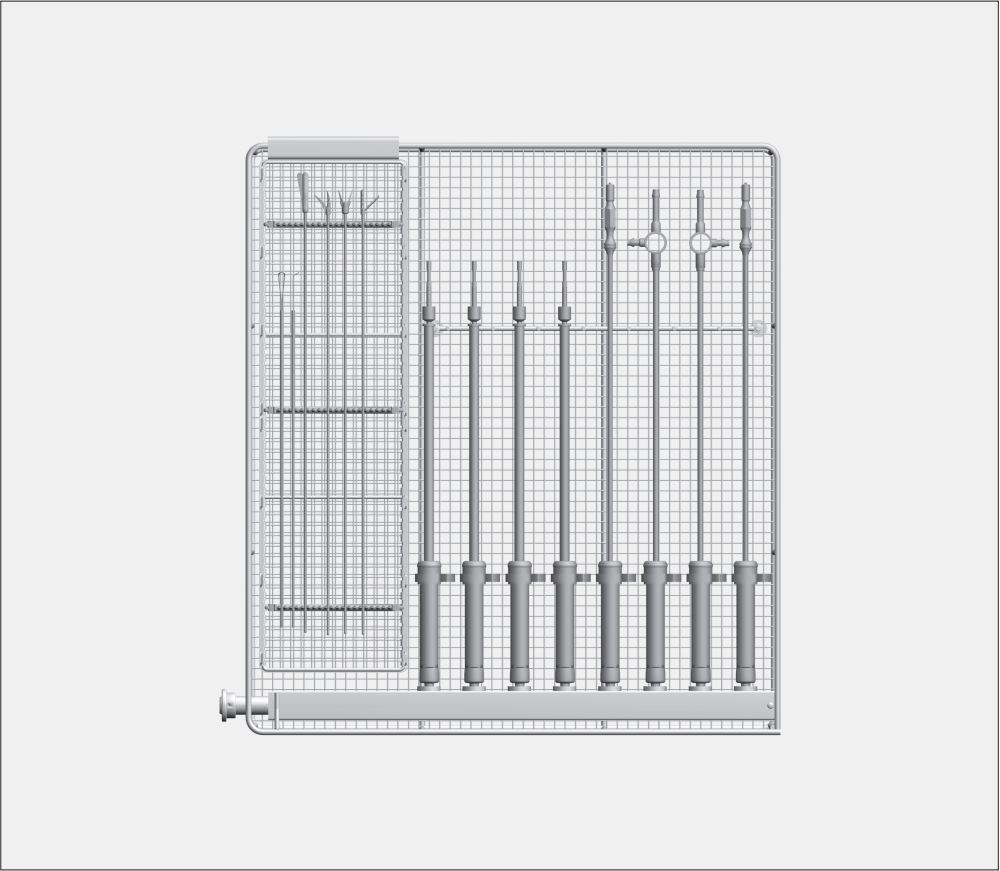


Hylstre

Hylstre E 442 og E 443 er egnede til rengøring af instrumenter med lumen og instrumenter med Ø under 15 mm.

Diameteren på instrumenterne og åbningerne i hylstrene eller kapperne skal passe sammen.

- Skafter på MIC-instrumenter anbringes i hylstre med kappe.
- Anbring HF-tænger og elektroder med den arbejdende del nedad i hylstre med kappe.
- Anbring instrumenter, der ikke kan skilles ad, i et hylster. Kanalerne skal være åbnet. Hold om nødvendigt grebet åbent med en klemfjeder E 472. Forbind instrumentets tilslutning i siden med en slangeadapter E 448.
- Anbring trokarer med Ø under 10 mm i hylstre. Forbind instrumentets kanal i siden med en slangeadapter E 448.
- Sæt trokarerne med lumen i hylstre.

Modul-indsats E 906/1 til lange MIC-instrumenter

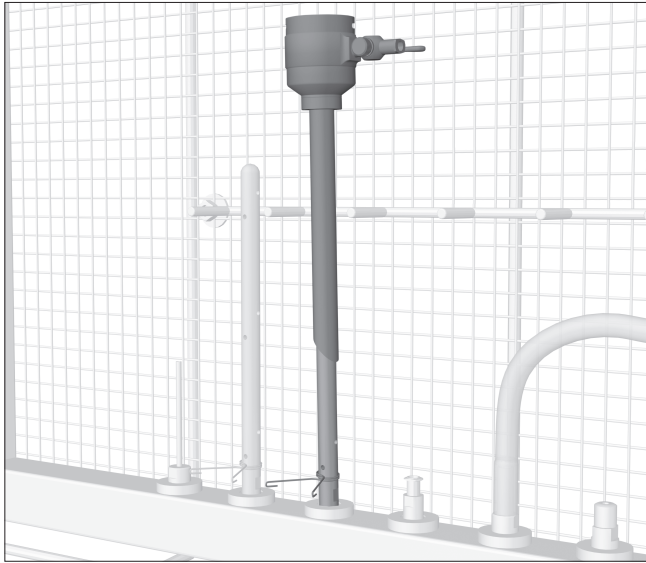


Trokarer Ø 10 - 20 mm


- Skil trokarerne ad.

Rengør smådelene i en trådkurv med låg.


- Sæt trokarer med Ø 10 - 15 mm på en dyse E 454.
- Anvend dysekombination E 464 plus E 454 til trokarer med Ø 15 - 20 mm.
- Fastgør trokarerne med klemfjederen, så vandet kan nå kritiske områder gennem åbningerne i siden på dysen.

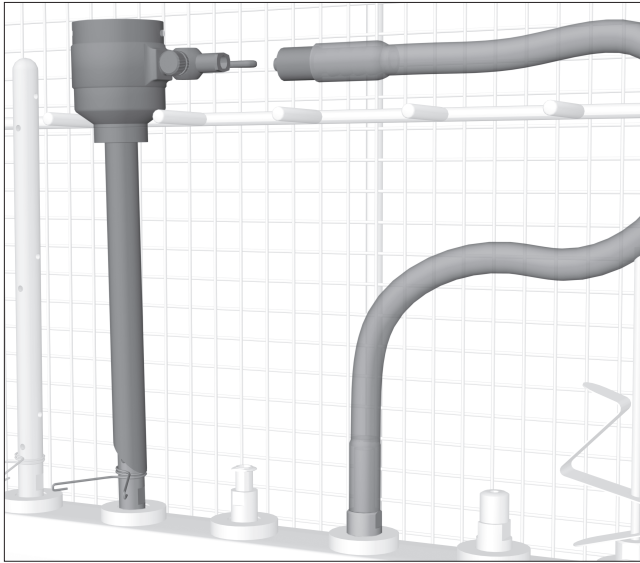

- Forbind trokarets tilslutning i siden med en slangeadapter E 448.
- Sæt slangeadapteren i en silikoneholder.

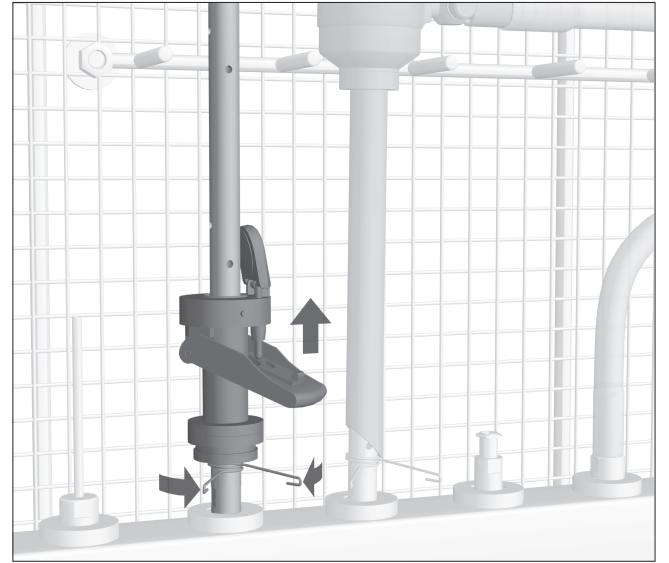


- Sæt vippeventilen på en injektordyse E 454 til trokarer eller E 453 med holdeklammer.
- Fastgør vippeventilen med klemfjeder eller holdeklamme, så vandet kan nå kritiske områder gennem åbningerne i siden på dysen.

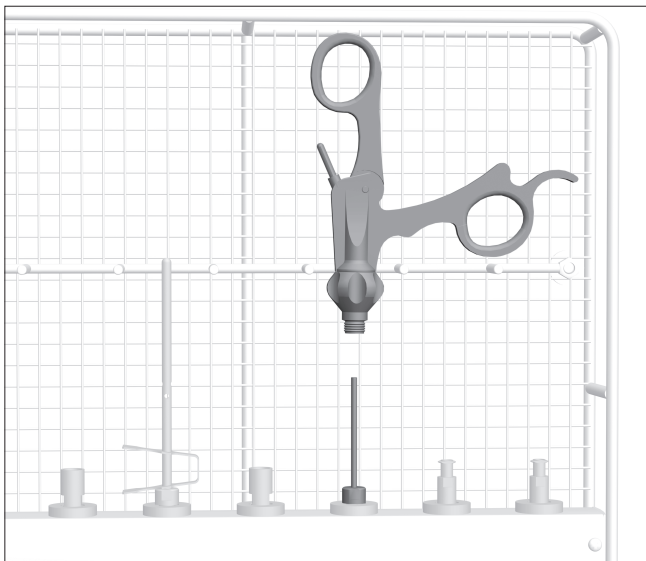

Greb

- Anbring kontaminerende greb på en dyse, f.eks. E 452 (tilbehør, medfølger ikke ved levering).

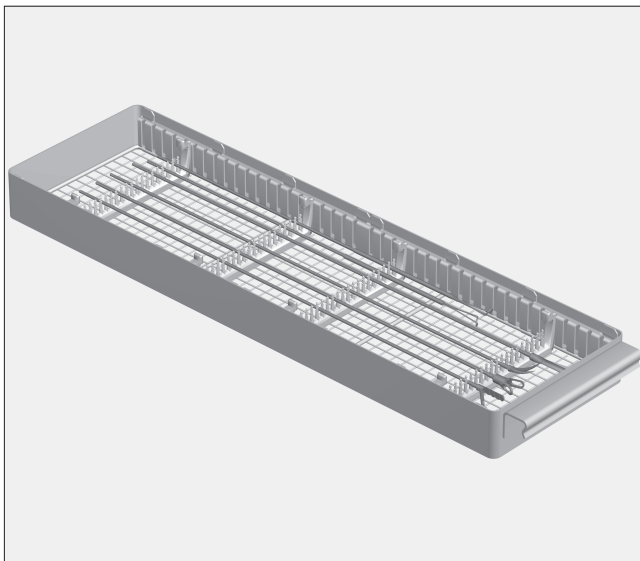

Arbejdende dele

De arbejdende dele kan rengøres i indsats E 908/1. En separat brugsanvisning er vedlagt indsatsen.

- Hæng indsatsen på den øverste ramme i modul-indsatsen.