

## Leveringen omfatter:

Injektormodul E 703/1 til E 701/2 og E 525/2, H 170, B 80, D 555 mm, til 7 hulrumsinstrumenter

## Vedlagt løst er:

- 2 E 447, luer-lock-adaptore ♀ til luer-lock ♂
- 2 E 449, luer-lock-adaptore ♂ til luer-lock ♀
- 3 E 362, blindskruer
- 3 E 980, vinkeladaptore
- 3 injektordyser Ø 4,0 mm, længde 110 mm
- 3 injektordyser med spændfjeder Ø 4,0 mm, længde 120 mm

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinen skal overholdes. Der må kun rengøres instrumenter/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret egnet til maskinopvask, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet. Det sidste skyl bør så vidt muligt altid foretages med totalt afsaltet vand. Ved anvendelse af den automatiske vognregistrering skal kodningen være tilpasset!

## Anvendelsesområde:

Med monteret injektormodul kan der i vognene E 701/2 og E 525/2 foruden trådkurve også rengøres op til 7 hulrumsinstrumenter. Injektormodulet tilsluttes vognens vandtilførsel.

⚠ Overhold venligst anvisningerne i brugsanvisningen til vognen til OP-instrumenter.

## Hulrumsinstrumenter tilsluttes


⚠ For at sikre et ensartet skylletryk i de forskellige faser skal alle tilslutningsmuligheder være forsynet med dyser, adaptore, hylstre eller blindskruer. Der må ikke anvendes beskadigede dyser, adaptore eller hylstre.

Tilslutninger, der ikke bruges til utensilier, skal ikke erstattes med blindskruer.

⚠ Inden hule instrumenter tilsluttes, skal det kontrolleres, at der er gennemgang for vaskevandet i lumener/kanaler.


- Kanyler med luer-lock-tilslutninger skrues fast på de tilsvarende luer-lock-adaptore på injektorvognen.
- Kirurgiske sug sættes på dyserne.

⚠ Hulrumsinstrumenter, som har løsnet sig fra adapterne under rengøringen, skal rengøres på ny.

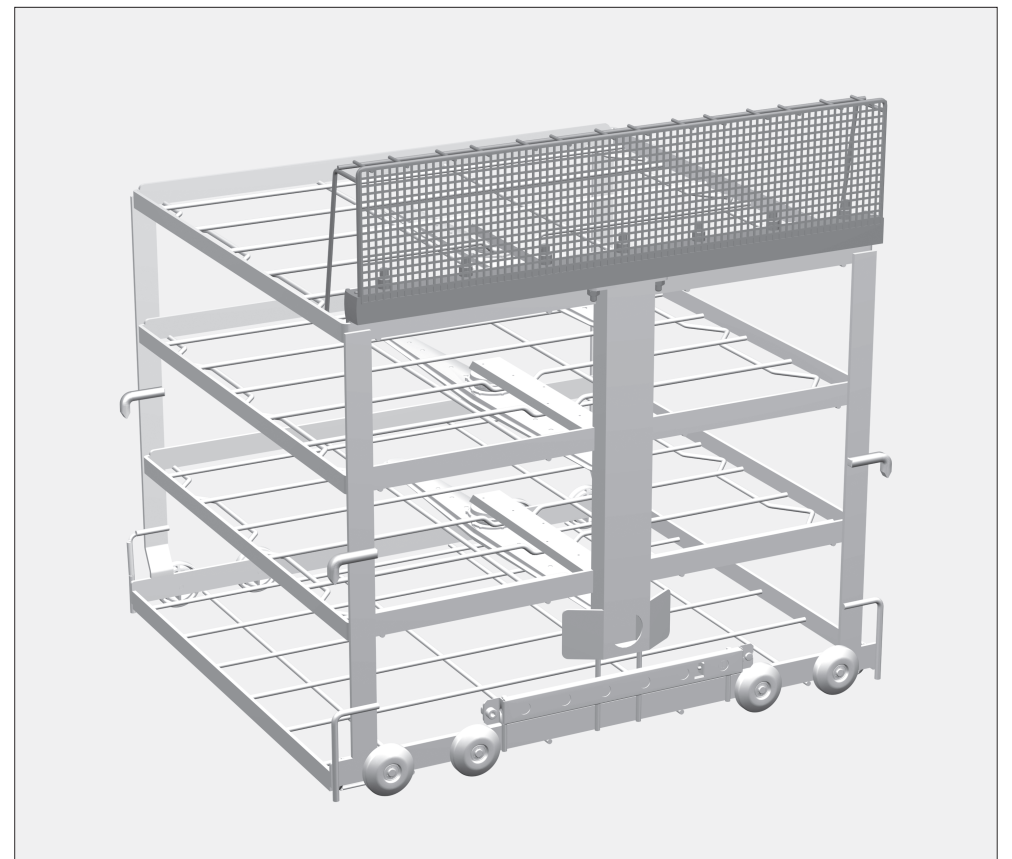


## E 701/2 udvidet med E 703/1

Arbejdsstrinnene ved montering af injektormodulet og skylleanordningerne er beskrevet på bagsiden.

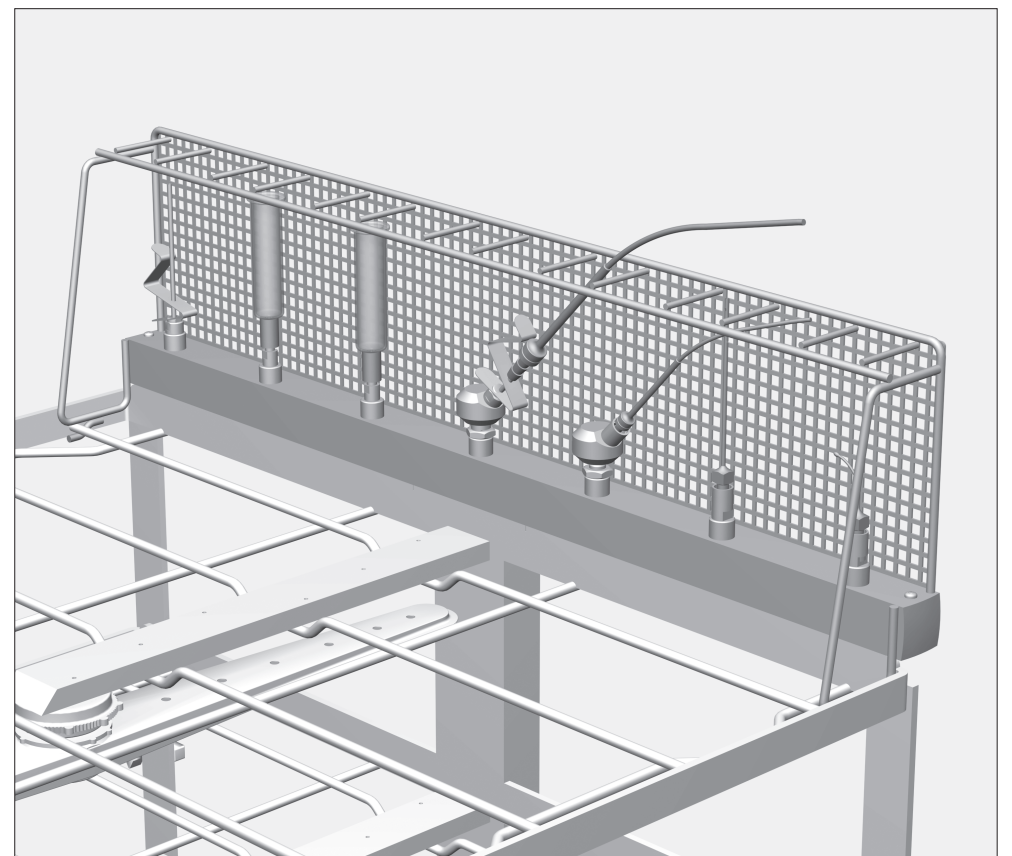

Injektormodul E 703/1

## Injektormodul monteres

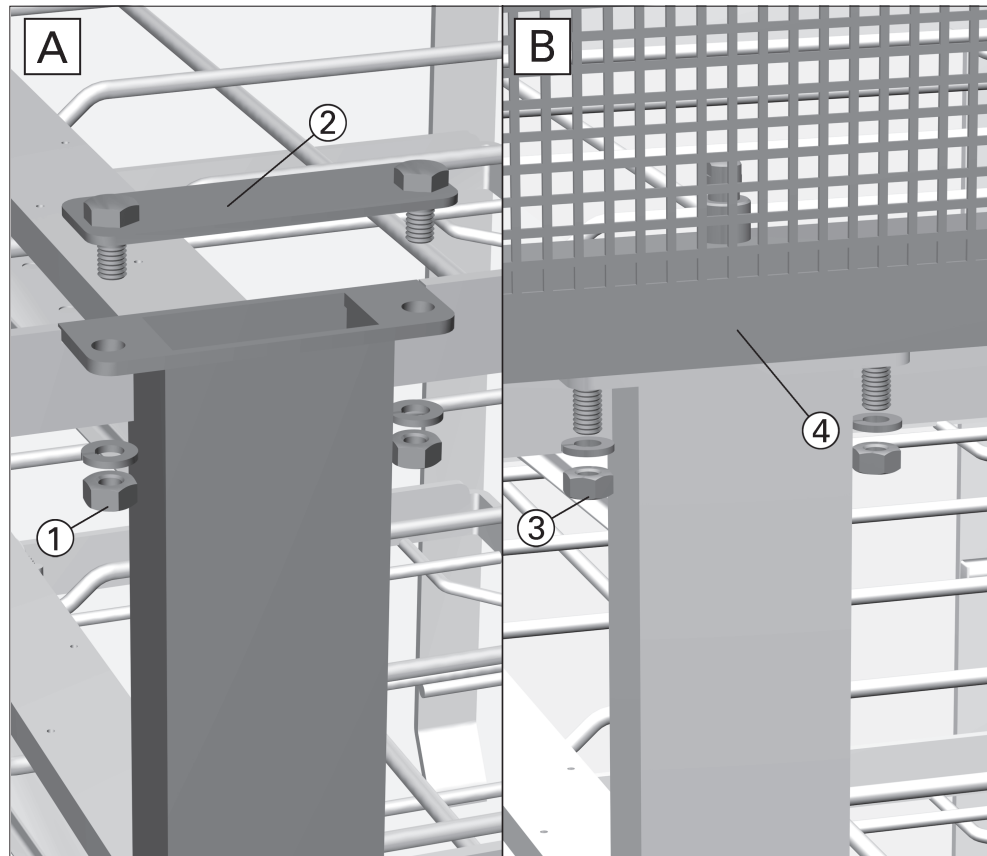


- Løsn møtrikkerne ① på monteringskruerne med en skruenøgle SW 10, og tag dem af sammen med fjederringene.
- Tag afdækningspladen ② af vandtilførslen.

Gem afdækningspladen ②, møtrikkerne ① og fjederringene i tilfælde af, at injektormodul senere skal afmonteres igen.

- Montering af injektormodul: Løsn møtrikkerne ③ på skruerne i injektormodul ④ med en skruenøgle SW 10, og tag dem af sammen med fjederringene.
- Sæt injektormodul ④ på; monteringsdetaljer fremgår af illustrationen.

Når injektormodul er placeret rigtigt:

- Skru møtrikkerne ③ med de mellemliggende fjederringe på injektormodulets monteringskruer, og stram til med en skruenøgle SW 10.

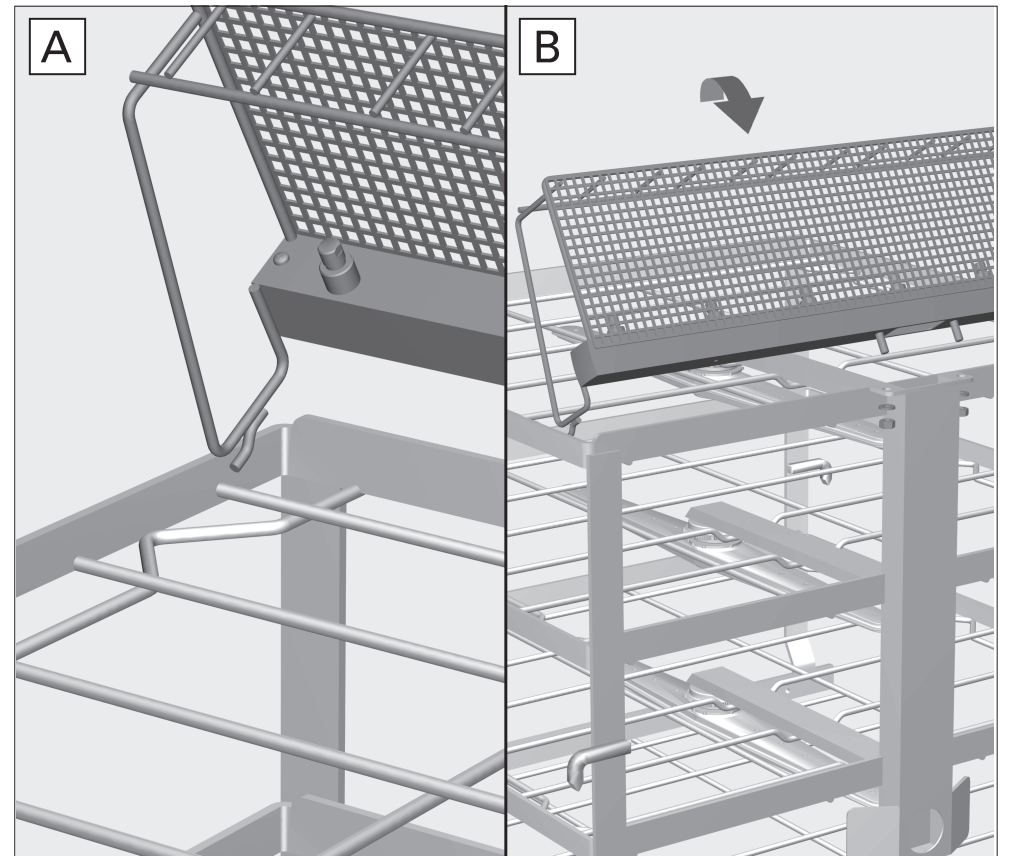




**A:**

- Sæt hagerne på injektormodulets side ind under den yderste tværstang på vognen til OP-instrumenter.

**B:**

- Sænk injektormodul, og stik dets skruer ind i hullerne i vognen, se **B** på illustrationen.

## Tilslutning af hulrumsinstrumenter forberedes

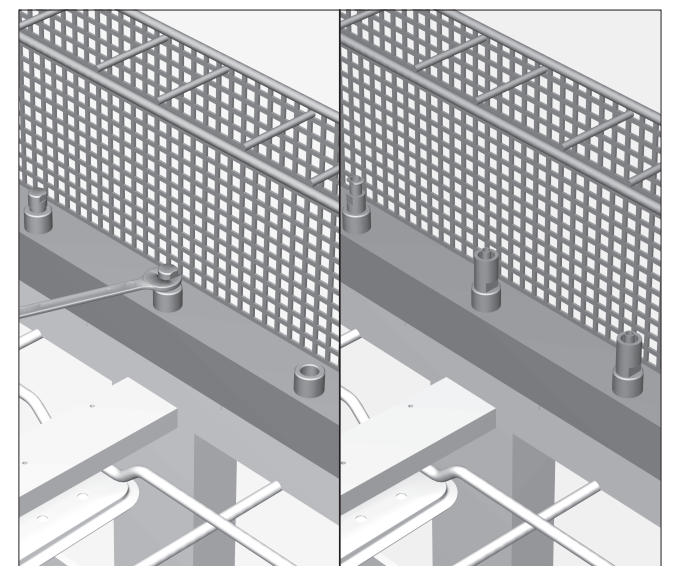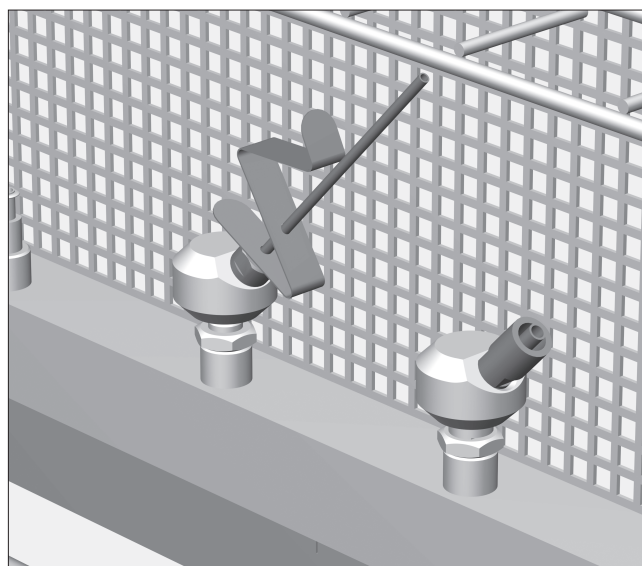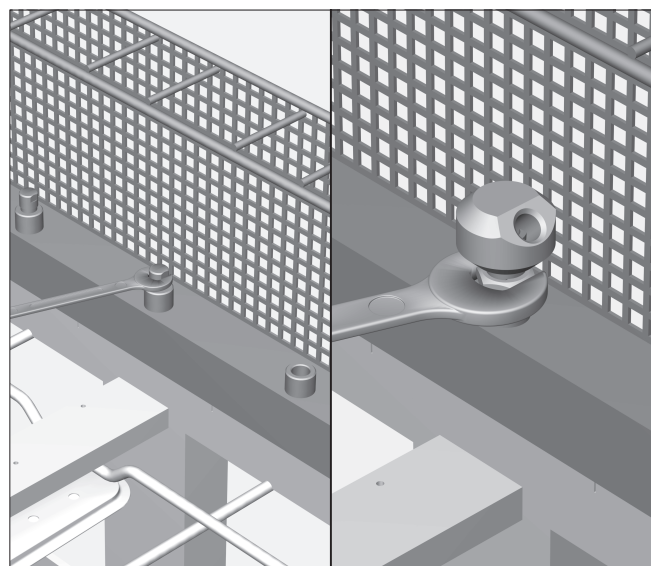

Injektordyser eller luer-lock-adaptorer kan om nødvendigt skrues på vognens øverste etage ved hjælp af vedlagte vinkeladaptorer.

Fremgangsmåde:

- Blindskrue skrues af tilslutningerne med en skruenøgle SW 9.
- Vinkeladapteren til luer-lock-adaptør eller injektordyse skrues i tilslutningerne og justeres.
- Efter justering efterspændes med kontramøtrikken SW 13.

### Vinkeladapter og dyser skrues sammen

For at kunne tilslutte lange suge- eller hulrumsinstrumenter skrues injektordyser med klemfjeder eller luer-lock-adaptorer på vinkeladapteren.

Fremgangsmåde:

- Luer-lock-adaptorer eller injektordyser skrues i vinkeladapteren og spændes fast med en skruenøgle SW 7 eller 9 (afhængig af dyse).
- Om nødvendigt sættes en klemfjeder på injektordyssen.

### Injektordyser og luer-lock-adaptorer sættes i

Der kan anbringes op til 7 hulrumsinstrumenter i injektormodul ved anvendelse af de medfølgende injektordyser og luer-lock-adaptorer.

Fremgangsmåde:

- Blindskrue skrues af tilslutningerne med en skruenøgle SW 9.
- Luer-lock-adaptorer eller injektordyser skrues i tilslutningerne og skrues fast med en skruenøgle.