

Volumen de suministro:

Módulo superior E 702/1 para E 701/2 y E 525/2, H 160, B 530, T 560 mm

Atención: Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad de las instrucciones de manejo de la termodesinfectora. Para el tratamiento utilice exclusivamente instrumental / productos médicos que hayan sido declarados por el fabricante como retratables y tenga en cuenta las indicaciones específicas para el tratamiento. El programa de tratamiento utilizado, preferiblemente con desinfección térmica, deberá ajustarse a la calidad del material de los productos médicos. El último aclarado debe realizarse con agua completamente desalinizada, siempre que ésto sea posible.
¡Si se utiliza el reconocimiento del carro deberá ajustarse la codificación!

Campo de aplicación:


Con el módulo superior montado, en los carros E 701/2 y E 525/2 pueden tratarse jaulas de malla metálica adicionales con instrumental quirúrgico.

Para ello se conecta el módulo superior a la entrada de agua del carro.

Atención: Observe las instrucciones de manejo del carro para instrumental quirúrgico.

Compruebe en la carga/antes del inicio del programa:



- si los brazos aspersores giran correctamente,
- si las bocas de las toberas de los brazos aspersores están limpias/libres de obstrucciones,
- si los carros introducidos están bien acoplados al suministro de agua de la termodesinfectora.

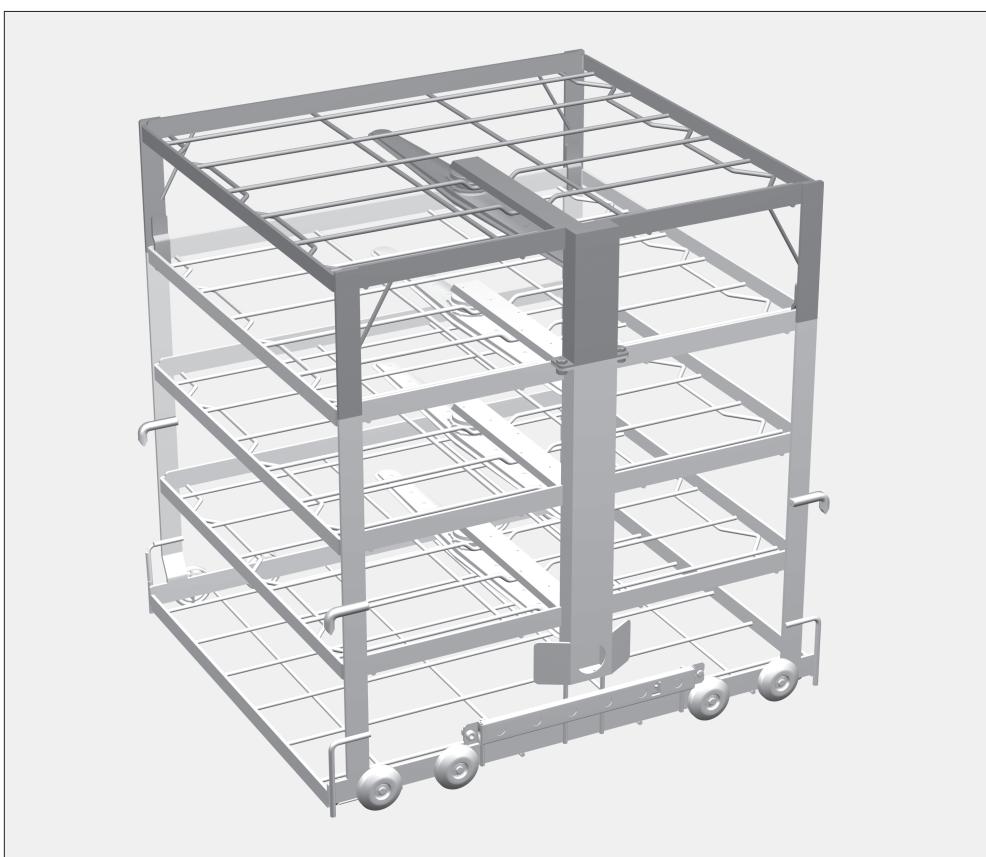

E 701/2 ampliado con E 702/1

Aténgase siempre a la muestra de carga determinada para la validación.

Montar el módulo superior

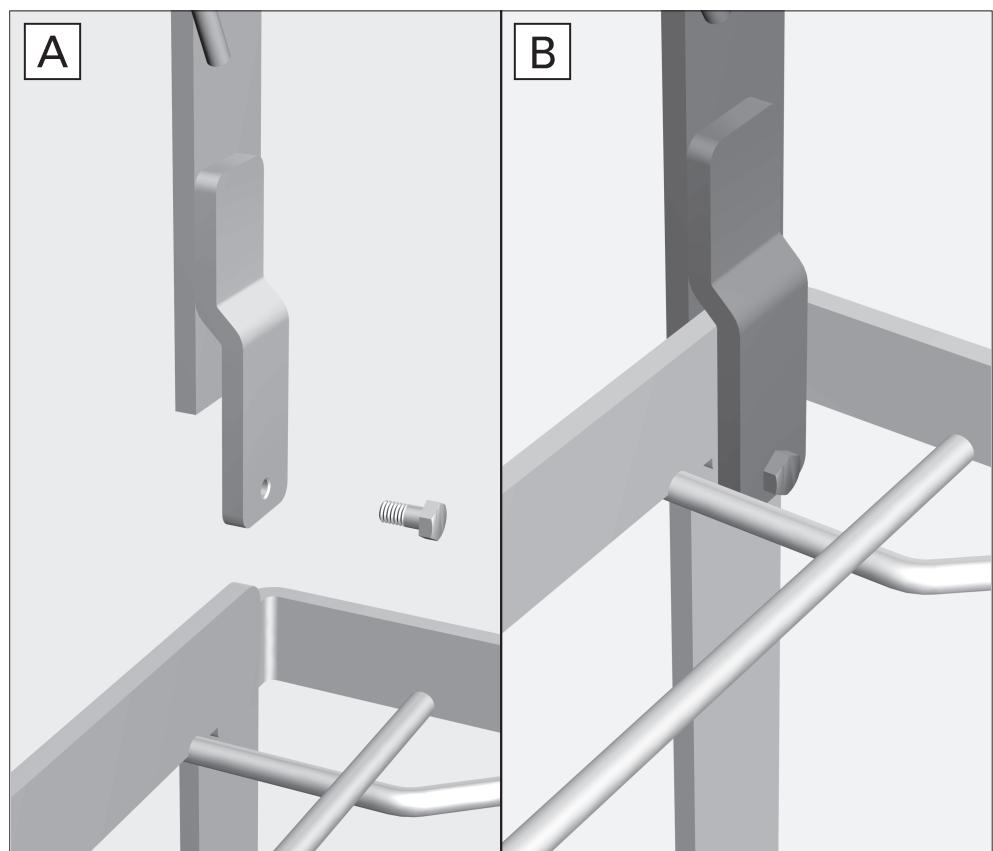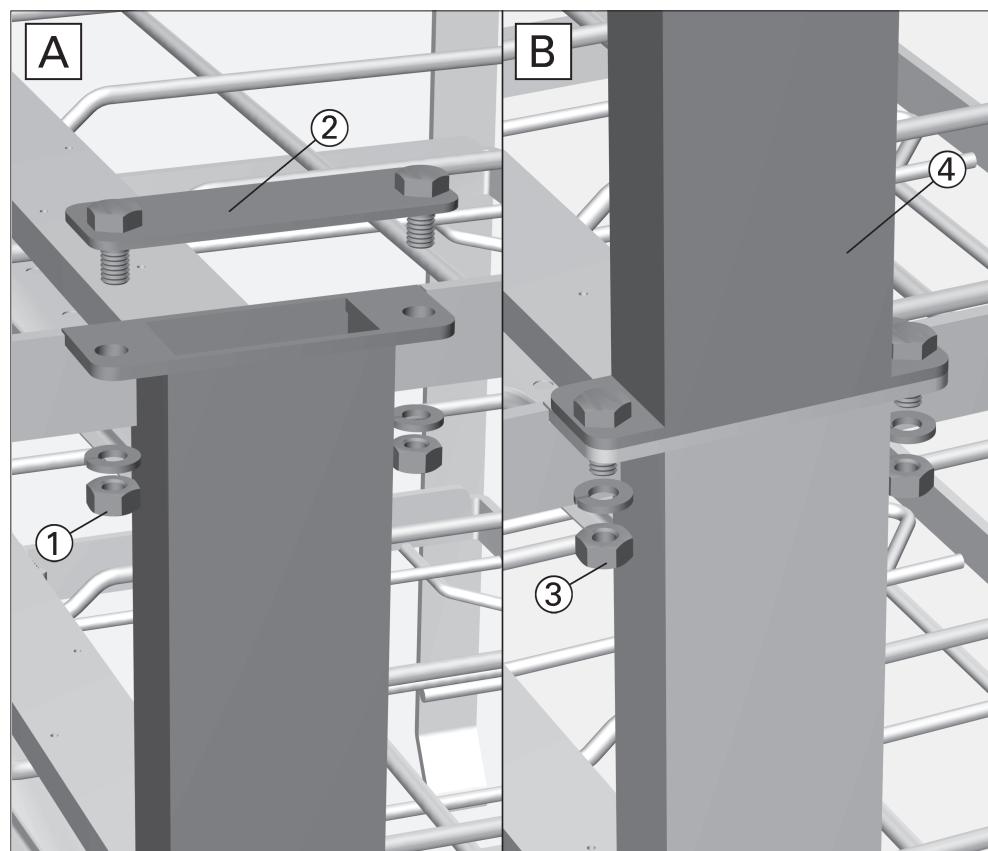

- Suelte las tuercas ① de los tornillos de sujeción con una llave de boca de 10 mm y retírelas junto con los anillos elásticos.
- Retire la chapa protectora ② de la conducción de agua.

Conserve la chapa protectora ②, las tuercas ① y los anillos elásticos, por si hubiera que desmontar de nuevo posteriormente el complemento de módulo.

- Para montar el módulo superior, suelte en primer lugar las tuercas ③ de los tornillo de sujeción del módulo superior ④ con una llave de boca de 10 mm y retírelas junto con los anillos elásticos.
- Instale el módulo superior ④. Para obtener detalles sobre el montaje, véase la figura contigua.

Una vez ajustados los tornillos de fijación:

- Enrosque las tuercas ③, con los anillos elásticos situados entre ellas, a los tornillos de sujeción del módulo superior y apriételas con una llave de boca de 10 mm.

Apretar los tornillos de fijación

A:

- Coloque los ganchos laterales del módulo superior sobre el borde exterior del carro de instrumental quirúrgico.
- Abata el módulo superior y, al hacerlo, introduzca los tornillos de sujeción a través de los orificios del carro, véase B en la figura contigua.

B:

- Apriete los tornillos de fijación con una llave de boca de 7 mm.

Fornecimento:

Módulo de carga E 702/1 para E 701/2 e E 525/2, H 160, B 530, T 560 mm

! Leia atentamente as medidas de segurança e precauções mencionadas no livro de instruções da máquina de lavar e desinfectar. Lave e desinfecte somente instrumentos / Dispositivos médicos que tenham a indicação do fabricante de que podem ser lavados na máquina e siga as indicações específicas. De preferência deve ser usado o programa com desinfecção térmica, devendo a qualidade do material estar adequada ao mesmo. A última enxaguagem deve ser feita com água desmineralizada.
Ao utilizar o reconhecimento automático do carro a codificação deve ser adaptada.

Áreas de aplicação:

Com o módulo de carga montado podem ser lavados adicionalmente no carro E 701/2 e E 525/2 div. caixas em rede com instrumentos cirúrgicos.
Para isso o módulo de carga é ligado à conduta de entrada de água.

! Siga as indicações mencionadas nas instruções do carro para instrumentos cirúrgicos.

Efectue um controle à carga/antes de iniciar o programa:



- Os braços de lavagem rodam livremente,
- os injectores dos braços de lavagem estão limpos/desobstruídos,
- os carros introduzidos na máquina estão bem acoplados à ligação de entrada de água da máquina de lavar e desinfectar.



E 701/2 aumentado com E 702/1

Coloque o módulo tal como mostra a figura.

Montagem do módulo de carga

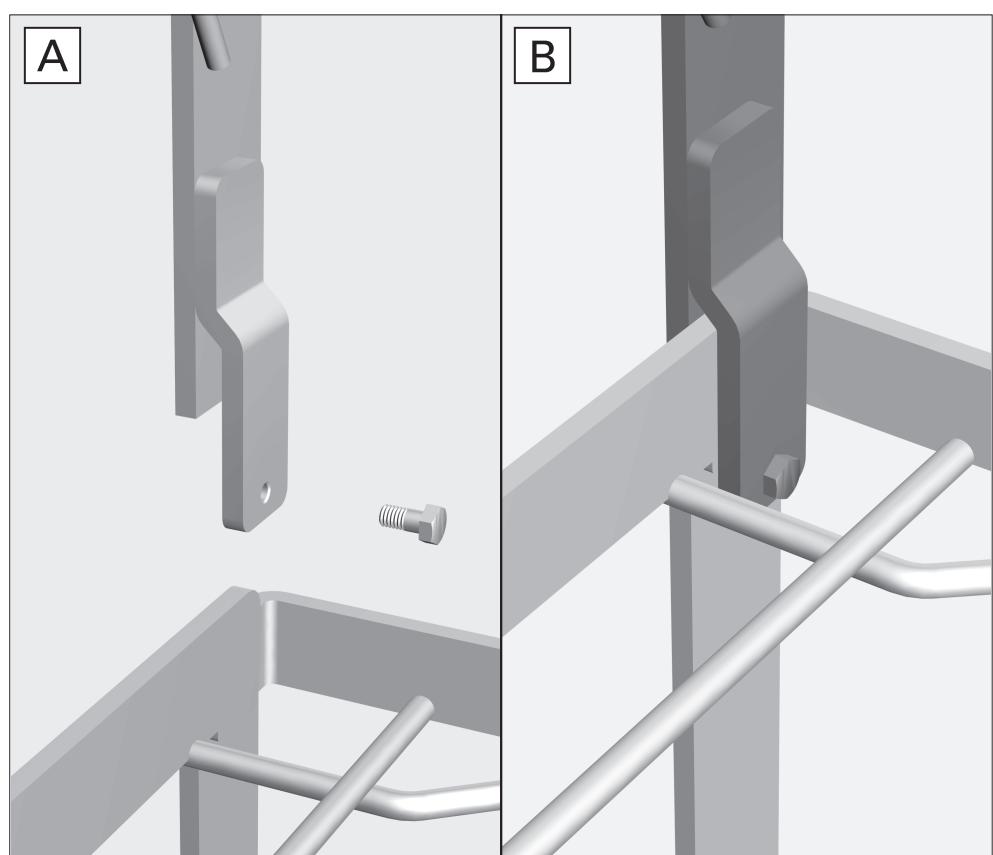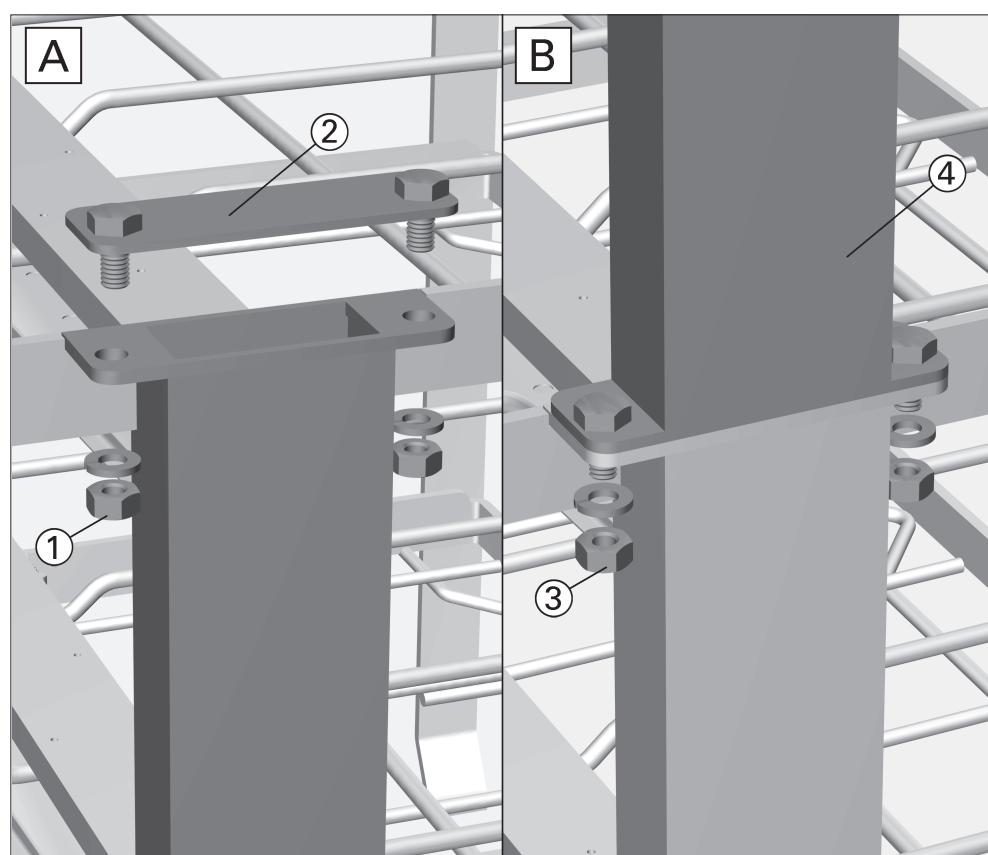

- Aliviar as porcas ① dos parafusos de fixação com uma chave de bocas SW 10 e retirar em conjunto com as anilhas de mola.

- Retirar a chapa de cobertura ② da conduta de entrada de água.

Guarde a chapa de cobertura ②, as porcas ① e as anilhas de mola, se mais tarde pretender voltar a desmontar o módulo de carga.

- Para montar o módulo de carga alivie primeiro as porcas ③ dos parafusos de fixação do módulo de carga ④ com uma chave de bocas SW 10 e retire em conjunto com as anilhas de mola.
- Encaixar o módulo de carga ④, na gravura ao lado pode ver os pormenores da montagem.

Após apertar os parafusos de fixação:

- Aparafuse as porcas ③ com as anilhas de mola situadas ao meio nos parafusos de fixação do módulo de carga e aperte devidamente com a chave de bocas SW 10.

Aparafusar devidamente os parafusos de fixação

A:

- Encaixar os ganchos laterais do módulo de secagem sobre o rebordo exterior do carro para instrumentos cirúrgicos.
- Empurrar o módulo de carga para baixo e encaixar os parafusos de fixação do módulo através dos orifícios do carro, consulte B na figura ao lado.

B:

- Aparafusar devidamente os parafusos de fixação com uma chave de bocas SW 7.