

Käyttökohteet:

Telineessä E 457 voidaan puhdistaa ja desinfioida esim. MIC-instrumenttien irrotettavat sisäosat, pituus enint. 480 mm, vähän likaantuneita instrumenttien kädensijoja sekä mm. HF-kaapeleita. Teline asetetaan MIC-instrumenttien suorasuihkuvaunuun. Suorasuihkuvaunun mukana toimitetaan erillinen käyttöohje.

⚠ Noudata ehdottomasti puhdistus- ja desinfiointiautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita. Käsittele laitteessa ainoastaan sellaisia välineitä/lääkinnällisiä kohteita, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfiointin, ja noudata kunkin välineen omia puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Käytettävä puhdistus- ja desinfiointiohjelma, johon tulisi sisältyä lämpödesinfiointi, on tarvittaessa sopeutettava puhdistettavien lääkinällisten välineiden materiaalin laatuun sopivaksi.

Pura puhdistusta varten MIC-instrumentit niin pieniin osiin kuin mahdollista. Instrumenttien kahvat asetetaan MIC-suorasuihkuvaunun huuhteluhylsyihin.

Irrotettavat sisäosat


Irrotettavat sisäosat on kiinnitettävä kolmesta kohdasta telineen E 457 hammastuksiin. Tätä varten hammastusten paikkaa voidaan muuttaa sisäosien pituuden mukaan.

- Aseta sisäosat hammastuksiin
- Kiinnitä ensin toiminnallinen pää paikalleen ja avaa se.
- Kiinnitä sitten sisäosa hammastuksiin muilta osiltaan.

Kädensijat

- Avaa kädensijat ja kiinnitä niiden lukitushakaset (jos sellaisia on) ensimmäiseen hammastukseen.
- Aseta kädensijat kahvaliitettä alaspäin telineen E 457 pidikkeiden väliin.

Telineen ja siihen asetetun kädensijan enimmäiskorkeus vaihtelee käytetyn suorasuihkuvaunun mukaan. Puhdista likaiset kädensijat suorasuihkuvaunun suihkusuuttimissa.

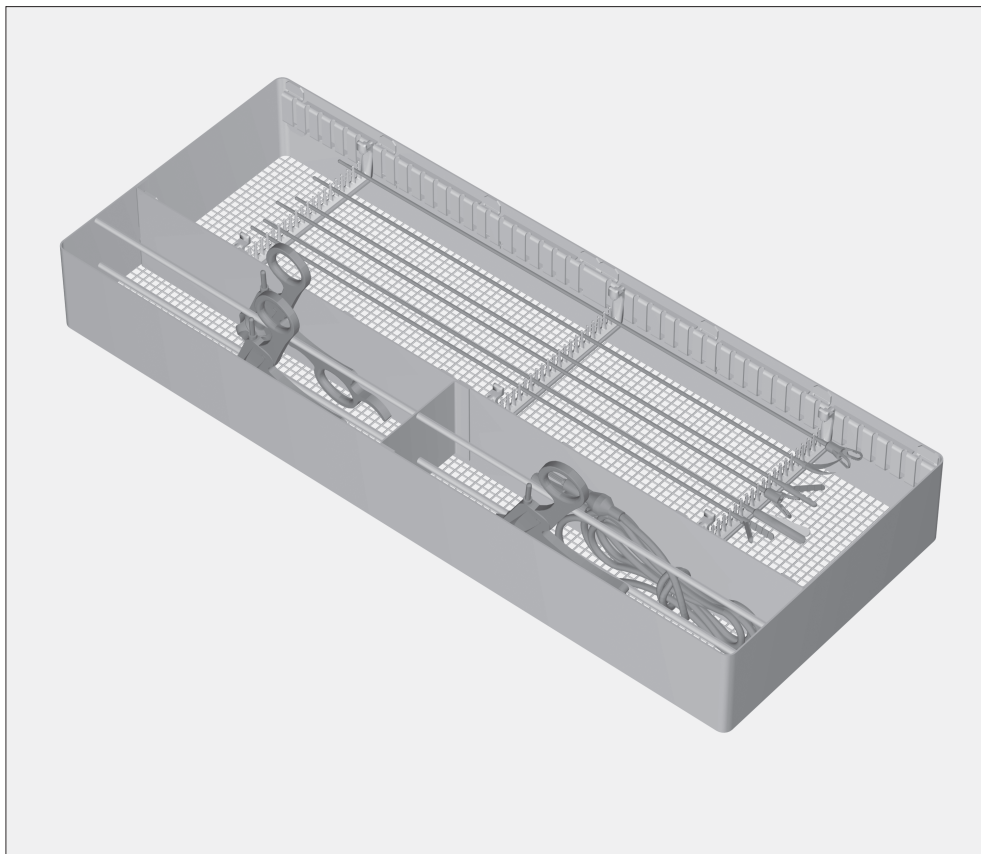

Användningsområde

I insats E 457 kan exempelvis endoskopitänger som är max 480 mm långa, lätt smutsade handtag på MIC-instrument och högfrequens-kablar rengöras. Insatsen ställs in i injektorvagnen för MIC-instrument. En separat bruksanvisning bifogas injektorvagnen.

⚠ Läs igenom säkerhetsanvisningarna och varningarna i bruksanvisningen för diskdesinfektorn noggrant. Rengör endast instrument/medicinprodukter vilka av tillverkaren är deklarerade som maskinellt disk- och desinfektionsbara och beakta de specifika rengöringsanvisningarna. Det diskprogram som används med termisk desinfektion måste även anpassas till medicinprodukternas materialkvalitet.

Lägg MIC-instrument så långt ifrån varandra som möjligt när de ska rengöras. Isoleringshylsorna på instrumenten ställs in i spolhylsor på MIC-injektorvagnen.

Endoskopitänger

Endoskopitängerna ska vara fixerade på tre punkter på hållarna på E 457. Hållarnas position kan anpassas till endoskopitängernas längd.

- Placera endoskopitängerna i hållarna.
- För att göra det kläm ihop änden på funktionsdelen och öppna.
- Fixera sedan endoskopitängerna i de andra hållarna.

Handtag

- Öppna handtagen, lås spärren (om det finns en), så att de är så öppna som möjligt.
- Ställ handtagen med isoleringshylsorna neråt mellan hållarna på E 457.

Den maximala höjden på insatsen och det iställda handtaget beror på injektorvagnen som används. Handtag som är mycket smutsiga måste rengöras på dysor i injektorvagnen.

Istället för handtag kan högfrequens-kablar rengöras i insatsen.