

Injektoroverkurv O 177/1



Leverancen omfatter:

- Injektoroverkurv O 177/1, H 281 mm, B 531 mm, D 475 mm
- 26 dyser Ø 4 mm, længde 30 mm
- 7 tragte

Anvendelsesformål:


Injektoroverkurv O 177/1 er beregnet til maskinel rengøring af medicinske instrumenter, f.eks. tandlægeinstrumenter. Overkurv O 177/1 kan anvendes i rengørings- og desinfektionsmaskiner G 7881, G 7882, G 7882 CD, G 7891, G 7892, PG 8535 og PG 8536.

På den venstre side er der anbragt to injektorlister med i alt 26 holdere til rengøring af stive skoper, hånd- og vinkelstykker o.l. Den højre side er fri og kan udstyres med indsats og trådkurve til rengøring af instrumenter uden lumen. Eksempler på fyldning og yderligere anvisninger om fyldning fremgår af afsnittet Anvendelsesteknik i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinen.

Anvend kun skylleanordninger specielt beregnet til hånd- og vinkelstykker ved rengøring af disse, f.eks. holder AUF 1.

Spulearmsovervågning

For at anvende spulearmsovervågning i PG 8535 og PG 8536 skal der eftermonteres en magnetspulearm.

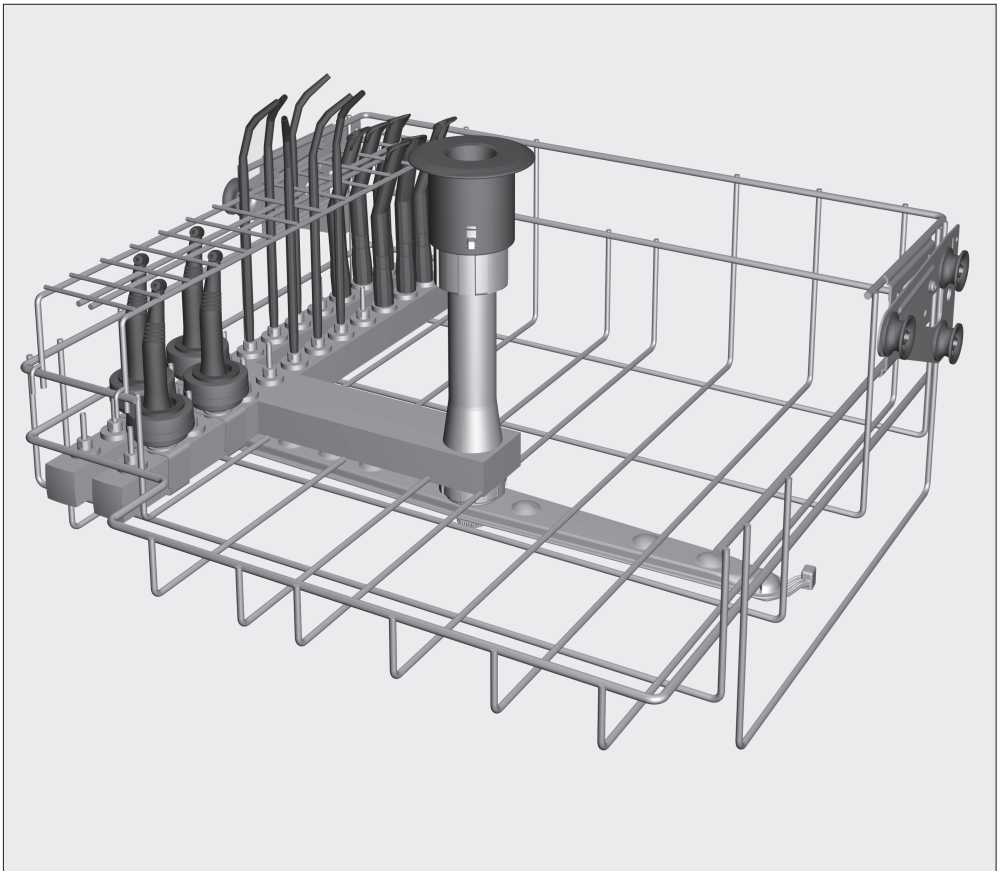


⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinen skal overholdes. Der må kun rengøres instrumenter/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret egnet til maskinrengøring, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet. Det sidste skyl bør så vidt muligt altid foretages med totalt afsaltet vand.

Anvendelse:

- Overhold altid det påfyldningseksempel, der er fastlagt i valideringen.
- ⚠ Instrumenter, der har løsnet sig fra dyserne/holderne under rengøringen, skal rengøres igen.
- Inden anbringelse af de stive skoper, hånd- og vinkelstykkerne o.l. skal det sikres, at vandet kan trænge igennem lumener/kanaler.
- Sæt de stive skoper, hånd- og vinkelstykkerne o.l. på dyserne. Det højdejusterbare holdegitter stabiliserer instrumenterne.
 - Efter programslut skal instrumenterne tørres med medicinsk trykluft, plejes i henhold til producentens anvisninger og eventuelt steriliseres. Landespecifikke bestemmelser skal overholdes.

Holdegitter justeres i højden:

- Løft holdegitteret opad, og
- sæt det i igen på ribbe ① eller ②.

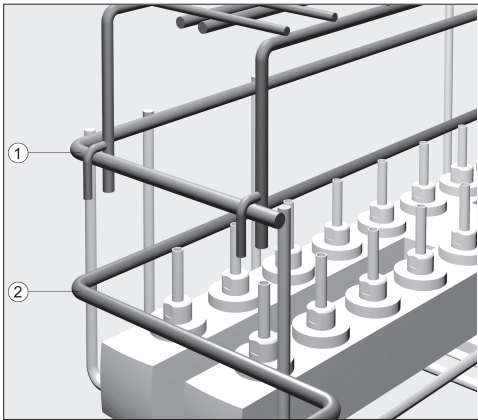

Kontroller ved hver fyldning/inden hver programstart:

- Er alle silikoneholdere til stede, og er de ubeskadiget?
- Er alle dyser og hylstre sat fast på silikoneholderne?

Manglende eller beskadigede silikoneholdere i kurven skal erstattes med nye silikoneholdere. Først herefter må kurven anvendes igen. Under disse betingelser standardiserer silikoneholderne selv skylletrykket.

Der må ikke anvendes beskadigede dyser, adaptere eller hylstre.


- Kan spulearmene (kurvespulearm og øverste maskinspulearm) rotere frit?

Ekstra tilbehør:

- Hvis der skal anvendes flere tilbehørsdele samtidigt til rengøring af stive skoper, hånd- og vinkelstykker o.l., skal det kontrolleres, om det ønskede antal er tilladt iht. valideringen. Overhold altid det i valideringen fastlagte maksimale antal.
- Holder AUF 1 til hånd- og vinkelstykker:**
Til rengøring af hånd- og vinkelstykker er eftermontering af op til 11 AUF 1-adaptre påkrævet. Der følger en separat brugsanvisning med holderne.
- Inden hånd- og vinkelstykkerne anvendes igen efter rengøringen, skal der foretages en funktionskontrol, f.eks. ved at spraye ned i spyttekummen.

Hylster E 499:

Hylster E 499 er beregnet til rengøring af skylle- og sugekanyler, inkl. sugaafbrydere. Der følger en separat brugsanvisning med hylsteret.

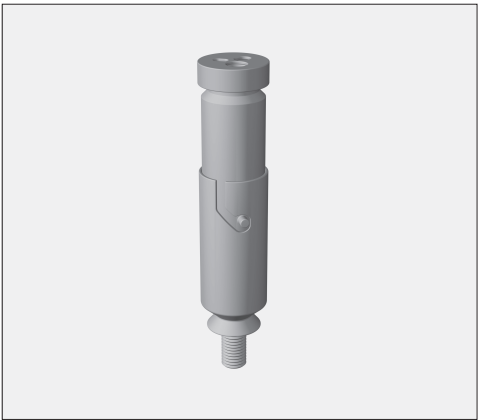

Skyllehylstre E 442 og E 443 til instrumenter med lumen:

- Hylstrene E 442 og E 443 er egnede til rengøring af instrumenter med lumen og en udvendig diameter på under 10 mm.
- E 442 til instrumenter med 4 - 8 mm Ø,
 - E 443 til instrumenter med 8 - 8,5 mm Ø.
- Åbningerne kan ændres med kapper, som kan købes som ekstraudstyr:
- E 445 kappe til skyllehylstre, åbning Ø 6 mm,
 - E 446 kappe til skyllehylstre, åbning Ø 10 mm.

Diameteren på instrumenterne og åbningerne i skyllehylstrene eller kapperne skal passe sammen, f.eks. kapper til hylstre med en åbning Ø 6 mm til kirurgiske sugekanyler i dentalområdet.

Overkurv/injektor O 177/1

Standardlevering:

- Overkurv/injektor O 177/1, H 281 mm, B 531 mm, D 475 mm.
- 26 dyser Ø 4 mm, lengde 30 mm,
- 7 trakter

Anvendelsesområde:

Overkurv/injektor O 177/1 er beregnet for maskinell klargjøring av medisinske instrumenter, som f.eks. dentalinstrumenter.


Overkurv O 177/1 kan brukes i rengjørings- og desinfeksjonsautomatene G 7881, G 7882, G 7882 CD, G 7891, G 7892, PG 8535 og PG 8536.

På venstre side befinner det seg to injektorlister med til sammen 26 holdere for klargjøring av hule instrumenter. Høyre side er fri. Der er det plass til å sette inn-satser og instrumentrister for klargjøring av instrumenter uten hulrom. Du finner flere eksempler og råd om plassering av utensilene i kapittelet "Anvendel-sesteknikk" i bruksanvisningen til rengjørings- og desinfeksjonsautomaten.

Roterende instrumenter: Bruk bare spyleinnretninger, f.eks. AUF 1, som er spesial-konstruert for klargjøring av roterende instrumenter (hånd- og vinkelstykker).

Spylearmovervåkning

For å kunne bruke spylearmovervåkning i PG 8535 og PG 8536 må det monteres en magnetspylearm i etterkant.

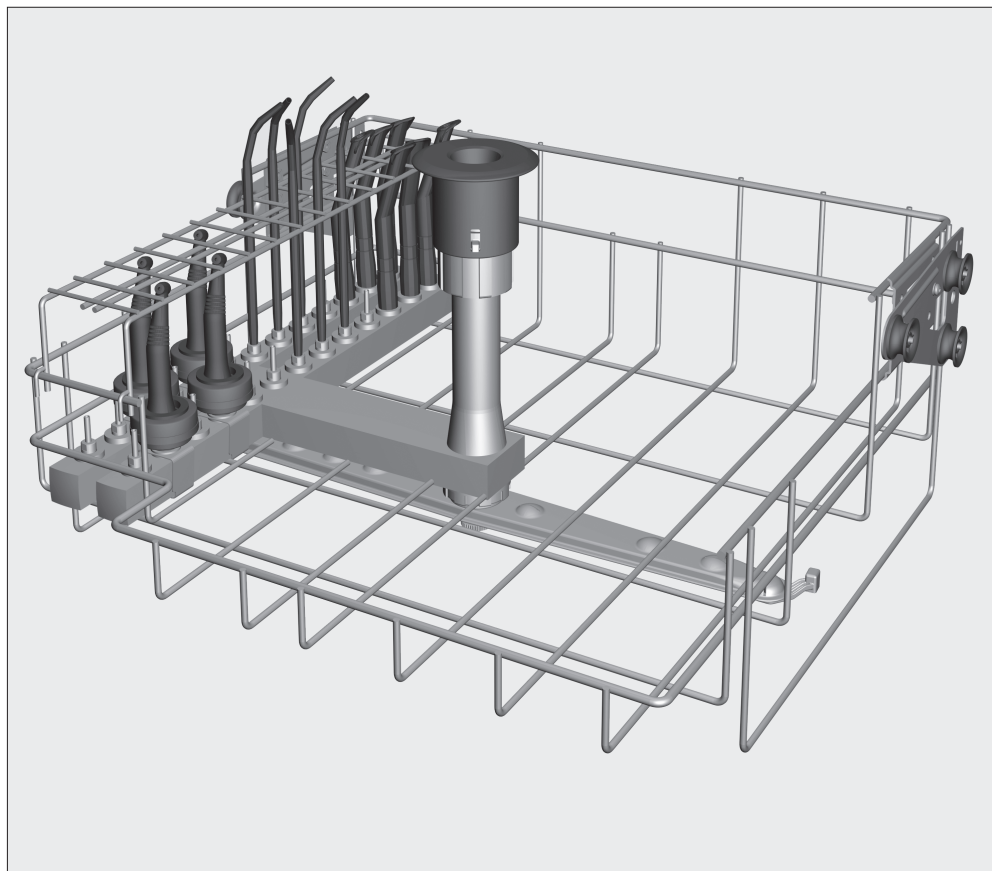

⚠ Kapittelet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for rengjørings- og desinfeksjonsautomaten må absolutt følges. Klargjør bare instrumenter / medisin-produkter, som fra produsentens side er deklarerert som mulig å klargjøre for gjenbruk maskinelt og følg produsentens anvisninger for klargjøring. Klargjøringsprogrammet hvor termisk desinfeksjon foretrekkes, må eventuelt avstemmes til materialkvaliteten på medisinproduktene. Den siste skyllingen skal helst skje med demineralisert vann.

Anvendelse:

Overhold alltid det plasseringsmønsteret som er fastsatt innenfor valideringen.


⚠ Instrumenter som har løsnet fra dysene/holderne under klargjøringen, må klargjøres en gang til.

Før tilkobling av hule instrumenter, må det sikres at vaskevannet kan trenge gjennom hulrommene/kanalene.

- Sett de hule instrumentene på dysene. Det høyderegerbare holdegitteret stabiliserer instrumentene.
- Etter programslutt må instrumentene tørkes med medisinsk pressluft, pleies og evt. steriliseres iht. produsentens angivelser. Nasjonale bestemmelser må følges.

Høyderegerbart holdegitter:

- Løft opp holdegitteret og
- sett begge sider på plass igjen i nivå ① eller ②.

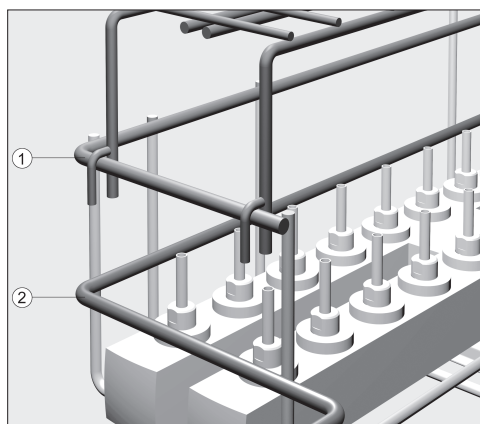

Kontroller ved plasseringen / før hver programstart:

- er alle silikonholderne uskadet og på plass?
- er dysene og spyleinnretningene godt festet i silikonholderne?

Manglende silikonholdere eller silikonholdere som er skadet av væskegjennom-trengning må erstattes av nye silikonholdere. Først etter dette kan kurven bru-kes igjen. Under disse forutsetningene standardiserer silikonholderne spyletryk-ket selv.

Det må ikke brukes skadede spyleinnretninger som dyser, adaptere eller spyle-hylser.

- kan spylearmene rotere fritt (kurv- og øvre maskinspylearm)?

Ekstraustyr:

Dersom det parallelt skal brukes flere tilbehørsdeler ved klargjøring av hule instrumenter, skal ønsket antall kontrolleres med tanke på hvor mange det er til-latt å bruke innenfor valideringen. Overhold alltid maks.-antallet som er fastsatt innenfor valideringen.

Holder AUF 1 for roterende instrumenter:

For klargjøring av roterende instrumenter er det nødvendig å etterutstyre kurven med inntil 11 AUF 1-adaptere. Det følger en egen bruksanvisning med.

Det må gjennomføres en funksjonskontroll, f.eks. ved å sprute i spytebekkenet, før de roterende instrumentene kan tas i bruk igjen etter klargjøringen.

Spyleinnretning E 499:

Spyleinnretningen E 499 er beregnet for klargjøring av skylle- og sugekanyler, inkludert sugekanyler med inngangs-port for luft. Det følger en egen bruks-anvisning med spyleinnretningen.



Spylehylsene E 442 og E 443 for instrumenter med hulrom:

Spylehylsene E 442 og E 443 er egnet for klargjøring av instrumenter med hulrom og en utvendig diameter på under 10 mm.

- E 442 for instrumenter med 4 - 8 mm Ø,
- E 443 for instrumenter med 8 - 8,5 mm Ø.

Utløpsåpningene kan varieres med reservekapper (ekstraustyr):

- E 445 kappe for spylehylser; åpning Ø 6 mm,
- E 446 kappe for spylehylser; åpning Ø 10 mm.

Diameteren på instrumentene og åpningene i spylehylsene hhv. kappene må passe hverandre, f.eks. kapper for spylehylser med en åpning på Ø 6 mm for ki-rurgiske sugekanyler innen dentalområdet.