


Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Gebrauchsanweisung des Reinigungsund Desinfektionsautomaten. Bereiten Sie ausschließlich Dentalinstrumente / Medizinprodukte auf, die von ihrem Hersteller als maschinell wiederaufbreitbar deklariert sind und beachten Sie dessen spezifische Aufbereitungshinweise. Das verwendete Aufbereitungsprogramm mit bevorzugt thermischer Desinfektion muss gegebenenfalls auf die Materialqualität der Instrumente abgestimmt sein.

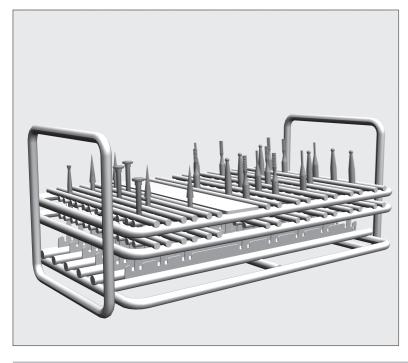

Lieferumfang

Einsatz E 491, H 53 mm, B 120 mm, T 70 mm.

Anwendungsgebiet

Der Einsatz E 491 dient zur Aufbereitung von rotierenden Instrumenten aus der Dentalmedizin.

Der Einsatz E491 ist in zwei Bereiche unterteilt:

- Der kleinere Bereich verfügt über 18 Aufnahmemöglichkeiten für Instrumente, die in Turbinen eingespannt werden können (je ca. 1,8 x 1,8 mm).
- Der größere Bereich umfasst 30 Aufnahmen für Instrumente, die in Winkelstücken zum Einsatz kommen (je ca. 2,8 x 2,8 mm).

Bei rotierenden Instrumenten mit besonders komplexen Funktionsenden bzw. hartnäckigen Anhaftungen, kann eine Ultraschallvorbehandlung erforderlich sein.

■ Die rotierenden Instrumente der Turbinen und Winkelstücke mit dem Schaftende nach unten in die jeweiligen Aufnahmen einstecken.

Die Funktionsenden der Instrumente müssen nach oben zeigen. Die Funktionsenden dürfen nicht auf dem Gitter des Einsatzes aufliegen, denn nur so werden sie von der Spülflotte vollständig umspült. Gleiches gilt für die Schafthälse.

<u>N</u> Verletzungsgefahr: Achten Sie beim Einsetzen der Instrumente darauf, sich nicht an den Funktionsenden der Instrumente zu verletzen. Tragen Sie zu ihrer eigenen Sicherheit beim Einsortieren Handschuhe.

Beim Einstecken merken Sie einen leichten Widerstand, der von eingearbeiteten Blattfedern ausgeht. Die Federn halten die Instrumente in Position und verhindern, dass diese möglicherweise herausfallen. Fehlt der Widerstand, ist die Aufnahme für das Instrument ungeeignet. Ein Durchrutschen der Instrumente wird durch entsprechende Streben verhindert.

■ Den bestückten Einsatz E 491 auf eine freie Fläche eines Oberkorbs einstellen.