


⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinen skal overholdes. Der må kun rengøres dentalinstrumenter/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret som egnet til maskinopvask, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter instrumenternes materialekvalitet.

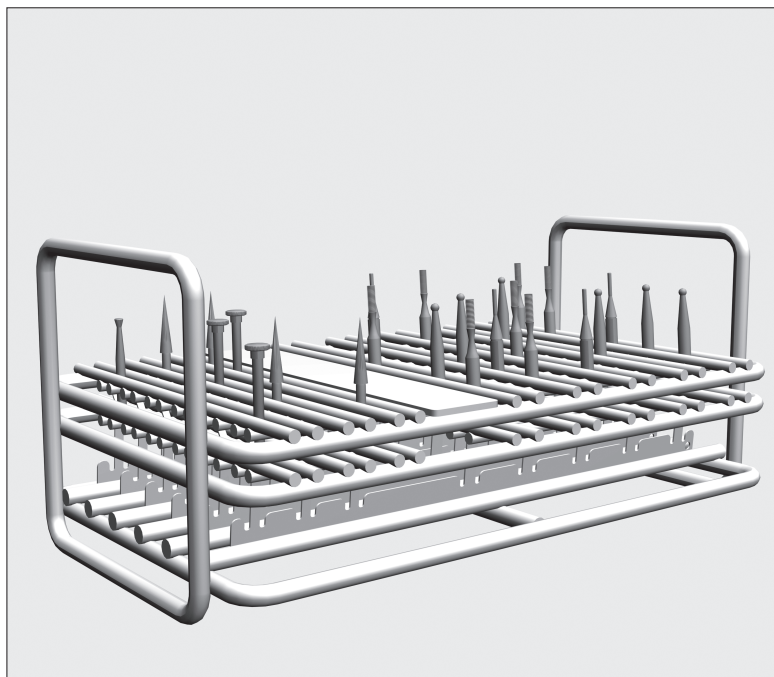

Medfølger ved levering:

Indsats E 491, H 53 mm, B 120 mm, D 70 mm.

Anvendelsesområde

Indsats E 491 anvendes til rengøring af roterende instrumenter fra dentalområdet.

Indsats E 491 er inddelt i to rum:

- Det mindste område har plads til 18 instrumenter, der kan spændes fast i turbiner (hver på ca. 1,8 x 1,8 mm).
- Det største område har 30 holdere til instrumenter, der kan anvendes i vinkelstykker (hver ca. 2,8 x 2,8 mm).

Ved roterende instrumenter med særligt komplekse funktionsender eller meget fastsiddende urenheder kan det være nødvendigt at foretage en forbehandling i ultralydsbad.

- Sæt turbinernes roterende instrumenter og vinkelstykkerne i de pågældende holdere med skaftenden nedad.

Instrumenternes funktionsender skal pege opad. Funktionsenderne må ikke ligge på indsatsens gitter. Kun herved gennemskylles de fuldstændigt. Det samme gælder for instrumenternes halse.


⚠ Fare for at komme til skade: Ved anbringelse af instrumenterne skal man passe på ikke at komme til skade på instrumenternes funktionsender. Bær af sikkerhedshensyn handsker ved sortering af instrumenterne.

Når instrumenterne anbringes, mærkes en let modstand på grund af de monterede bladfjedre. Fjedrene holder instrumenterne fast i deres position og forhindrer, at de falder ud. Hvis der ikke mærkes nogen modstand, er holderen uegnet til instrumentet.

⚠ Sørg for, at instrumenterne er anbragt og fastgjort korrekt. Instrumenter, der er faldet ud under den maskinelle rengøring, skal rengøres på ny. Det samme gælder for instrumenter, hvor funktionsenderne har ligget på stiverne på indsats E 491.

- Stil den fyldte indsats E 491 ind på en ledig plads i overkurven.

⚠ Kapittelet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for rengjørings- og desinfeksjonsautomaten må absolutt følges. Klargjør bare dentalinstrumenter/medisinprodukter, som av produsenten er deklartert som mulig å klargjøre for gjenbruk maskinelt, og følg produsentens anvisninger for klargjøring. Klargjøringsprogrammet hvor termisk desinfeksjon foretrekkes, må eventuelt avstemmes til materialkvaliteten på instrumentene.

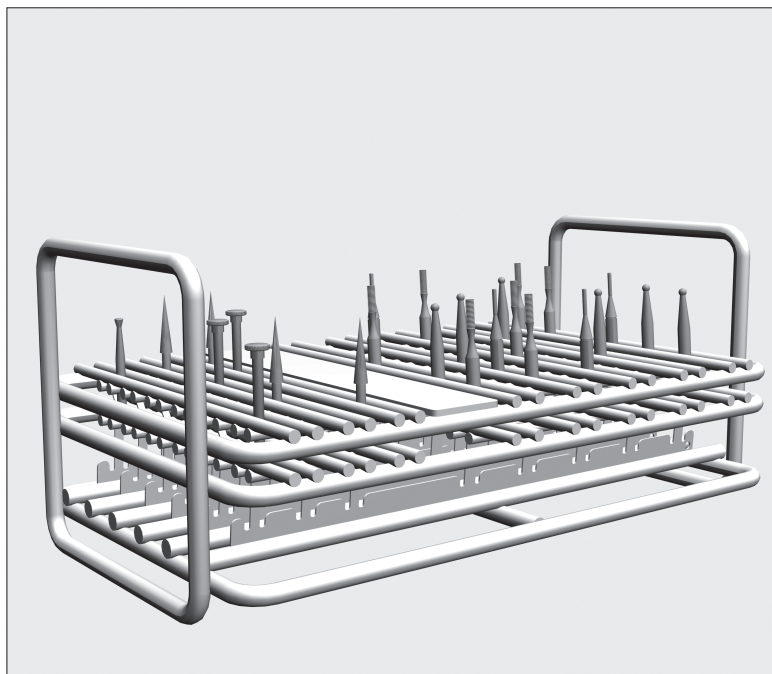

Standardlevering

Innsats E 491, H 53 mm, B 120 mm, D 70 mm.

Anvendelsesområde

Innsats E 491 brukes til klargjøring av roterende instrumenter innen dentalmedisin.

Innsats E 491 er inndelt i to soner:

- Den minste delen har plass til over 18 holdere for instrumenter som kan festes i turbiner (hver ca. 1,8 x 1,8 mm).
- Den største delen omfatter 30 holdere for instrumenter som brukes i vinkelstykker (hver ca. 2,8 x 2,8 mm).

For roterende instrumenter med komplekst hode på funksjonsdelen hhv. hardnakkede avleiringer, kan det være nødvendig med en forbehandling med ultralyd.

- Sett de roterende instrumentene til turbinene og vinkelstykkene med skaftet ned i de respektive holderne.

Funksjonsdelen på instrumentet må peke opp. Funksjonsdelen må ikke ligge inntil gitteret på innsatsen, ellers vil den ikke bli tilstrekkelig rengjort av vaskevannet. Det samme gjelder halsen på skaftet.

⚠ Fare for skade: Vær forsiktig så du ikke skader deg på funksjonsdelen til instrumentet når du setter det inn. For din egen sikkerhet; Bruk hansker ved plassering

Når du setter inn instrumentene, vil du merke en lett motstand, som kommer fra bladfjærene. Fjærene holder instrumentene på plass og forhindrer dem fra å falle ut. Hvis motstanden mangler, er holderen uegnet for instrumentet. Støttene forhindrer instrumentene i å gli.

⚠ Forsikre deg om at instrumentene er riktig plassert og festet. Instrumenter som har falt ut under klargjøring, må klargjøres en gang til. Det samme gjelder instrumenter hvor funksjonsdelen har ligget inntil støtten på innsats E 491 under den maskinelle klargjøringen.

- Når alle instrumentene er satt på plass, settes innsats E 491 på en ledig flate i en overkurv.