

Vagn E 428 för instrument för robotkirurgi

⚠ Beakta noggrant säkerhetsanvisningarna och varningarna i bruksanvisningarna för diskdesinfektorerna G 7836 och PG 8536. Rengör endast instrument/medicinprodukter vilka av tillverkaren är deklarerade som maskinellt disk- och desinfektionsbara och beakta de särskilda rengöringsanvisningarna. Vagn E 428 får endast användas tillsammans med diskprogrammet **ROBOTVARIO**. Programmet är inget standardprogram som finns i diskdesinfektorn vid leverans utan måste läggas in i efterhand i Profitronic av Miele. Vid användning av den automatiska vagnavkänningen måste koden anpassas!

I leveransen ingår:

Grundvagn E 428 med 6 hållare för instrument med skaft från robotkirurgi, höjd 518, bredd 533, djup 513 mm, utrustad med hållare för magnetlist för den automatiska vagnavkänningen och spolarmsmagneter för spolarmsövervakning.

Extra tillbehör

Magnetlist ML/2 för den automatiska vagnavkänningen

Användningsområde

I vagnen E 428 kan **endast** stela skaftinstrument på 5 och 8 mm för robotmaskiner i serierna IS 2000 och IS 3000 inom da Vinci®-kirurgisystemet rengöras med programmet ROBOTVARIO och rengöringsmedlet Mucapur ROBOTVARIO.


⚠ Annat diskgoods får inte placeras i vagnen.

⚠ Rengöringen av instrument måste ske i en endast för detta ändamål installerad diskdesinfektor. På så vis förhindras att föroreningar från andra användningsområden bildar avlagringar i de ihåliga instrumenten.

Manuell förrengöring

⚠ Förbehandling och förberedelse för den maskinella rengöringen ska ske enligt instrumenttillverkarens anvisningar.

Att göra direkt när instrumenten, fyllda med lösning efter operation, kommer till sterilcentralen:

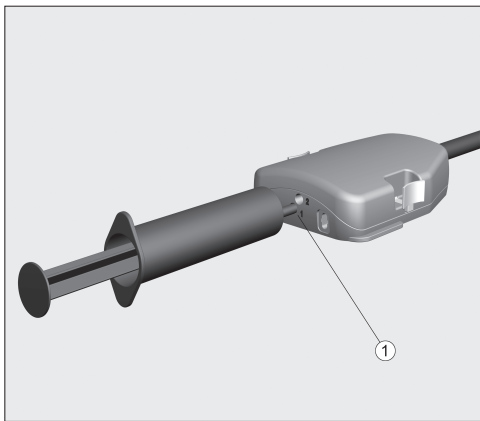


- Sug ut lösningen ur instrumentet med en spruta.
 - Spruta på nytt in treprocentig Mucapur-ROBOTVARIO-lösning med en spruta och låt den verka i 30 minuter.
- Inom denna inverknings tid på 30 minuter:
- Sug ut Mucapur-ROBOTVARIO-lösningen med en spruta och spruta in ny lösning.
 - Låt lösningen verka i fem minuter.
 - Upprepa proceduren fem gånger.

- Fortsätt sedan rengöringen av instrumenten enligt instrumenttillverkarens anvisningar.

Instrumenten, särskilt de distala funktionsdelarna, måste se rena ut vid den okulära kontrollen, innan de placeras i vagn E 428.

Placera och ansluta instrumenten

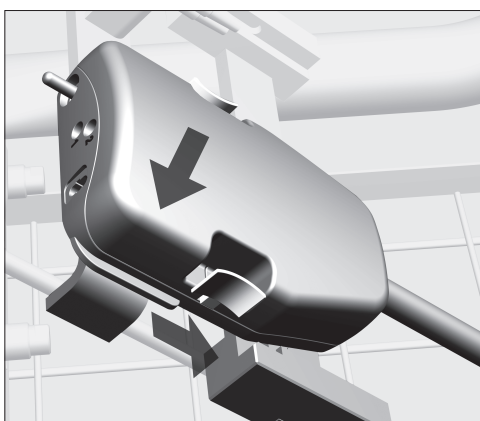

- Sätt i instrumentet ovanifrån i hållaren.


Skaftet ska ligga mellan två listplattor.

- Öppna funktionsdelarna på instrumentet.



- Sätt dubbelrörsanslutningen i instrumentets spolanslutning.

Spolöppningen på skaftet på 5 mm instrument behöver inte anslutas för maskinell rengöring.

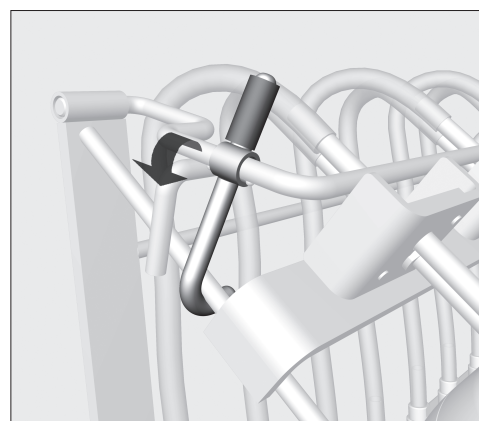

- När alla instrument är inlagda, lägg över bygeln för att säkra anslutningarna och fixera bygeln med den lilla spaken.

Vattentilledningarnas fästplåtar fixeras i sin position av bygeln. Vattentilledningar som inte används måste också placeras under bygeln.

Instrument som inte fixerats med fästplåtarna och bygeln kan inte rengöras i vagnen.

Rutinkontroll av diskeffekten

Efter sista operativa användning och den därefter följande maskinella rengöringen ska instrumenten stickprovsmässigt tas isär. För att göra detta kapar du Bowdenkablarna på styrhjulen och drar av den distala funktionsdelen. Den inre distala cylindern, i vilken Bowdenkabeln går till funktionsdelen, ska kontrolleras okulärt och med hjälp av proteinanalys.