

Käyttökohteet:

Telineessä E 427 on tilaa jopa kuudelle erikokoiselle laryngoskoopille.


Telinettä E 427 käytetään esim. seuraavissa anestesiavälineiden suorasuihkuvaunuissa:

- E 435, E 436, E 461,
- E 515, E 715, E 915.

⚠ Noudata ehdottomasti puhdistus- ja desinfiointiautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita. Käsittele laitteessa ainoastaan sellaisia laryngoskooppeja/lääkinnällisiä välineitä, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfiointin, ja noudata kunkin välineen omia puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Käytettävä puhdistus- ja desinfiointiohjelma, johon tulisi sisältyä lämpödesinfiointi, on tarvittaessa sopeutettava puhdistettavien välineiden materiaalin laatuun sopivaksi.

- Ripusta laryngoskoopin kiinnityspää telineen ylimmälle pienalle. Laryngoskoopin kieli tulee ripustaa jonkin alemman pienan varaan, kielen pituuden mukaan.
- Aseta kukin laryngoskooppi kahden pienan väliin, jolloin ne eivät kosketa toisiaan.
- Aseta teline E 427 vapaaseen tilaan AN-suorasuihkuvaunun takaosassa. Aseta teline siten, että laryngoskooppien kielet osoittavat eteenpäin tai sivusuunnassa pesutilan keskiosaa kohti. Vain tässä asennossa puhdistukselle ja desinfiointille kriittiset alueet puhdistuvat kunnolla.

⚠ Materiaalin vaurioitumisen estämiseksi laryngoskoopit saa käsitellä ainoastaan Vario TD-ohjelmalla, ja viimeisessä huuhtelussa ja desinfiointissa tulisi käyttää suoloista puhdistettua vettä.

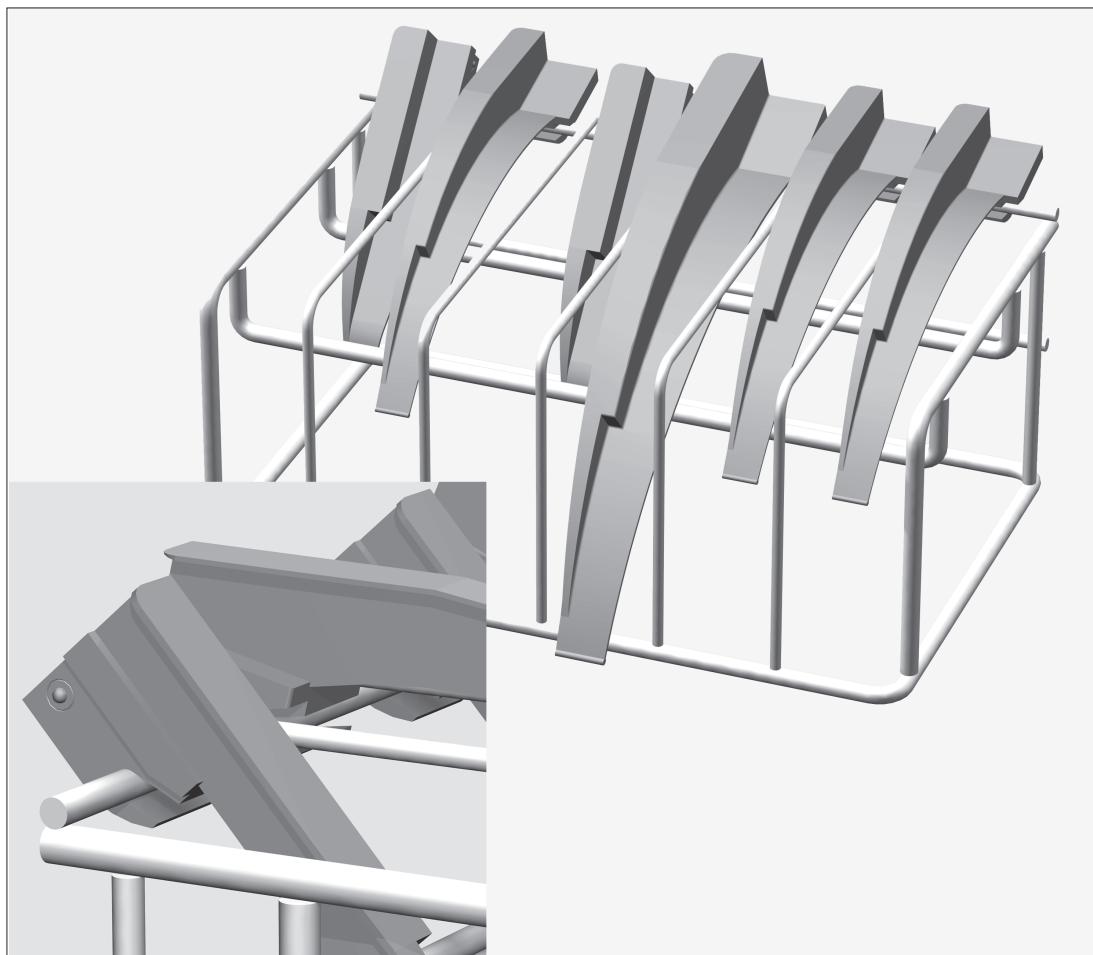

Användningsområde

Med insats E 427 kan upp till sex laryngoskop i nästan alla storlekar diskas och desinficeras.

Insats E 427 kan sättas in i injektorvagnen för anestesi-utensilier, t ex:

- E 435, E 436, E 461,
- E 515, E 715, E 915.

⚠ Läs noggrant igenom säkerhetsanvisningarna och varningarna i diskdesinfektorns bruksanvisning. Rengör endast laryngoskop/medicinprodukter vilka av tillverkaren är deklarerade som maskinellt disk- och desinfektionsbara och beakta de specifika rengöringsanvisningarna. Det diskprogram som används med termisk desinfektion måste även anpassas till medicinprodukternas materialkvalitet.

- Haka fast laryngoskopet i insatsens övre hållare med hjälp av kullåset. Laryngoskopets spatelände skall beroende på storlek ligga på en hållare längre upp.
- Sätt laryngoskopet mellan två hållare så att de inte vidrör varandra.
- Ställ insats E 427 på den fria ytan i AN-injektorvagnens bakre område. Spateländarna skall peka framåt eller åt sidan i diskutrymmet. Endast på detta sätt nås de områden som är svåra att rengöra under diskningen.

⚠ För att undvika materialproblem skall rengöringen av laryngoskop uteslutande ske med programmet Vario TD, under vilket slutsköljningen och desinfektionen bäst utförs med AD-vatten.