

### Campo de aplicación

En el complemento E 457 pueden esterilizarse, p. ej., accesorios de trabajo de hasta un máx. de 480 mm de largo, mangos ligeramente contaminados de instrumentos MIC y p. ej., cables HF. El complemento se coloca en el carro inyector para instrumentos MIC. Con el carro inyector se adjuntan las instrucciones de manejo por separado.

⚠ Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad de las instrucciones de manejo de la termodesinfectora. Para el tratamiento utilice exclusivamente instrumental/productos médicos que hayan sido declarados por el fabricante como aptos y tenga en cuenta las indicaciones específicas para el tratamiento. El programa de tratamiento utilizado, preferiblemente con desinfección térmica, deberá ajustarse a la calidad del material de los productos médicos.

Para la esterilización, los instrumentos MIC deben desmontarse cuanto se pueda. Los vástagos de los instrumentos se colocan en los manguitos de lavado del carro inyector MIC.

### Accesorios de trabajo

Los accesorios de trabajo deben estar fijados a tres puntos en los puentes del E 457. Para ello, la posición de los puentes puede ajustarse a la longitud de los accesorios de trabajo.


- Coloque ordenadamente los accesorios de trabajo en los puentes.
- Primero fije y abra aquí el extremo funcional.
- A continuación, fije los accesorios de trabajo en los otros puentes.

### Mangos

- Abra los mangos y cierre el bloqueo de rejilla, si lo hay, en el primer diente.
- Coloque los mangos en el conector para vástago hacia abajo, entre los soportes del E 457.

La altura máxima del complemento y del mango colocado depende del carro inyector utilizado. Los mangos muy sucios deben esterilizarse en los difusores del carro inyector.

En lugar de mangos, en este complemento pueden esterilizarse cables HF.

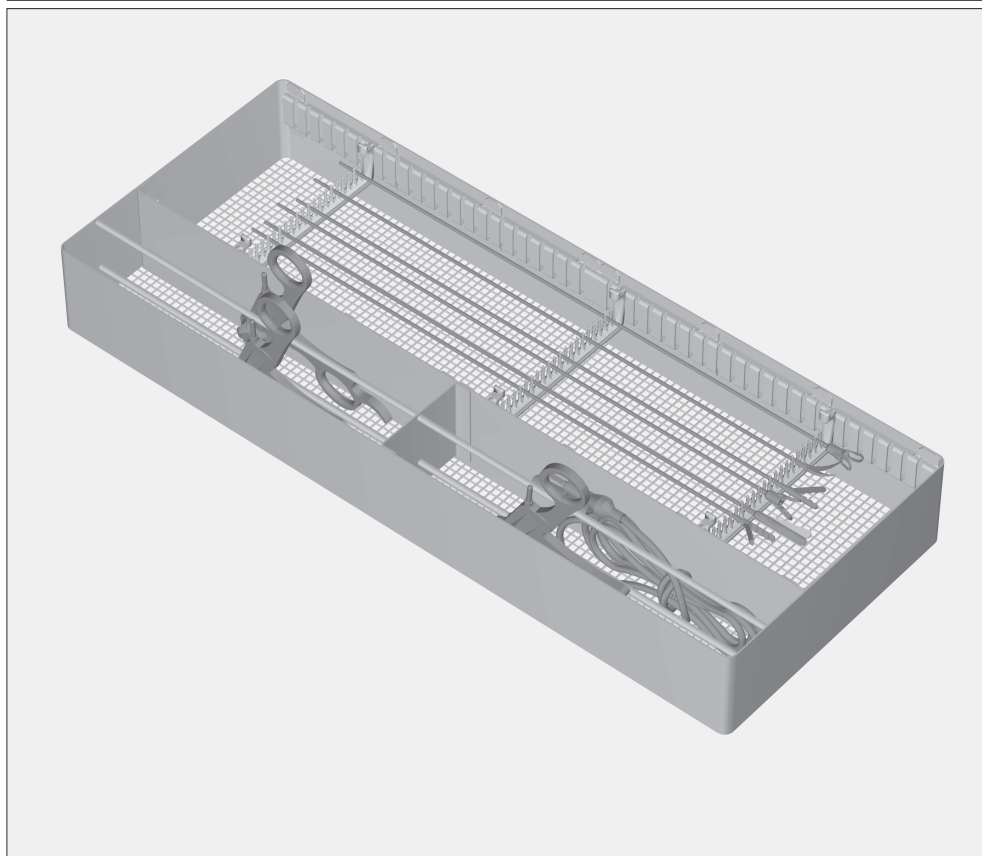

### Áreas de aplicação

No complemento E 457 podem ser lavados por ex. instrumentos até 480 mm de compr. máximo, pegas pouco sujas de instrumentos MIC e por ex. cabos HF. O complemento é colocado no carro injector para instrumentos MIC. Juntamente com carro injector são fornecidas as instruções de utilização.

⚠ Leia atentamente as medidas de segurança e precauções mencionadas no livro de instruções da máquina de lavar e desinfetar. Lave e desinfete somente instrumentos/produtos considerados dispositivos médicos que tenham a indicação do fabricante de que podem ser lavados na máquina e siga as indicações específicas. O programa de lavagem utilizado, de preferência com desinfecção térmica, deve ser adequado à qualidade do material dos produtos médicos.

Para a lavagem deve desmontar o mais possível os instrumentos MIC. As hastes dos instrumentos são encaixadas nos fixadores do carro injector dos instrumentos MIC.

### Instrumentos

Os instrumentos devem ser fixos em três pontos de fixação do E 457. Pode adaptar o posicionamento dos fixadores ao comprimento dos instrumentos.

- Colocar os instrumentos nos fixadores.
- Para isso fixe primeiro a ponta funcional e abra-a.
- Depois fixe o instrumento a outros pontos de fixação.

### Pegas

- Abrir as peças de mão, encaixar o bloqueio se existir no primeiro dente.
- As peças de mão com as hastes são colocadas voltada para baixo nos fixadores do E 457.

A altura máxima do complemento com as pegas colocadas, depende do carro injector utilizado. Pegas muito sujas devem ser lavadas encaixadas nos injectores do carro injector.

Neste complemento podem ser lavados cabos HF em vez de pegas.