

Anvendelsesområde

I indsats E 457 kan der f.eks. rengøres arbejdende dele fra et skop, f.eks. saks, på maks. 480 mm længde, let snavsede håndtag fra MIC-instrumenter og f.eks. HF-kabler. Indsatsen stilles i en injektorvogn til MIC-instrumenter. Der følger en separat brugsanvisning med injektorvognene.

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinen skal overholdes. Der må kun rengøres instrumenter/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret egnet til maskinrengøring, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet.

MIC-instrumenter skal så vidt muligt skilles ad, når de skal rengøres. Instrumenternes skafter anbringes i hylstre i MIC-injektorvognen.

Arbejdende dele

De arbejdende dele skal fastgøres 3 steder på holderne i E 457. Holdernes position kan tilpasses til længden på de arbejdende dele.


- Placer de arbejdende dele i holderne.
- Klem først funktionsenden ind, og åbn den.
- Fastgør derefter de arbejdende dele i den anden holder.

Greb

- Åbn grebene, og luk en eventuel spærring i første tand.
- Stil grebene mellem holderne i E 457 med skafttilslutningen nedad.


Den maksimale højde på indsats og greb afhænger af, hvilken injektorvogn der anvendes. Kraftigt tilsmudsede greb skal rengøres på dyser i injektorvognen.

I stedet for greb kan der rengøres HF-kabler i denne indsats.

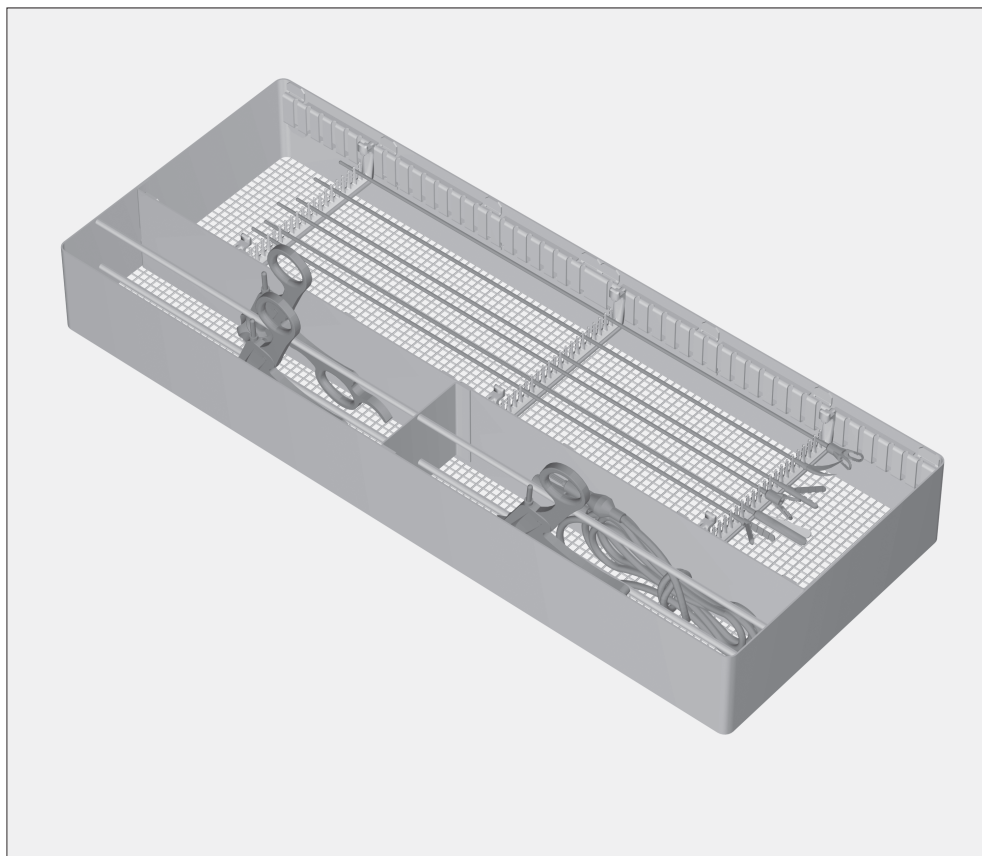

Anvendelsesområde

I innsats E 457 kan det f.eks. klargjøres arbeidsinnlegg med maks. lengde 480 mm, lite tilsmussede håndtak til MIS-instrumenter og f.eks. HF-kabel. Innsatsen plasseres i injektorvognen for MIS-instrumenter. En separat bruksanvisning er vedlagt injektorvognen.

 Kapittelet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for rengjørings- og desinfeksjonsautomaten må absolutt følges. Klargjør kun instrumenter/medisinprodukter, som av produsenten er deklart som mulig å klargjøre for gjenbruk maskinelt og følg produsentens anvisninger for klargjøring. Klargjøringsprogrammet hvor termisk desinfeksjon foretrekkes, må eventuelt avstemmes til materialkvaliteten på medisinproduktene.

Før klargjøring bør MIS-instrumentene demonteres i størst mulig grad. Instrumentskaftene plasseres i spylehylsene på MIS-injektorvognen.

Arbeidsinnlegg

Arbeidsinnlegg (selve instrumentene) bør festes i tre punkter i holderne til E 457. Holdernes posisjon kan tilpasses lengden på arbeidsinnleggene.

- Plasser arbeidsinnleggene i holderne.
- Klem inn funksjonsenden og åpne den.
- Fest deretter arbeidsinnleggene i de andre holderne.

Håndtak

- Åpne håndtakene. Hvis håndtaket er utstyrt med låsemekanisme, lås det i første hakk.
- Sett håndtak med skafttilkobling ned mellom holderne til E 457.

Maks. høyde på innsats og innstilt håndtak er avhengig av injektorvognen som brukes. Sterkt tilsmussede håndtak må klargjøres i dyser i injektorvognen.

I stedet for håndtak, kan det klargjøres HF-kabel i denne innsatsen.