

Geleverd

Tweedelig reinigingssysteem E 499,
H ca. 100 mm, Ø 23 mm.

Bestemming


Het reinigingssysteem E 499 is bestemd voor de behandeling van insufflatie-, spoel- en zuigcanules, alsmede voor zuigonderbrekers, afkomstig uit bijvoorbeeld de MIC- of KNO-discipline.



⚠ Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigungs- en desinfectieautomaat. Behandel alleen medische producten die volgens de fabrikant van die producten geschikt zijn voor machinale behandeling. Houdt u zich aan de specifieke behandelingsvoorschriften van de fabrikant. Het te gebruiken programma, met bij voorkeur thermische desinfectie, moet indien nodig op het materiaal van de producten worden afgestemd.

Montage

- Pak het bovenste gedeelte van de E 499 in het midden vast. Draai het element tot de aanslag met de wijzers van de klok mee en trek het er dan uit (naar boven). Draai niet aan de draaischijf.
- Verwijder een inspuiter of blindschroef uit de injectoreenheid van een wagen, bovenrek of module.
- Schroef het onderste gedeelte van de E 499 met de hand in de vrije positie of de vrije siliconen houder.
- Steek de beide gedeelten van de E 499 weer in elkaar. Draai vervolgens het bovenste element tegen de wijzers van de klok in (tot de aanslag).

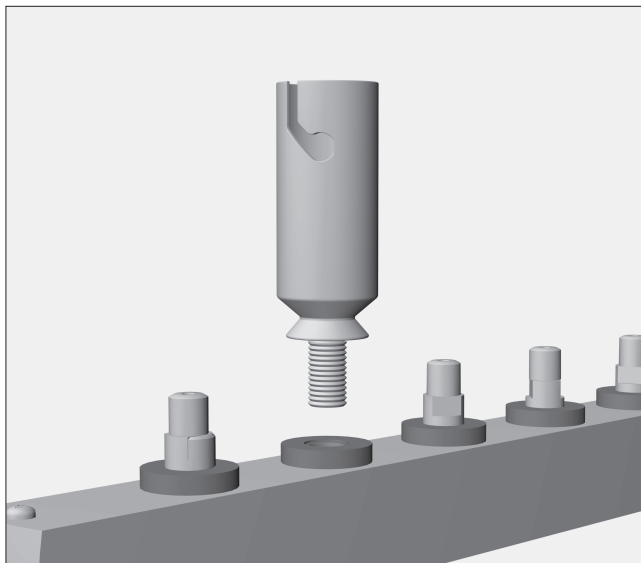

Mogelijk moeten voor het eerste gebruik eerst de prestaties van de wagen, het bovenrek of de module worden gecontroleerd.

Als u meerdere E 499 tegelijk in een wagen, bovenrek of module wilt gebruiken, moet worden nagegaan of het gewenste aantal in het kader van de validatie is toegestaan. Houdt u zich altijd aan het maximale aantal dat bij de validatie is vastgelegd.

Toepassing

- Haal indien mogelijk de zuig- en spoelcanules volgens de aanwijzingen van de fabrikant uit elkaar en open eventuele kranen en/of kleppen.
- Voer bij grove verontreinigingen eerst een voorreiniging uit.

⚠ Voor de behandeling moet zijn gewaarborgd dat de lumina/de kanalen goed doorgespoeld kunnen worden.

- Pak het bovenste gedeelte van de E 499 in het midden vast. Draai het element tot de aanslag met de wijzers van de klok mee en trek het er dan uit (naar boven). Draai niet aan de draaischijf.
- Plaats de te behandelen canule ① in het onderste gedeelte.
- Kies met de draaischijf op het bovenste gedeelte de kleinste mogelijke opening ②.

De opening mag niet te groot zijn, zodat de canule tijdens de behandeling goed wordt doorgespoeld.

- Steek de beide gedeelten van de E 499 voorzichtig in elkaar ③. Steek de canule door de gekozen opening (zie afbeeldingen). De aansluiting, alsmede eventuele kleppen en zuigonderbrekers zijn zo in het reinigingssysteem ingekapseld.

⚠ De canules mogen niet boven de randen van de wagens, bovenrekken en modules uitsteken om beschadigingen bij het inschuiven in de reinigings- en desinfectieautomaat te vermijden.

- Draai vervolgens het bovenste gedeelte van de E 499 tegen de wijzers van de klok in (tot de aanslag).

⚠ Het reinigingssysteem is alleen correct vergrendeld als het bovenste gedeelte van de E 499 tot de aanslag is aangedraaid (tegen de wijzers van de klok in). Anders kan de spoeldruk de beide helften uit elkaar drukken en kan het spoelgoed beschadigd raken.

- Controleer voor en na de behandeling of de vergrendeling correct is.

