

⚠ Leia atentamente as medidas de segurança e precauções mencionadas no livro de instruções da máquina de lavar e / desinfectar G 7836 ou PG 8536. Lave e desinfecte somente instrumentos/produtos considerados dispositivos médicos que tenham a indicação do fabricante de que podem ser lavados na máquina e siga as indicações específicas. O programa de lavagem utilizado, de preferência com desinfecção térmica, deve ser adequado à qualidade do material dos produtos considerados dispositivos médicos. A última enxaguagem deve ser sempre efectuada com água desmineralizada. Ao utilizar o reconhecimento automático do carro a codificação deve ser adaptada.

Fornecimento:

Carro base E 474/1 com módulos para colocação de instrumentos MIC de bloco operatório. A 507, L 535, P 515 mm.

Acessórios fornecidos junto

- 6 tampões roscados E 362
- 3 E 447, adaptadores Luer-Lock ♀ para Luer-lock ♂

Áreas de aplicação:

No carro podem ser colocados no máx. três módulos para instrumentos MIC. Cabos de fibra óptica e tubos de sucção podem ser lavados no máx. em três complementos E 444, os respectivos fixadores encontram-se na zona frontal do carro. Para a lavagem do interior dos tubos de sucção ou das ligações de instrumentos mais longos existem possibilidades de ligação. Adicionalmente podem ser colocados por trás dos módulos complementos especiais para ópticas. Seringas para bexigas podem ser colocados na zona posterior do carro.

Efectue um controle ao carregar/antes de iniciar o programa:

- as tampas fecho da entrada de água para os diversos módulos estão em funcionamento
- os diversos módulos estão correctamente ligados à conduta de entrada de água do carro.
- o carro introduzido na máquina está bem acoplado à ligação de entrada de água da máquina de lavar e desinfectar?


⚠ Para que todos os dispositivos de lavagem apresentem uma pressão de lavagem padronizada, é necessário que os diversos conjuntos aparafusáveis sejam equipados com injectores, adaptadores, bicos de aspersão ou tampões roscados. Não é permitido utilizar dispositivos de lavagem danificados como sejam os injectores, adaptadores ou bicos de aspersão.

Dispositivos de lavagem não ocupados não necessitam de ser substituídos por tampões roscados.


Coloque os instrumentos tal como mostra a figura.

⚠ Os instrumentos MIC devem ser desmontados de acordo com as indicações do fabricante para serem lavados. Instrumentos estreitos com haste/cabo não desmontáveis devem ser pré-lavados de acordo com o indicado pelo fabricante.

⚠ Antes de ligar os instrumentos ocos deve ficar assegurada a passagem de água através dos canais lumen estreito. Os instrumentos não devem entrar em contacto uns com os outros durante a lavagem e desinfecção.

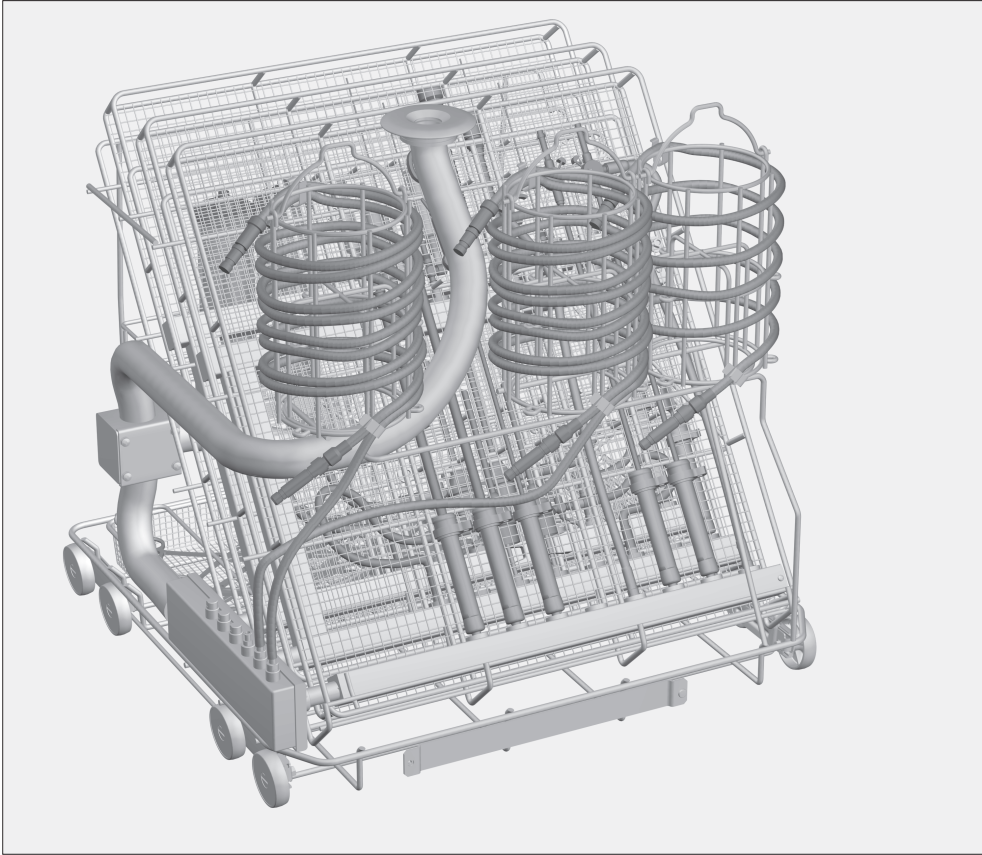

⚠ No nível inferior do carro não deve colocar instrumentos que tapem a superfície ou colocar caixas sobrecarregadas porque a água não atinge toda a superfície e não ficam lavados correctamente.

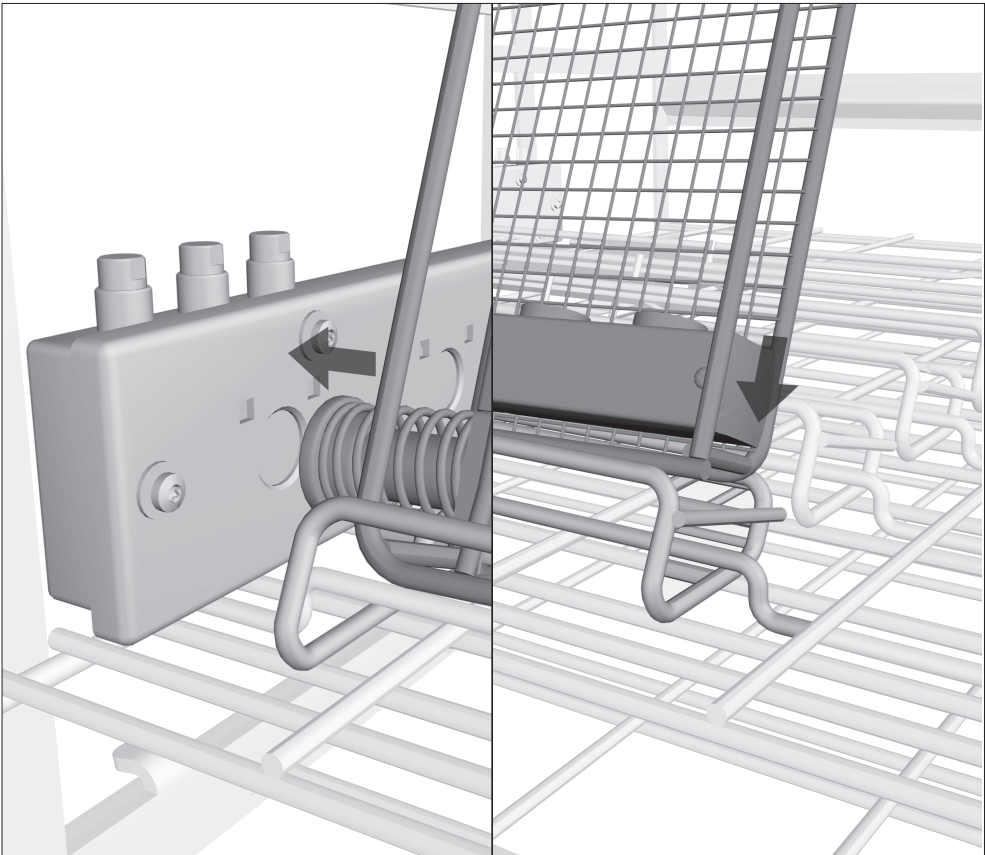


Colocar os módulos no carro

- Encaixar a conduta de água do módulo no acoplamento do carro modular, a tampa de fecho é pressionada.
- Pressionar o módulo por trás do gancho de fixação da moldura.

Carro E 474/4 para módulos MIC

Miele
PROFESSIONAL

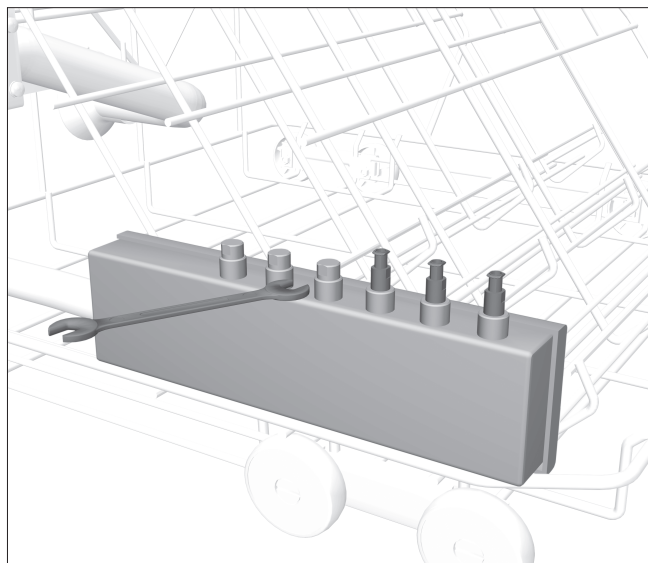

Encaixar os bicos injectores e adaptadores Luer-Lock


No lado esquerdo do carro encontram-se seis ligações para injectores, adaptadores de mangueiras ou mangueiras de sucção.

- Desaparafusar os tampões roscados das ligações utilizando uma chave de bocas SW 9.
- Aparafusar os adaptadores Luer-Lock-ou bicos injectores nas ligações e fixar com uma chave de bocas.




Cabos de fibra óptica e tubos de sucção

Os cabos de fibra óptica e tubos de sucção são colocados no complemento E 444 (acessório não faz parte do fornecimento). Juntamente com o complemento são fornecidas as instruções de utilização.

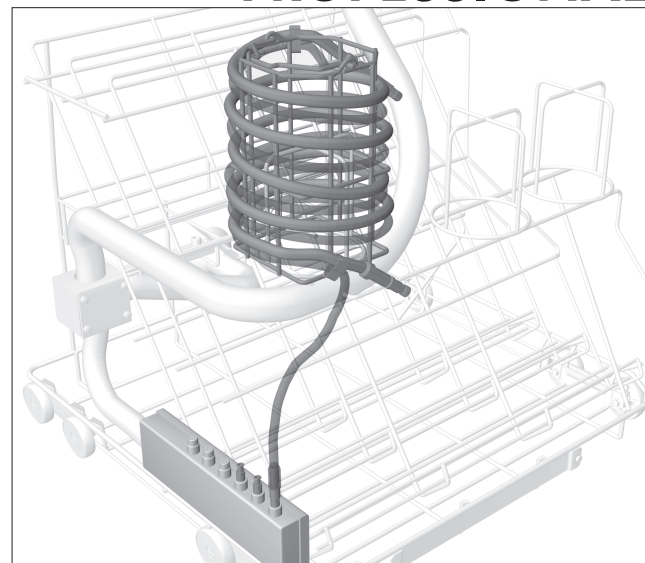

- Encaixar o complemento E 444 no encaixe do carro.
- Ligar a ponta da mangueira de aspiração no adaptador correspondente ao lado do carro para que a água entre nos lumen de baixo para cima.


A ponta do cabo de fibra óptica ou do tubo de sucção não pode ficar presa pelo carro ou pela porta da máquina de lavar e desinfetar.

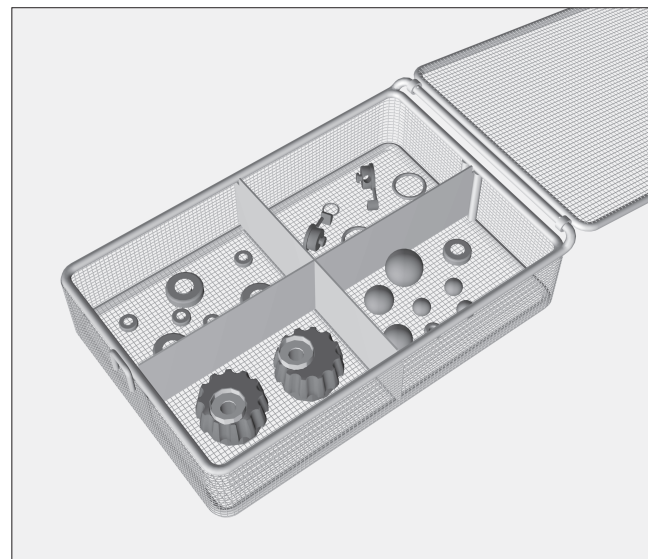

Peças soltas


Colocar peças pequenas como por ex. vedantes e torneiras no cesto em rede com tampa E 451 (acessório não faz parte do fornecimento).

- Colocar o cesto em rede no nível inferior do carro.

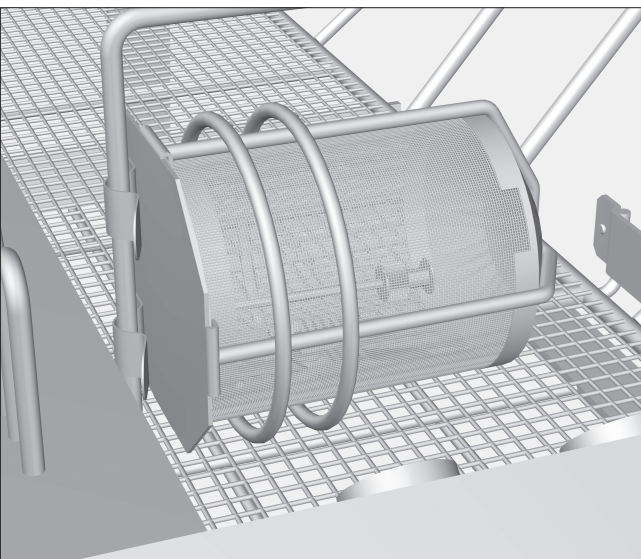

Fixar as peças pequenas, que possam sair através da rede ou pelas ranhura entre o cesto e a tampa, por ex. no complemento E 473/1 (acessório não faz parte do fornecimento).


- Fixar o complemento E 473/1 a uma barra do carro.

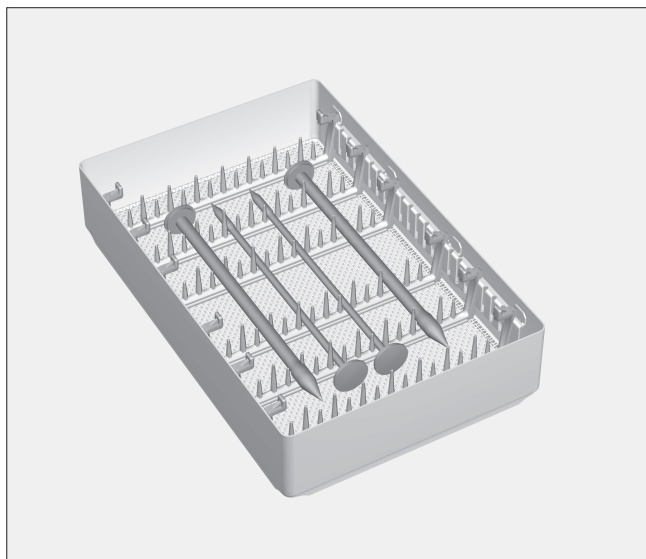

Trokar sem lumen

Trokar sem lumen ou instrumentos Micro podem ser colocados no complemento E 441/1 (acessório não faz parte do fornecimento).


- Pressionar os Trokar nos fixadores.
- Colocar o complemento no nível inferior do carro.

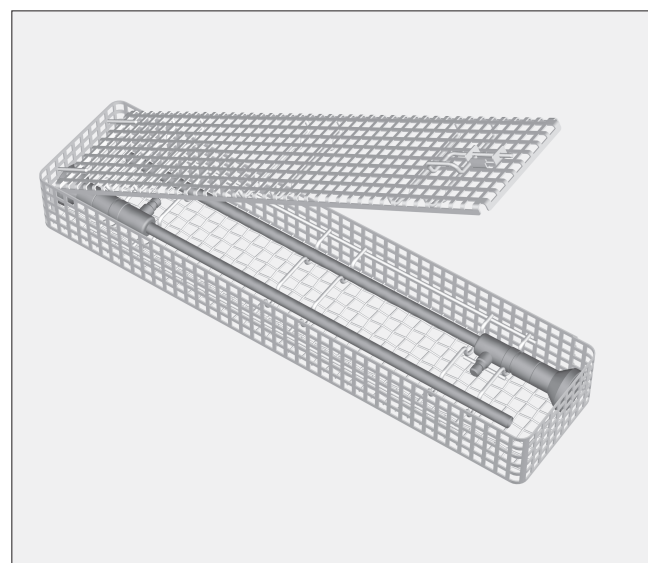

Ópticas

⚠ As ópticas só podem ser lavadas nos complementos do respectivo fabricante ou no complemento especial E 460 (acessório não faz parte do fornecimento) para as proteger de danos.

- Colocar o complemento com as ópticas no carro.

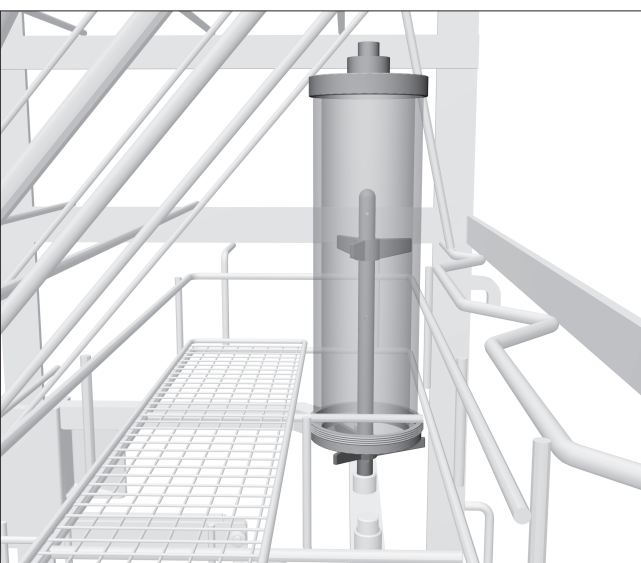

Seringas para bexigas

Para efectuar a lavagem de seringas para bexigas podem ser utilizados os injectores E 454 em conjunto com os apoios de plástico (acessório E 903/1, não faz parte do fornecimento).

Para isso:

- Desaparafusar os tampões roscados da zona posterior do carro utilizando uma chave de bocas SW 9.
- Aparafusar os injectores E 454 nas ligações e apertar correctamente utilizando uma chave de bocas.
- Encaixar os apoios de plástico nos injectores, primeiro os maiores.
- Colocar o cilindro de vidro da seringa no apoio.