



⚠ Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Gebrauchsanweisung des Reinigungs-/ Desinfektionsautomaten. Bereiten Sie ausschließlich Utensilien/Medizinprodukte auf, die von ihrem Hersteller als maschinell wiederaufbereitbar deklariert sind und beachten Sie dessen spezifische Aufbereitungshinweise. Das verwendete Aufbereitungsprogramm mit bevorzugt thermischer Desinfektion muss gegebenenfalls auf die Materialqualitäten abgestimmt sein.

Anwendungsgebiet:

Der Unterkorb U 167 ist einsetzbar in den Reinigungs- und Desinfektionsautomaten G 7882, G 7882 CD, G 7892, G 7835, G 7836, PG 8535 und PG 8536. Atemkalkbehälter und Sekretgefäße aus dem Bereich der Anästhesie bzw. der Intensivpflege können gereinigt, desinfiziert und getrocknet werden.

⚠ Atemkalkbehälter und Sekretgefäße müssen vorentleert werden, vorhandener Atemkalk muss vollständig entfernt sein.

Die Übersicht des Unterkorbes zeigt die Anordnung des Spülgutes zwischen bzw. auf den Halterungen.

- Atemkalkbehälter wenn erforderlich auseinander nehmen und die Zylinder in den Ecken des Unterkorbes jeweils zwischen vier Halterungen stellen.
- Sekretgefäße auf die Halterungen in der Mitte des Unterkorbes stecken, damit die Sprühstrahlen den Gefäßboden erreichen. Bei hartnäckigen Antrocknungen kann ein Vorreinigen oder -einweichen erforderlich sein.

⚠ Die zulässige Trocknungstemperatur beachten, um vorzeitige Materialalterung zu vermeiden. Die Verwendung von Klarspüler kann bei Kunststoffgefäßen zu Spannungsrisskorrosion führen