

⚠ Lisez les prescriptions de sécurité et les mises en garde dans le mode d'emploi de votre laveur-désinfecteur. Ne traitez en machine que les instruments et les produits médicaux qui ont été déclarés adaptés à un traitement en laveur-désinfecteur par leurs fabricants. Le programme de traitement en machine utilisé avec, de préférence, une désinfection thermique doit le cas échéant être adapté à la qualité des matériaux des produits médicaux. Le dernier rinçage doit dans la mesure du possible toujours être effectué avec d'eau déminéralisée.
En cas d'utilisation de l'identification automatique des chariots, le codage doit être adapté !

Pièces fournies :

Chariot E 327/1 avec deux niveaux, H 502, L 535, P 515 mm, avec support pour barrette d'aimants d'identification automatique de chariot (G 7835, G 7836, PG 8535 et PG 8536) et aimants de bras de lavage nécessaires au contrôle des bras de lavage (PG 8535 et PG 8536 uniquement).

accessoires en option

- Barrette d'aimants pour l'identification automatique de chariots (ML/2)
- Complément à mailles DIN E 142
- Complément pour micro-instrumentation E 476
- Complément E 473 pour toutes petites pièces



Applications :

Le chariot E 327/1 peut être utilisé dans les laveurs-désinfecteurs G 7882, G 7882 CD, G 7892, G 7835, PG 8535, G 7836 et PG 8536.

Il permet de nettoyer et de désinfecter les instruments chirurgicaux dans 4 compléments à mailles DIN. Deux compléments à mailles DIN peuvent être rangés sur chaque niveau.

Hauteur de chargement (numération depuis le bas) [H x L x P en mm]


Niveau 1 112 x 520 x 510

Niveau 2 105 x 512 x 480


Avant chaque chargement / démarrage de programme, vérifiez si :

- les bras de lavage tournent sans problème,
- les ouvertures des buses des bras de lavage ne sont pas bouchées,
- le chariot est correctement couplé à l'arrivée d'eau du laveur-désinfecteur.

Respectez toujours les modèles de chargement validés.

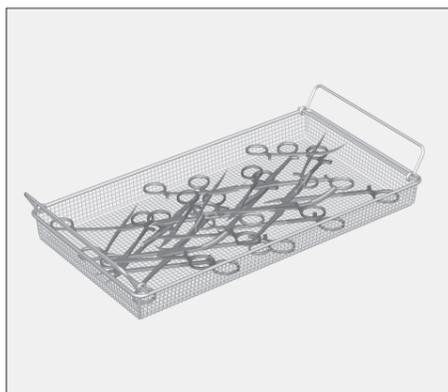


- Les instruments à articulations doivent être déposés dépliés dans les compléments à mailles.

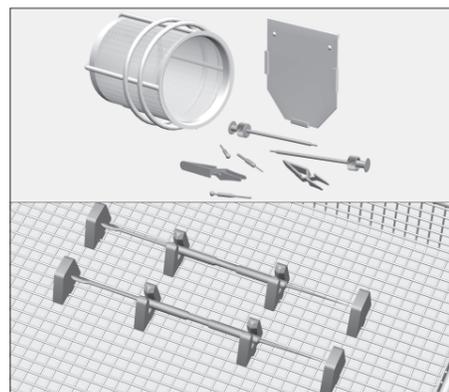

- Les instruments légers tels que certaines pinces ou les petits éléments pouvant être facilement être renversés par le bain, doivent être maintenus par les logements en silicone comme le E 473 ou les compléments pouvant être fermés comme le E 476.

- Les récipients comme les boîtes, les bechers, les haricots doivent être rangés avec l'ouverture vers le bas de façon à ne pas gêner et à ne pas être renversés.

Si des récipients creux sont rangés avec l'ouverture vers le haut, l'eau risque d'être prise au piège et les résultats de lavage risquent d'être altérés.

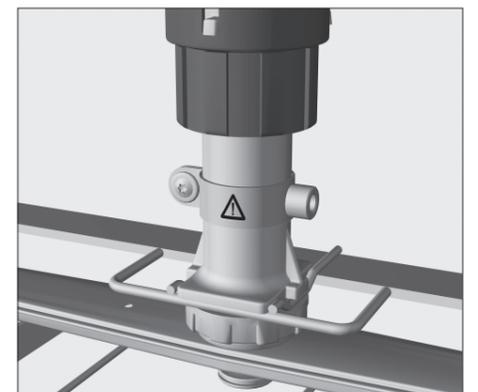

Accès de mesure pour la mesure de la pression de balayage dans le cadre de contrôles d'efficacité et de validation conformément à la norme DIN EN ISO 15883

- Pour les mesures de pression de balayage remplacer la vis de fermeture par un adaptateur Luer Lock par exemple E 447.

⚠ Il ne faut en aucun cas relier des instruments etc. à l'accès de mesure !

⚠ Rispettare scrupolosamente le indicazioni sulla sicurezza e le avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso del termodisinfettore. Trattare esclusivamente strumenti e altri dispositivi medici dichiarati riutilizzabili e ritrattabili dal loro produttore e attenersi alle indicazioni specifiche per il trattamento da questo fornite. Per il trattamento utilizzare un programma di disinfezione preferibilmente termica assicurandosi che sia compatibile con la qualità dei materiali di cui sono composti i dispositivi medici. L'ultimo risciacquo deve avvenire possibilmente sempre con acqua demineralizzata. Se si usa il sistema di riconoscimento automatico del carrello, assicurarsi che la codifica sia adeguata!

Dotazione:

Carrello base E 327/1 con due ripiani, H 502, L 535, P 515 mm, con supporto per listello magnetico destinato al riconoscimento automatico (AWK) (G 7835, G 7836, PG 8535 e PG 8536) e magneti sul braccio irroratore per il controllo della rotazione del braccio (solo PG 8535 e PG 8536)

Accessori su richiesta

- Listello ML/2 (per magneti) per il riconoscimento automatico del carrello
- cestino DIN E 142
- Fermi per microstrumenti E 476
- Inserto per minuteria E 473



Ambito di applicazione:

Il carrello E 327/1 può essere usato nei termodisinfettori G 7882, G 7882 CD, G 7892, G 7835, PG 8535, G 7836 e PG 8536.

Esso consente di lavare e disinfettare strumentario OP in 4 cestini DIN. Su ogni ripiano possono essere sistemati due cestini DIN.


Misure di carico (numerazione dei livelli dal basso) [H x L x P in mm]

Ripiano 1	112 x 520 x 510
Ripiano 2	105 x 512 x 480


Quando si carica il carrello, prima di avviare il programma controllare sempre:

- che i bracci irroratori possano ruotare senza impedimenti,
- che gli ugelli dei bracci irroratori siano puliti e non ostruiti,
- che i carrelli inseriti nella vasca siano correttamente accoppiati agli afflussi acqua del termodisinfettore.

Per le convalide, attenersi sempre ai modelli di carico.

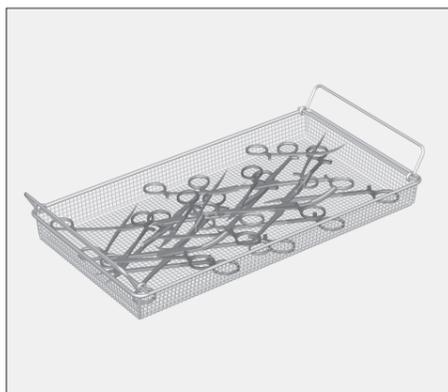


- Gli strumenti a snodo devono essere disposti aperti nelle bacinelle (per ridurre al minimo le superfici che si coprono).

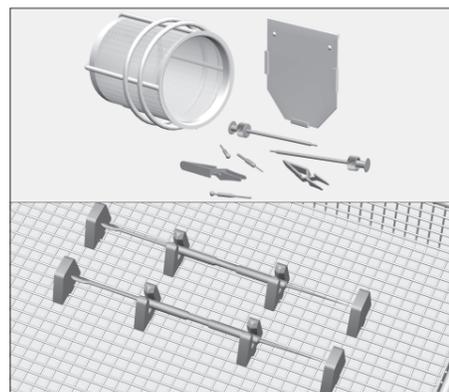

- Strumenti leggeri come le pinze bulldog o componenti di piccole dimensioni, che possono essere ribaltati dai getti d'acqua, devono essere sistemati in inserti che possano essere chiusi, come l'E 473 o fissati nei fermi in silicone E 476.

- I contenitori, ad es. barattoli, becher, bacinelle reniformi devono essere disposti nel carrello con l'apertura rivolta verso il basso e possibilmente nel ripiano superiore in modo che non impediscano il lavaggio degli strumenti e non vengano ribaltati dai getti d'acqua.

Se i contenitori vengono sistemati con l'apertura verso l'alto, l'acqua del lavaggio può essere trascinata in altre fasi del programma e il risultato finale del risciacquo può essere pregiudicato.

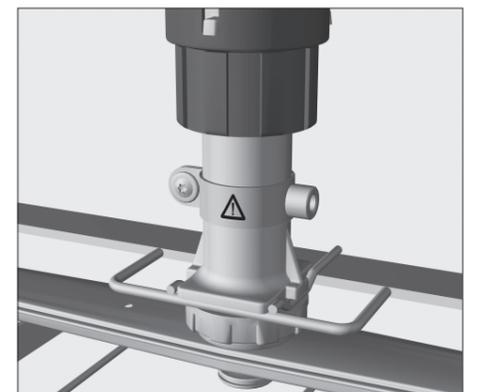

Accesso per la misurazione della pressione di lavaggio, ad es. per verifiche delle prestazioni e convalide ai sensi della norma DIN EN ISO 15883.

- Per misurare la pressione di lavaggio, sostituire la vite di chiusura con un adattatore Luer-Lock, ad es. E 447.

⚠ Non allacciare mai, per nessun motivo, a questo accesso strumenti, listelli di lavaggio ecc.