

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinen skal overholdes. Der må kun rengøres instrumenter/ medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret egnet til maskinopvask, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet. Det sidste skyl bør så vidt muligt altid foretages med totalt afsaltet vand.
Ved anvendelse af automatisk vognidentifikation skal kodningen være tilpasset!

Leveringen omfatter:

Grundvogn E 327/1 med to etager, H 502, B 535, D 515 mm, med holder til magnetlisten til automatisk vognidentifikation (G 7835, G 7836, PG 8535 og PG 8536) og spulearmsmagneter til spulearmsovervågning (kun PG 8535 og PG 8536)

Ekstraudstyr

- Magnetliste ML/2 til automatisk vognidentifikation
- DIN trådkurv E 142
- Holdere til mikroinstrumenter E 476
- Indsats til smådele E 473



Anvendelsesområde:

Vogn E 327/1 kan anvendes i rengørings- og desinfektionsmaskinerne G 7882, G 7882 CD, G 7892, G 7835, PG 8535, G 7836 og PG 8536.


I denne kan OP-instrumenter rengøres og desinficeres i 4 DIN-trådkurve. Der kan anbringes to DIN-trådkurve på hver etage.

Indfyldningsmål (etagenummerering nedefra)	[H x B x D i mm]
1. etage	112 x 520 x 510
2. etage	105 x 512 x 480


Kontroller ved hver fyldning/inden hver programstart:

- om spulearmene kan drejes frit,
- om dyseåbningerne i spulearmene er rene/fri for tilstopninger,
- om de indskubbede vogne er koblet rigtigt til rengørings-/desinfektionsmaskinens vandforsyning.

Overhold altid det påfyldningseksempel, der er fastlagt i valideringen.

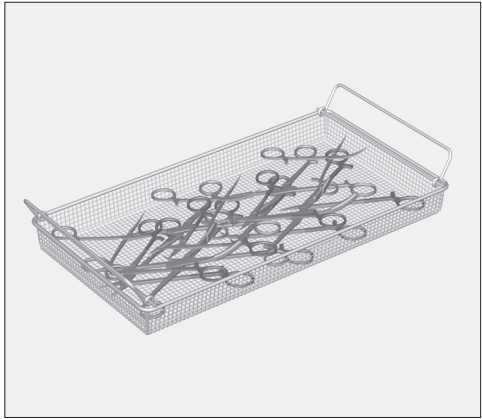


- Leddelte instrumenter skal anbringes i trådkurvene i åben tilstand (minimering af den flade, der er dækket).

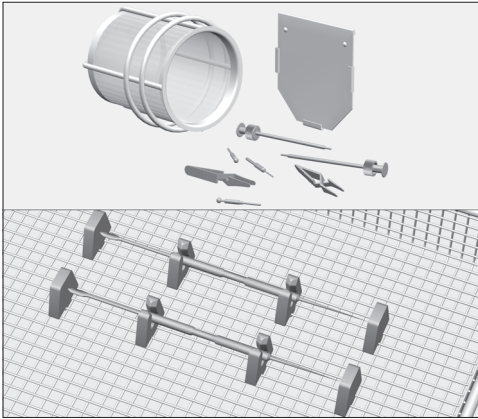

- Lette instrumenter såsom bulldogklemmer eller smådele, som let kan kastes omkring af skyllemekanikken, sikres med lukbare indsatser som f.eks. E 473 eller silikoneholdere som f.eks. E 476.

- Beholdere, f.eks. dåser, bægre og nyreskåle, anbringes i vognen med åbningen nedad (så vidt muligt på øverste etage), således at de ikke hindrer rengøringen af instrumenterne og ikke væltes om af skyllemekanikken.

Hvis hule beholdere anbringes med åbningen opad, sker der en medrivning af skyllevand, hvilket kan forringe klarskylresultatet.

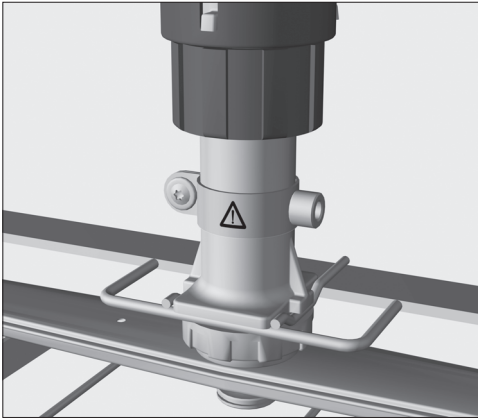

Måleadgang til måling af spuletryk, f.eks. ved effektkontroller og valideringer iht. DIN EN ISO 15883

- Til spuletryksmålninger udskiftes lukkeskruen med en luer-lock-adapter, f.eks. E 447.

⚠ Der må under ingen omstændigheder tilsluttes instrumenter, spulelister etc. til målestedet!


⚠ Kapitlet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for rengjørings- og desinfeksjonsautomaten må absolutt følges. Klargjør bare instrumenter/medisinprodukter, som av produsenten er deklartert som mulig å klargjøre for gjenbruk maskinelt, og følg produsentens anvisninger for klargjøring. Klargjøringsprogrammet hvor termisk desinfeksjon foretrekkes, må eventuelt avstemmes til materialkvaliteten på medisinproduktene. Den siste skyllingen skal helst skje med demineralisert vann. Ved bruk av automatisk vogngjenkjenning må kodingen være tilpasset!

Standardlevering:

Grunnvogn E 327/1 med to nivåer, H 502, B 535, D 515 mm, med holder for magnetlist for automatisk vogngjenkjenning (G 7835, G 7836, PG 8535 og PG 8536) og spylearmmagneter for spylearmovervåkning (kun PG 8535 og PG 8536)

Tilleggsutstyr

- Magnetlist ML/2 for automatisk vogngjenkjenning
- E 142 DIN-instrumentrist
- E 476 holdere for mikroinstrumenter
- E 473 innsats for smådeler

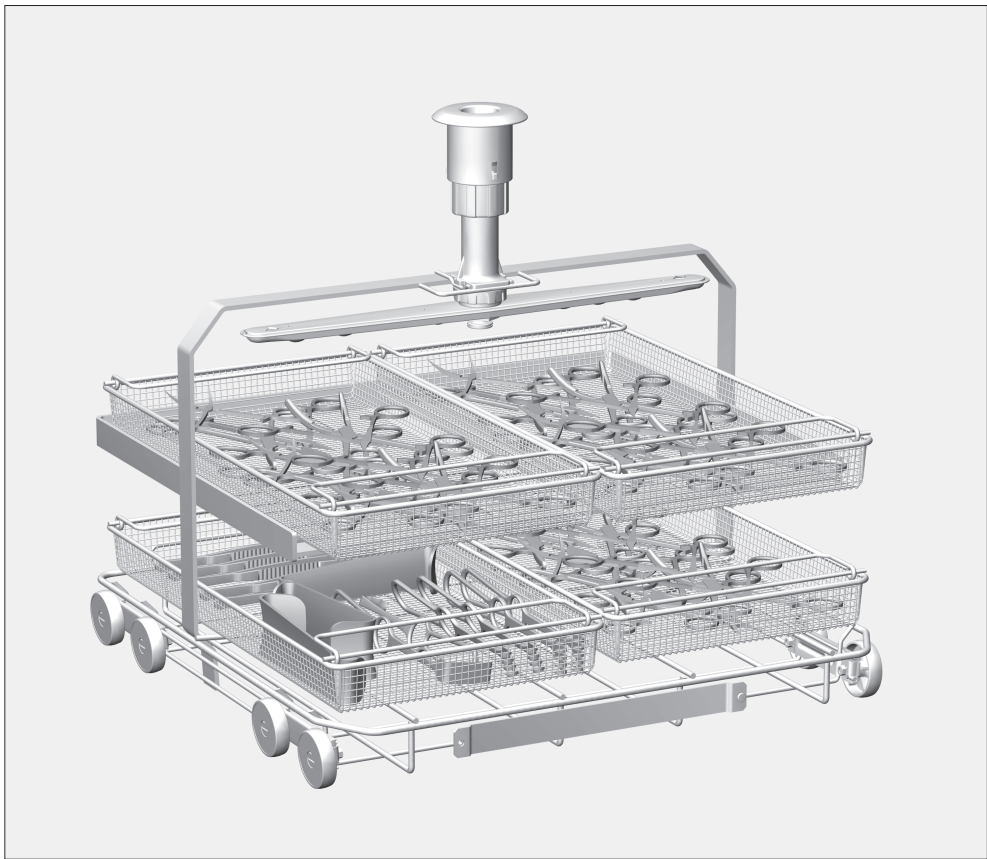

Anvendelsesområde:

Vognen E 327/1 kan brukes i rengjørings- og desinfeksjonsautomatene G 7882, G 7882 CD, G 7884, G 7892, G 7835, PG 8535, G 7836 og PG 8536.


Den muliggjør rengjøring og desinfeksjon av OP-instrumenter i 4 DIN-instrumentrister. 2 DIN-instrumentrister kan plasseres i hvert nivå.

Plasseringshøyde (nivånummerering nedenfra)	[H x B x D i mm]
Nivå 1	112 x 520 x 510
Nivå 2	105 x 512 x 480


Kontroller ved plasseringen/før hver programstart:

- kan spylearmene rotere fritt,
- er dyseåpningene i spylearmene rene/uten tilstoppinger,
- er de vognene som er skjøvet inn riktig koblet til rengjørings-/desinfeksjonsautomatens vannforsyning.

Overhold alltid det plasseringsmønsteret som er fastsatt innenfor valideringen.

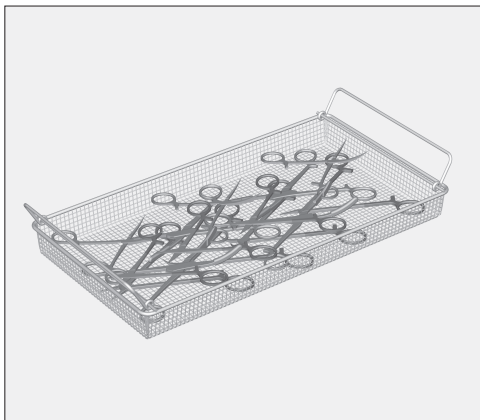


- Leddete instrumenter skal være åpne i instrumentristene.

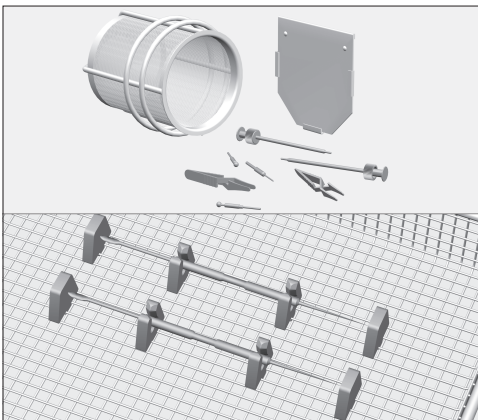

- Lette instrumenter, f.eks. bulldogklemmer eller smådeler som lett kan bli kastet rundt under vaskingen, kan sikres med innsatser med lokk, f.eks. E 473/1 eller silikonholdere, f.eks. E 476.

- Boller, pussbekken skal plasseres med åpningen ned og helst i nivå 2, slik at de ikke hindrer rengjøringen av instrumentene og ikke blir snudd under vaskingen.

Hvis boller og pussbekken blir plassert med åpningene oppover, vil dette påvirke vaskevannets bevegelse i maskinen og etterskylingsresultatet kan bli dårligere.

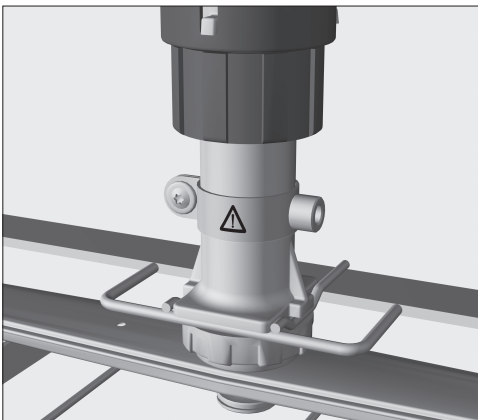

Adgang for måling av spyletrykket f.eks. for effektkontroller og valideringer iht. DIN EN ISO 15883

- For måling av spyletrykket, må låseskruen byttes ut med en Luer-Lock adapter, f.eks. E 447.

⚠ Det er ikke tillatt å koble instrumenter eller spylelister til målestedet!