

Complementos para biberones E 135

Miele
PROFESSIONAL


! Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad de las instrucciones de manejo de la termodesinfectora. Para el tratamiento utilice exclusivamente biberones que hayan sido declarados por el fabricante como retratables y tenga en cuenta sus indicaciones. El programa de tratamiento utilizado, preferiblemente con desinfección térmica (p. ej. A₀ 600), con procedimiento Vario, deberá ajustarse a la calidad del material de los productos médicos. La temperatura de limpieza podrá ajustarse a 65°C a fin de mejorar los resultados, ya que las proteínas de la leche se desnaturalizan a altas temperaturas. Los productos de limpieza de altamente alcalinos pueden afectar y dañar las graduaciones. Observe las recomendaciones del Servicio Post-venta.

Complementos para biberones:

E 135 con tapa, para 19 biberones de 250 ml, H 194, B 192, T 447 mm
E 135/1 con tapa, para 19 biberones de 110 ml, H 133, B 192, T 447 mm
E 135/2 con tapa, para 19 biberones de 90 ml, H 123, B 192, T 447 mm
E 135/3 con tapa, para 19 biberones de 120 ml, H 133, B 192, T 447 mm




Accesorios especiales que no forman parte del suministro:

Complemento E 364 para 36 tetinas de boca ancha
Complemento E 458 para 36 tetinas roscadas
Jaula de malla metálica E 142 para tapones de biberones
Tapa A 16 para cerrar la jaula de malla metálica E 142

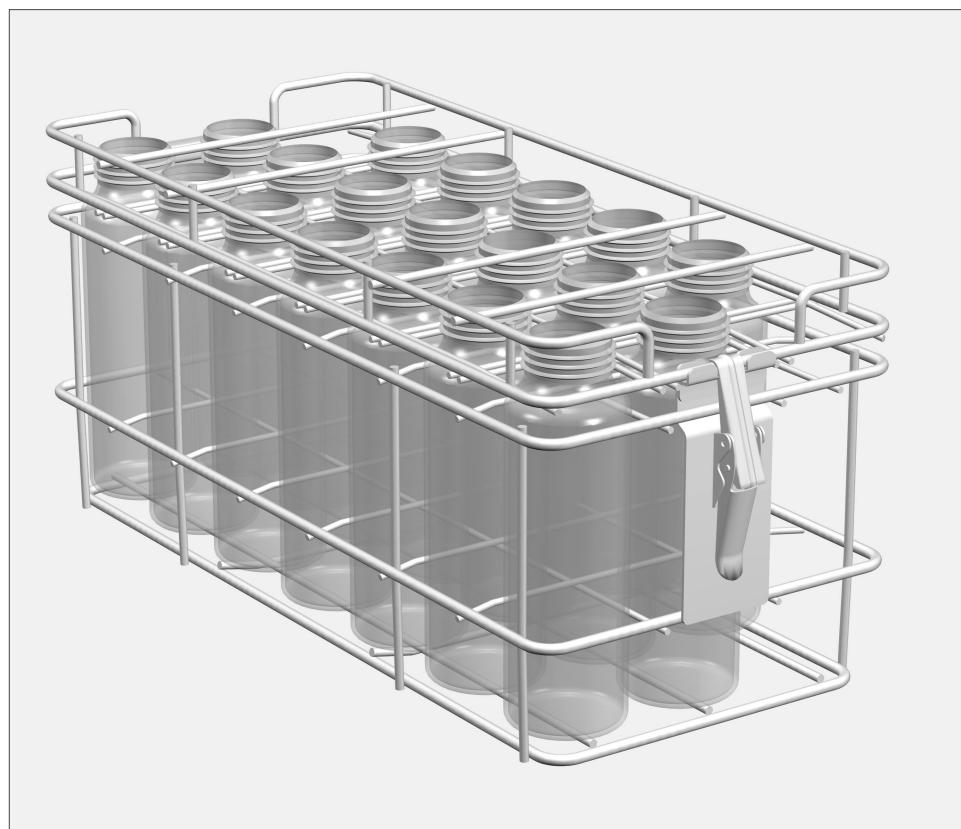

Campo de aplicación:

Con los complementos E 135 pueden lavarse y desinfectarse 19 biberones. Pueden disponerse en cestos superiores e inferiores así como en carros vacíos, p. ej. E 935-3, E 735-3 o E 555.

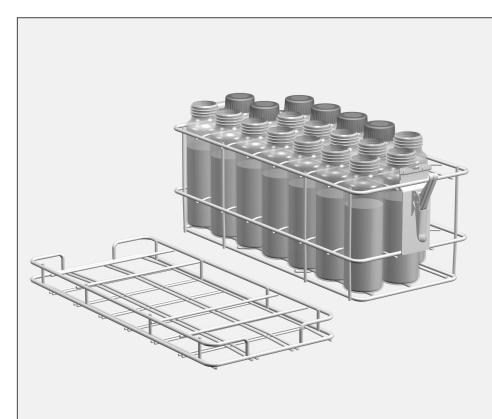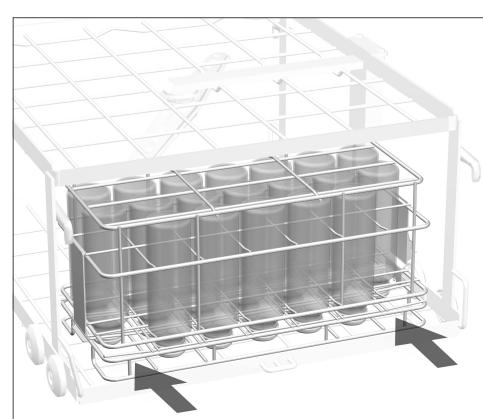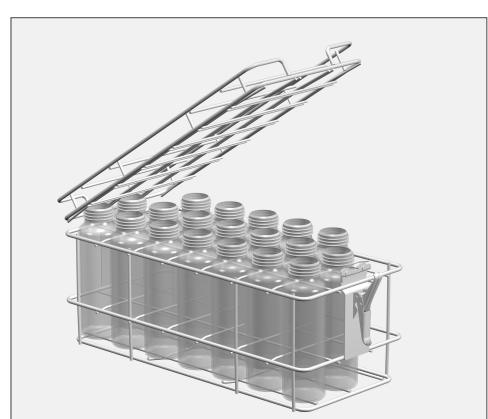

- Abra el cierre de la tapa y retírela del complemento.
- Coloque los biberones en el complemento con la boca hacia arriba.

- Cierre el complemento con la tapa. Los biberones quedarán asegurados con la rejilla de la tapa.

- Coloque el complemento sobre un nivel del carro con las bocas de los biberones hacia abajo.

Las dos esquinas bloqueadas del complemento deberán estar posicionadas sobre las esquinas del carro, es decir, en las esquinas del nivel de lavado. En este área, los chorros de agua no alcanzan bien el interior de las botellas y éstas no quedan suficientemente limpias.

Después de la limpieza, desinfección y secado podrán llenarse los biberones en el mismo complemento.

- Para ello, retire en primer lugar la tapa del complemento.
- Cierre los biberones llenos y consérvelos refrigerados hasta su utilización.

Si no se realiza una esterilización posterior, será necesario llevar a cabo un secado completo a fin de evitar el crecimiento de gérmenes acuáticos. Para ello es imprescindible seleccionar un tiempo de secado suficiente.

Complementos para Biberões E 135

Miele
PROFESSIONAL


! Leia atentamente as medidas de segurança e precauções mencionadas no livro de instruções da máquina de lavar e desinfectar. Lave somente biberões que tenham a indicação do fabricante de que podem ser lavados na máquina e siga as indicações específicas. O programa de lavagem com desinfecção térmica (por ex. A₀ 600) de preferência com processo Vario, também tem de estar de acordo com a qualidade do material. A temperatura de lavagem pode ser regulada para os 65°C para obter resultados melhorados, porque as proteínas do leite só são eliminadas com temperaturas elevadas. Produtos de lavagem alcalinos podem danificar a graduação dos biberões. Siga as indicações do serviço técnico.

Complementos para Biberões:

E 135 com tampa, para 19 Biberões com 250 ml de volume, alt 194, larg 192, prof 447 mm
E 135/1 com tampa, para 19 Biberões com 110 ml de volume, alt 133, larg 192, prof 447 mm
E 135/2 com tampa, para 19 Biberões com 90 ml de volume, alt 123, larg 192, prof 447 mm
E 135/3 com tampa, para 19 Biberões com 120 ml de volume, H 133, B 192, T 447 mm




Acessórios que podem ser adquiridos:

Complemento E 364 para 36 Tetinas de boca larga
Complemento E 458 para 36 Tetinas com rosca
Complemento em rede E 142 para tampas
Tampa A 16 para cobrir o complemento em rede E 142

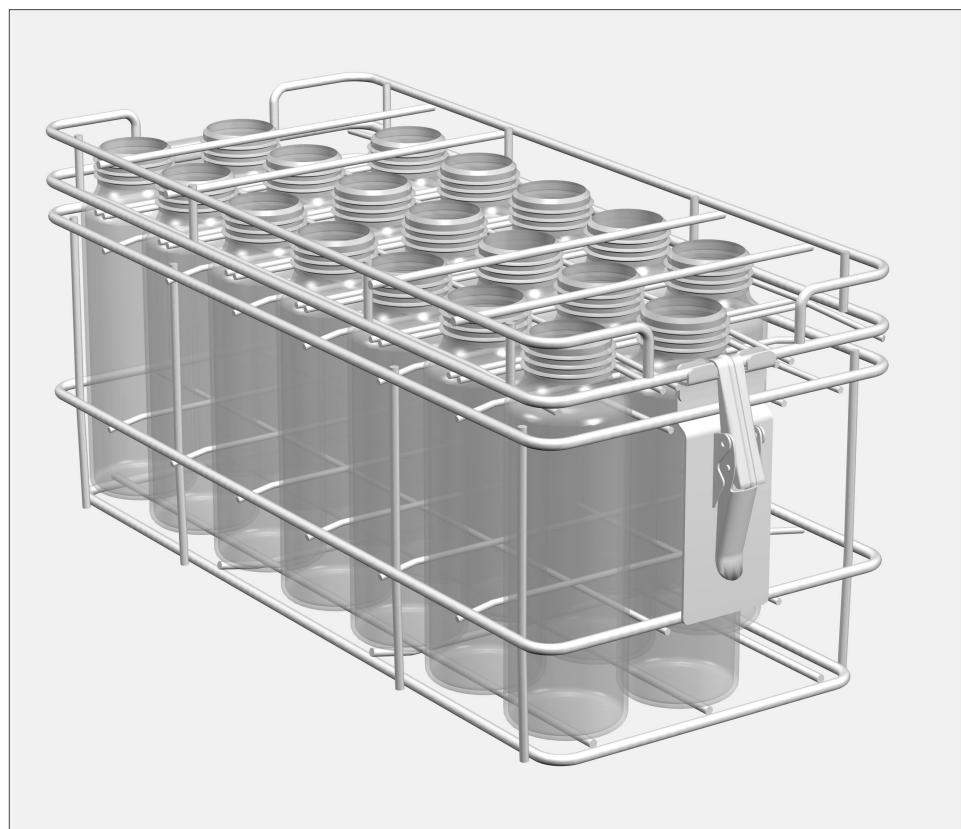

Área de aplicação:

Com os complementos E 135 podem ser lavadas e desinfectadas 19 biberões. Estes são utilizados no cesto superior e inferior assim como no carro vazio, por exemplo E 935-3, E 735-3 ou E 555.

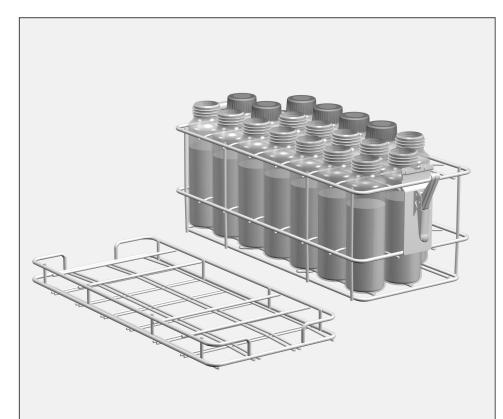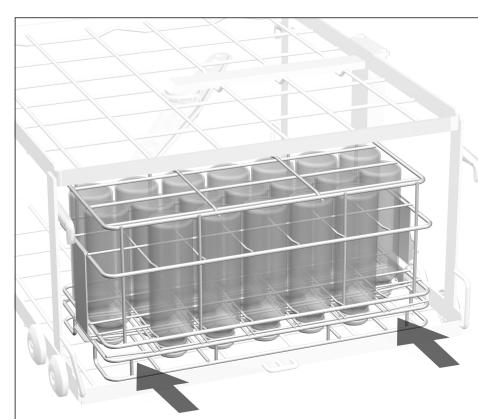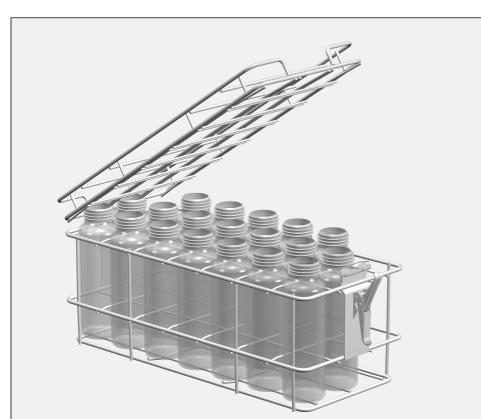

- Abrir o fecho da tampa e retirar a tampa do complemento.
- Colocar os biberões no complemento com a abertura voltada para cima.

- Fechar o complemento com a tampa. Os biberões são fixos pela tampa.

- Colocar o complemento no carro com a boca dos biberões voltada para baixo.

Os dois cantos do complemento devem ser posicionados sobre os cantos do carro. Esta zona não é devi-damente atingida pelos jactos de água. Não coloque ai qualquer biberão porque não ficam bem lava-dos.

Após a lavagem, desinfecção e seca-gem os biberões ficam no complemen-to para serem cheios com os alimen-tos.

- Primeiro retire a tampa do comple-mento.
- Encha os Biberões com o alimento, tape-os e coloque em local fresco até serem utilizados.

Se no final não for efectuada a esterilização é necessário que seja efectuada uma secagem adequada. O tempo de secagem necessário deve ser garantido.