

Telineet tuttipullojen tutteja varten E 458 ja E 364

Miele
PROFESSIONAL

⚠ Noudata ehdottomasti puhdistus- ja desinfointiautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita. Käsittele laitteessa ainoastaan sellaisia tutteja, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfioinnin, ja noudata tuttien omia puhdistus- ja desinfointiohjeita. Lateksista valmistetut tutit kestävät vain rajallisen määän koneellisia puhdistuskertoja, jonka jälkeen ne on vaihdettava uusiin. Käytettävä puhdistus- ja desinfointiohjelma, johon tulisi sisältyä mieluiten Vario-menetelmän mukainen lämpödesinfointi (esim. A₀ 600), on tarvittaessa sopeutettava tuttien materiaaliin sopivaksi. Puhdistustuloksen parantamiseksi pesulämpötilaksi voidaan säätää myös 65°C, koska maidon valkuaisaineet denaturoituvat vasta kuumissa lämpötiloissa. Noudata huollon antamia suosituksia.

Telineet:



E 458 kierrekorkkituteille, telineessä 36 lokeroa 29 x 29 mm, K 63 mm, L 215 mm, S 445 mm
E 364 leveäkaulaisille tuteille, telineessä 36 lokeroa 41 x 41 mm, K 77 mm, L 215 mm, S 445 mm

erikseen ostettavat lisävarusteet:

E 135 ja kansi, tilaa 19 tuttipullolle à 250 ml
E 135/1 ja kansi, tilaa 19 tuttipullolle à 110 ml
E 135/2 ja kansi, tilaa 19 tuttipullolle à 90 ml
E 135/3 ja kansi, tilaa 19 tuttipullolle à 120 ml
Verkkokori E 142 korkkeja yms. sulkemia varten
Kansi A 16 verkkokorin E 142 peittämiseksi

Käyttökohheet:

Telineissä E 458 ja E 364 voidaan puhdistaa ja desinfoida yhteensä 36 tuttipullojen tuttia. Telineitä voidaan käyttää sekä ylä- että alakoreissa ja tyhjissä vaunuissa, esim. E 935-3, E 735-3 tai E 555.

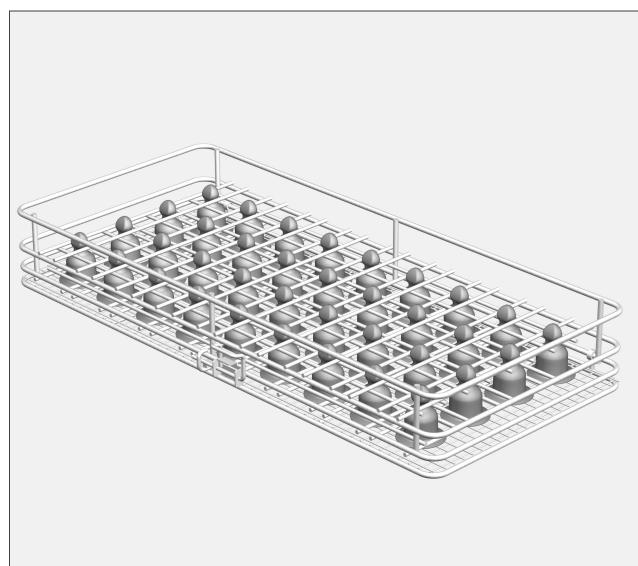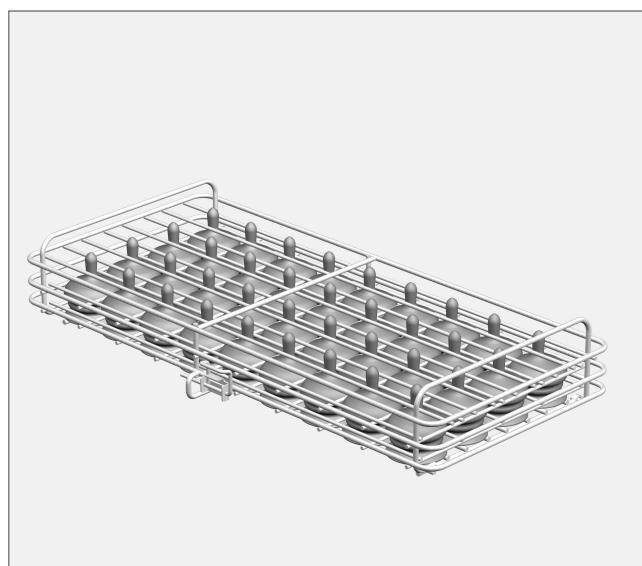

E 364:


- Avaa telineen lukitsin ja taita teline auki.
- Aseta käytetyt leveäkaulaiset tutit telineeseen kaula-aukko ylöspäin.
- Taita teline kiinni ja lukitse se.

E 458:

- Avaa telineen lukitsin ja taita teline auki.
- Aseta käytetyt kierrekorkkitutit telineeseen kierreaukko ylöspäin.
- Taita teline kiinni ja lukitse se.

E 142 ja A 16:

- Aseta pullojen sulkimet ja kierrekorkit verkkokoriin suuaukko tai kierre alaspäin.
- Varmista, että kevyet muoviosat pysyvät verkkokorissa käytämällä kantta.

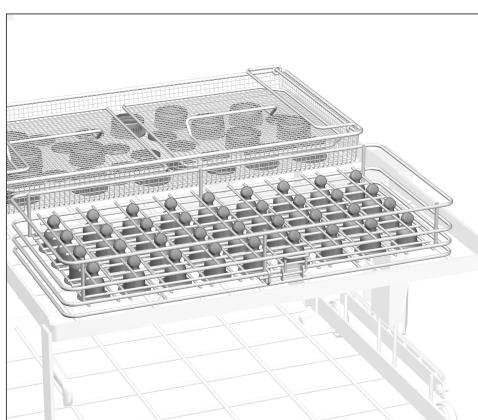

Mikäli tutteja ei steriloida desinfioinnin jälkeen, mikrobikasviston ehkäisemiseksi tuttien on oltava ehdotoman kuivia ennen varastointia. Tätä varten on valittava riittävän pitkä kuivausaika.

- Aseta telineet haluamallesi vaunun tasolle siten, että tuttien kaula- ja kierreaukot tulevat alaspäin.
- Aseta verkkokori E 142 kiinnitettyine kansineen vastaavasti haluamallesi vaunun tasolle.

Insatser för tillbehör till nappflaskor E 458 och E 364

Miele
PROFESSIONAL

⚠ Läs noggrant igenom säkerhetsanvisningarna och varningarna i diskdesinfektorns bruksanvisning. Rengör endast nappar vilka av tillverkaren är deklarerade som maskinellt disk- och desinfektionsbara och beakta de specifika rengöringsanvisningarna.
Nappar av latexmaterial kan endast diskas ett begränsat antal gånger innan de skall bytas ut mot nya.
Det diskprogram som används med termisk desinfektion (t ex A₀ 600), som rekommenderas med vario-metoden, måste anpassas till materialets kvalitet.
För ett bättre resultat kan disktemperaturen även ställas in på 65°C, eftersom mjölkproteinet denaturerar först vid högre temperaturer. Beakta de rekommendationer som anges av kundtjänst.

Insatser:



E 458 för skruvnappar, med 36 fack 29 x 29 mm, höjd 63 mm, bredd 215 mm, djup 445 mm
E 364 för vidhalsade nappar, med 36 fack 41 x 41 mm, höjd 77 mm, bredd 215 mm, djup 445 mm

Extra tillbehör:

E 135 med förslutning, för 19 nappflaskor, volym 250 ml
E 135/1 med förslutning, för 19 nappflaskor, volym 110 ml
E 135/2 med förslutning, för 19 nappflaskor, volym 90 ml
E 135/3 med förslutning, för 19 nappflaskor, volym 120 ml
Trådkorg E 142 för flasklock
Förslutning A 16 för att täcka över trådkorg E 142

Användningsområde:

Med insats E 458 och E 364 kan 36 nappar för nappflaskor rengöras och desinficeras. De kan sättas in i över- och underkorgar och i en tom vagn, t ex E 935-3, E 735-3 eller E 555.

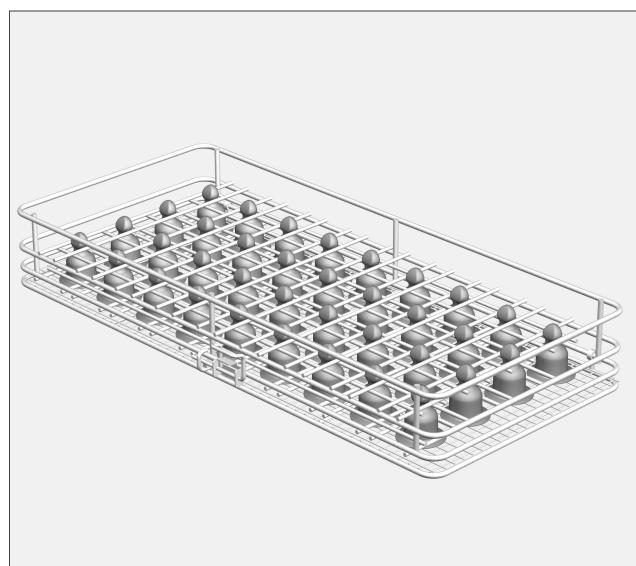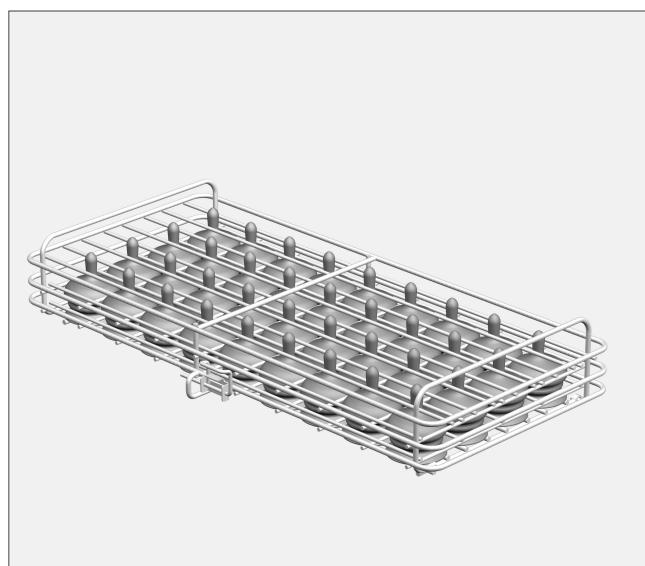

E 364:


- Öppna insatsens förslutning och fäll upp insatsen.
- Placera använda vidhalsade nappar i insatsen med öppningen uppåt.
- Fäll ned insatsen och stäng den.

E 458:

- Öppna insatsens förslutning och fäll upp insatsen.
- Placera använda skruvnappar i insatsen med öppningen uppåt.
- Fäll ned insatsen och stäng den.

E 142 med A 16:

- Lägg nappringar och förslutningar i trådkorgen med gängan nedåt.
- Säkra de lätta plastdelarna i trådkorgen med hjälp av förslutningarna.

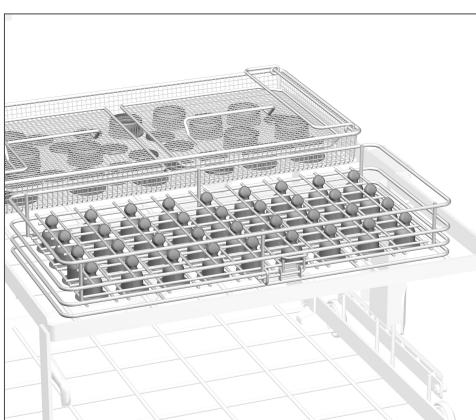

Om ingen anslutande sterilisering följer erfordras fullständig torkning av diskgodset innan det förvaras för att undvika tillväxt av vattenlösningar.
Därför måste tillräcklig torktid väljas.

- Ställ insatserna på vagnen. Öppningarna på napparna skall vara nedåt.
- Ställ även trådkorg E 142 med de säkrade plastdelarna i vagnen.