

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinen skal overholdes. Der må kun rengøres sutter, som fra producentens side er deklareret som egnet til maskinopvask, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Sutter af latex-materialer kan kun tåle et begrænset antal rengøringer og skal herefter erstattes af nye.

Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion (f.eks. A₀ 600), fortrinsvis med Vario-program, skal i givet fald afstemmes efter materialekvaliteten.

Rengøringsstemperaturen kan også indstilles til 65°C til forbedret resultat, fordi mælkeproteinerne først denatureres ved højere temperaturer. Højalkaliske rengøringsmidler kan angribe og fjerne gradueringerne. Overhold anbefalingerne fra Miele's tekniske service.

Indsatser:

E 458 til flasker med skruelåg, med 36 rum 29 x 29 mm, H 63 mm, B 215 mm, D 445 mm

E 364 til brede sutter, med 36 rum 41 x 41 mm, H 77 mm, B 215 mm, D 445 mm

Ekstra tilbehør:

E 135 med låg, til 19 sutteflasker med 250 ml volumen

E 135/1 med låg, til 19 sutteflasker med 110 ml volumen

E 135/2 med låg, til 19 sutteflasker med 90 ml volumen


E 135/3 med låg, til 19 sutteflasker med 120 ml volumen

Trådkurv E 142 til flaskelåg

Låg A 16 til afdækning af trådkurv E 142


Anvendelsesområde:

Med indsats E 458 og E 364 kan der rengøres og desinficeres 36 sutter til sutteflasker. Indsatserne kan sættes ind i over- og underkurve samt i tomme vogne, f.eks. E 935-3, E 735-3 eller E 555.

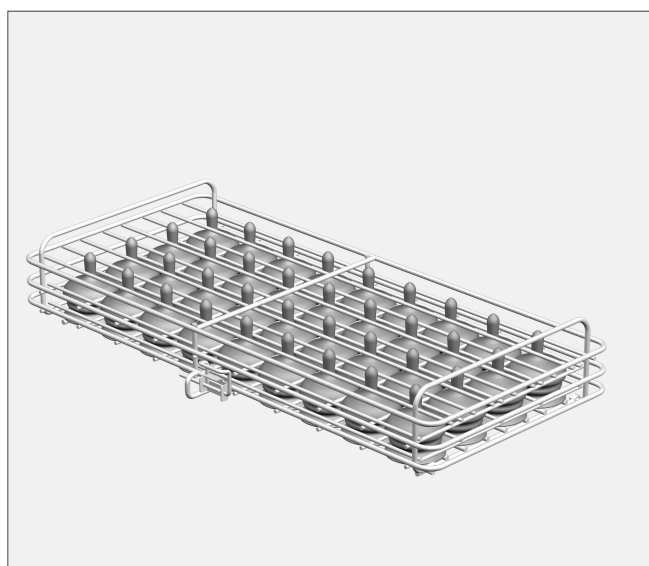

E 364:

- Luk låsen op på indsatsen, og klap indsatsen op.
- Brugte sutter stilles ind i indsatsen med åbningen opad.
- Klap indsatsen i, og lås den.

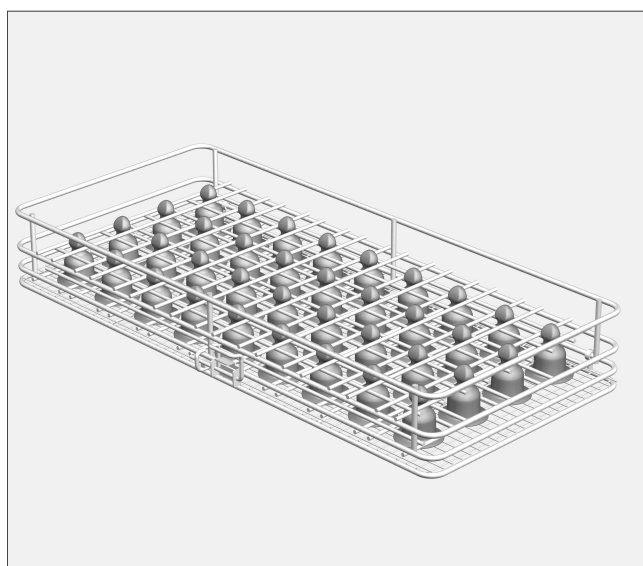


E 458:

- Luk låsen op på indsatsen, og klap indsatsen op.
- Brugte sutter til flasker med skruelåg stilles ind i indsatsen med åbningen opad.
- Klap indsatsen i, og lås den.



E 142 med A 16:

- Lågbrikker og skruelåg lægges i trådkurven med gevindet nedad.
- De lette plastdele sikres i trådkurven med afdækningerne.

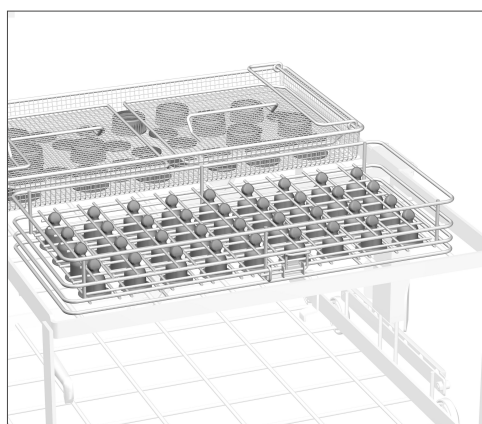

Såfremt der ikke sker en efterfølgende sterilisation, kræves der en fuldstændig tørring for at undgå kimvækst ved opbevaring. Der skal altid vælges en tilstrækkelig tørretid.

- Sæt indsatserne ind på en etage i vognen, åbningerne på sutterne skal vende nedad.
- Sæt ligeledes trådkurv E 142 med de sikrede plastdele ind i vognen.

⚠ Kapitlet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for rengjørings-/desinfeksjonsautomaten må absolutt følges. Klargjør bare smokker som av produsenten er deklarerert som mulig å klargjøre for gjenbruk maskinelt, og følg produsentens anvisninger for klargjøring. Smokker av lateksmateriale tåler bare et begrenset antall klargjøring og skal deretter erstattes av nye smokker. Klargjøringsprogrammet hvor termisk desinfeksjon foretrekkes (f.eks. A₀ 600), helst med Vario-prosessen, må eventuelt avstemmes til materialkvaliteten. Rengjøringstemperaturen innstilles på 65 °C, fordi melkeproteinene først denaturerer ved høye temperaturer. Følg anbefalingene fra service-avdelingen.

Innsatser:


E 458 for skrulokksmokker, med 36 rom 29 x 29 mm, H 63 mm, B 215 mm, D 445 mm
E 364 for vidhalsede smokker, med 36 rom 41 x 41 mm, H 77 mm, B 215 mm, D 445 mm

Tilleggsutstyr:

E 135 med lokk, for 19 tåteflasker med 250 ml volum
E 135/1 med lokk, for 19 tåteflasker med 110 ml volum
E 135/2 med lokk, for 19 tåteflasker med 90 ml volum
E 135/3 med lokk, for 19 tåteflasker med 120 ml volum
E 142 instrumentrist for flaskedekslar
A 16 dekknett for tildekking av E 142 instrumentrist


Anvendelsesområde:

Med innsatsene E 458 og E 364 kan 36 smokker for tåteflasker rengjøres og desinfiseres. De kan settes inn i over- og underkurver og i tomme vogner, f.eks. E 935-3, E 735-3 eller E 555.

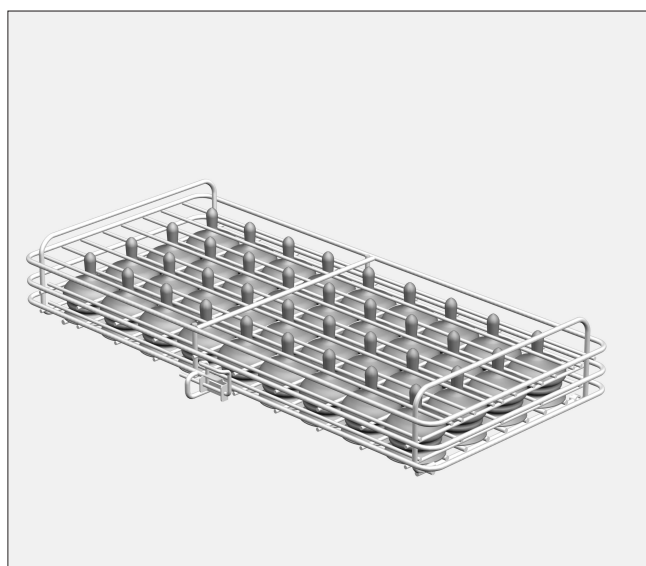

E 364:

- Åpne låsen på innsatsen og åpne innsatsen.
- Brukte vidhalsede smokker settes med åpningen oppover i innsatsen.
- Lukk innsatsen og lås den.

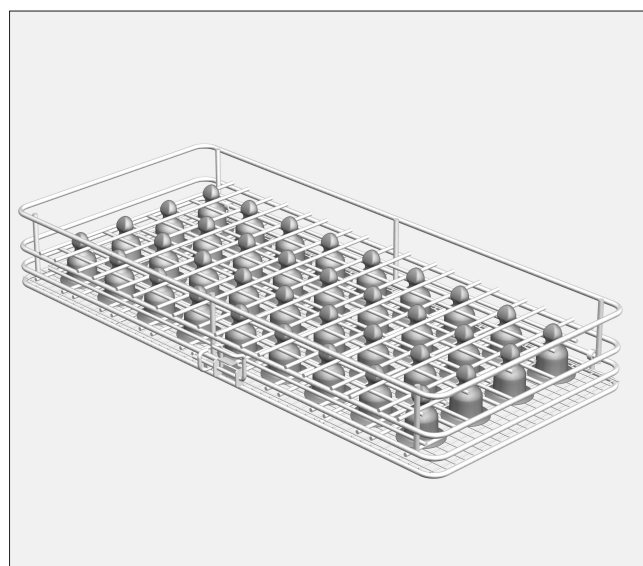


E 458:

- Åpne låsen på innsatsen og åpne innsatsen.
- Brukte skrulokksmokker settes med åpningen oppover i innsatsen.
- Lukk innsatsen og lås den.



E 142 med A 16:

- Legg deksler og skrulokk med gjengene nedover i instrumentristen.
- Sikre de lette delene med dekknettene i instrumentristen.

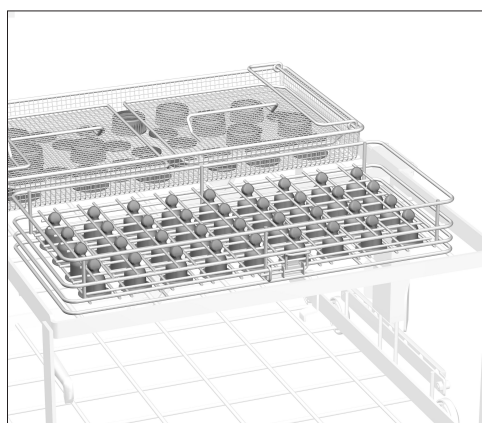

Hvis smokkene ikke skal steriliseres etterpå, må de tørkes fullstendig før lagring, slik at vekst av vannkimer unngås. Da er det viktig at tilstrekkelig tørketemperatur og -tid blir valgt.

- Sett innsatsene i et nivå i vognen. Smokkenes åpninger skal peke nedover.
- Sett også E 142 instrumentrist med de sikrede delene i vognen.