


⚠ Lisez les prescriptions de sécurité et les mises en gardes dans le mode d'emploi de votre laveur-désinfecteur. Ne traitez en machine que les biberons qui ont été déclarés adaptés à un traitement en laveur-désinfecteur par leurs fabricants et suivez les instructions de leurs fabricants. Le programme de traitement préconisé avec désinfection thermique (par ex. A₀600), de préférence le procédé Vario doit être adapté au matériaux des biberons. La température de lavage peut être montée jusqu'à 65 °C puisque les protéines lactiques ne se dégradent qu'à partir de cette température. Les détergents à haute teneur alcaline risquent d'attaquer et d'effacer les graduations. Suivez les indications du SAV.

Compléments pour biberons :

- E 135 avec couvercle, pour 19 biberons à 250 ml, H 194, L 192, P 447 mm
- E 135/1 avec couvercle, pour 19 biberons à 110 ml, H 133, L 192, P 447 mm
- E 135/2 avec couvercle, pour 19 biberons à 90 ml, H 123, L 192, P 447 mm
- E 135/3 avec couvercle, pour 19 biberons à 120 ml, H 133, L 192, P 447 mm

Accessoires en option :

- Complément E 364 pour 36 tétines à col large
- Complément E 458 pour 36 tétines à visser
- Complément à mailles E 142 pour bouchons
- Couvercle A 16 pour couvrir le complément à mailles E 142

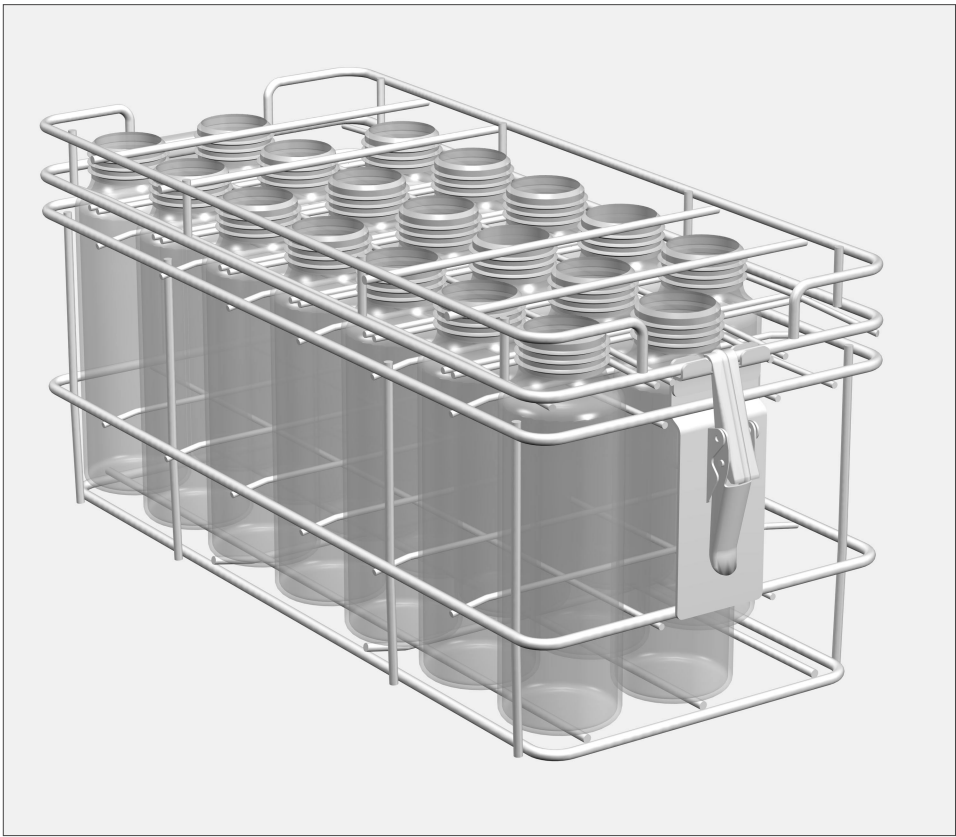


Type d'instrumentation :


Les compléments E 135 permettent de nettoyer et de désinfecter 19 biberons. Ils peuvent être disposés dans les paniers supérieurs et inférieurs ainsi que dans les chariots vides comme par ex. E 935-3, E 735-3 ou E 555.



- Ouvrir la fermeture du couvercle et retirer le couvercle du complément.
- Poser les biberons utilisés dans le complément avec l'ouverture vers le haut.

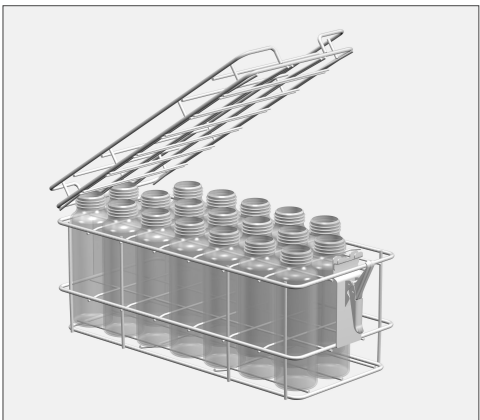


- Couvrir le complément avec son couvercle.
- Les biberons sont maintenus grâce à la grille du couvercle.

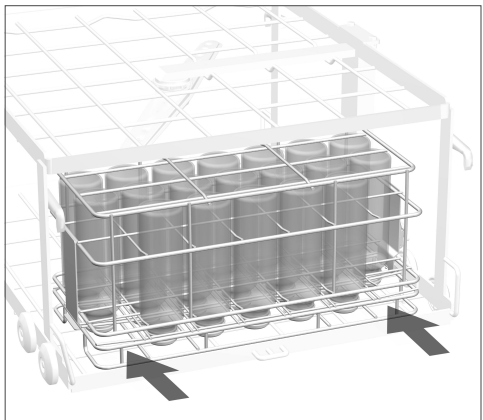

- Poser le complément sur un des niveaux du chariot, les ouvertures des biberons sont tournées vers le bas.

Les deux coins fermés du complément doivent être positionnés au-dessus des coins du chariot, c.a.d dans les coins du niveau de lavage. Sinon l'intérieur des biberons ne sera pas suffisamment atteint par l'eau et les biberons ne seront pas correctement nettoyés.

Dans la mesure où aucun processus de stérilisation n'est prévu à la suite du traitement de désinfection, il est conseillé d'effectuer un séchage total afin d'éviter un développement de germes liés à la présence d'eau. A cette fin, il faut régler un temps de séchage suffisant.

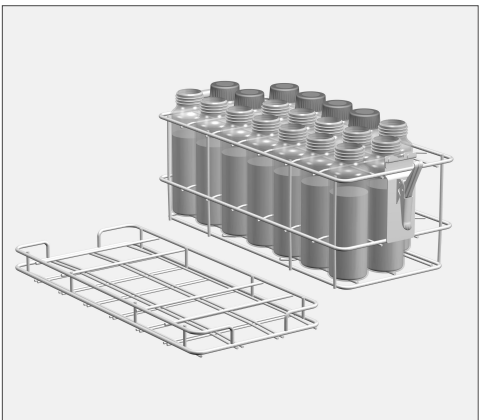

- Après le nettoyage, la désinfection et le séchage, les biberons peuvent être remplis d'aliments pour bébés dans le complément.
- Pour cela, retirer d'abord le couvercle du complément.
 - Fermer les biberons remplis et les maintenir au frais jusqu'à utilisation.


⚠ Rispettare scrupolosamente le indicazioni sulla sicurezza e le avvertenze riportate nelle istruzioni d'uso del termodisinfettore. Trattare esclusivamente strumenti/prodotti che siano stati esplicitamente dichiarati riutilizzabili dal relativo produttore e attenersi alle indicazioni da questo fornite. Il programma utilizzato, con disinfezione preferibilmente termica (ad es. A₀ 600) e con il procedimento Vario, deve essere adeguato alla qualità dei materiali di cui sono costituiti gli strumenti. Per migliorare il risultato, la temperatura di lavaggio può essere impostata anche su 65°C perché le proteine del latte denaturano solo a temperature più alte. Detergenti molto alcalini possono attaccare e rimuovere i segni della graduazione. Seguire le raccomandazioni del servizio di assistenza tecnica.

Inserti per biberon:

E 135 con coperchio, per accogliere 19 biberon da 250 ml. H 194, L 192, P 447 mm
E 135/1 con coperchio, per accogliere 19 biberon da 110 ml. H 133, L 192, P 447 mm
E 135/2 con coperchio, per accogliere 19 biberon da 90 ml. H 123, L 192, P 447 mm
E 135/3 con coperchio, per accogliere 19 biberon da 120 ml. H 133, L 192, P 447 mm

Accessori su richiesta:

Inserto E 364 per 36 succhietti a collo largo
Inserto E 458 per 36 succhietti avvitabili
Bacinella E 142 per chiusure bottiglia
Coperchio A 16 per coprire la bacinella E 142

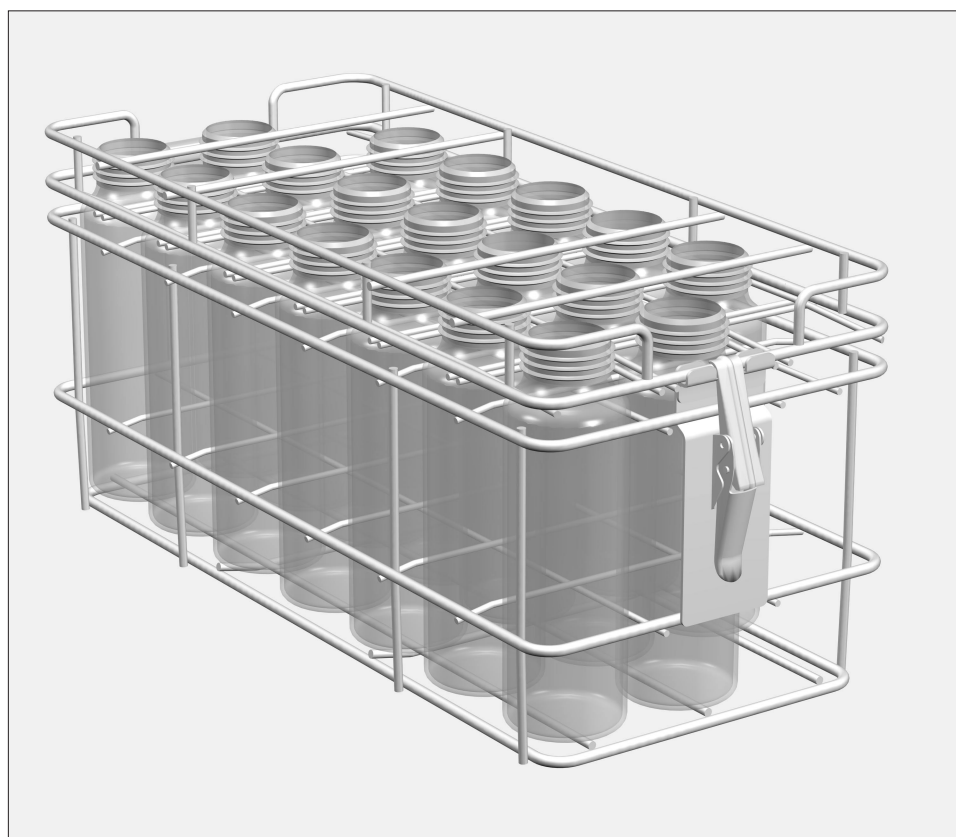


Applicazioni:


Con gli inserti E 135 è possibile pulire e disinfettare 19 biberon. Gli inserti possono essere sistemati nei cestelli superiori e inferiori o in carrelli vuoti, ad es. E 935-3, E 735-3 o E 555.



- Sganciare il coperchio e rimuoverlo dall'inserto.
- Disporre i biberon nell'inserto con le aperture rivolte verso l'alto.

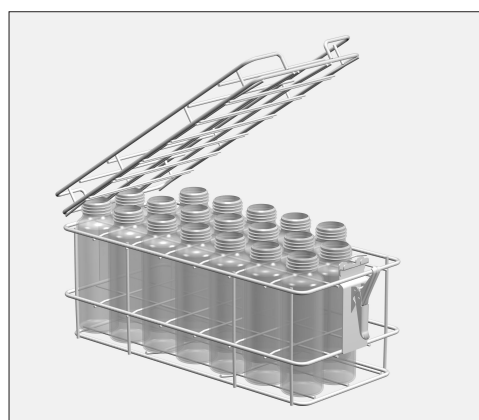


- Chiudere l'inserto con il suo coperchio. Il coperchio assicura i biberon nella giusta posizione.

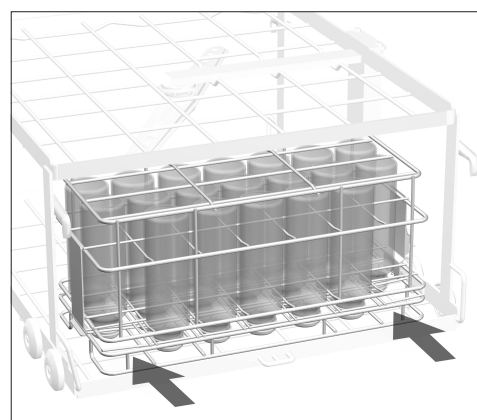

- Sistemare l'inserto su un piano del carrello con le aperture dei biberon rivolte verso il basso.

I due angoli senza biberon dell'inserto devono essere posizionati sugli angoli del carrello, ovvero negli angoli del ripiano. Questi punti non vengono infatti ben raggiunti dai getti d'acqua e quindi i biberon non verrebbero lavati correttamente.

Se non è prevista la sterilizzazione, per evitare la proliferazione di germi in acqua durante la conservazione assicurarsi che i biberon siano completamente asciutti. Deve quindi essere selezionato un tempo di asciugatura adeguato.

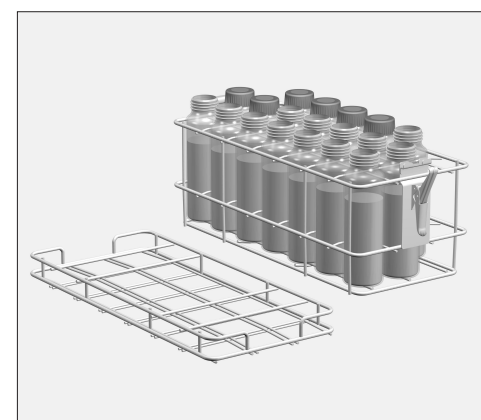

Al termine del lavaggio, della disinfezione e dell'asciugatura i biberon possono essere riempiti.

- Sganciare il coperchio dell'inserto.
- Riempire i biberon, chiuderli e conservarli al fresco fino al momento dell'uso.