

ProCare Dent 30 P - 5 l  
Neutralisationsmittel, sauer, 5 l  
zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten.



- Geeignet für Dentalinstrumente, nicht für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Entfernt Anlauffarben und säurelösliche Kontaminationen
- Neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Auf Basis von Phosphorsäure

EAN: 4029577157982 / Materialnummer: 12796360 / Alte Materialnummer: 66914303V1

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
| Thermodesinfektoren                                             | •                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einsatzmöglichkeiten</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
| Entfernung von Kalk und anderen säurelöslichen Verunreinigungen | •                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dosierempfehlung</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| Dosierempfehlung pro Spülgang                                   | 1 ml/l (0,1 %)                                                                                                                                                                                                         |
| Dosierempfehlung (pro Spülgang)                                 | 1 ml/l (0,1 %)                                                                                                                                                                                                         |
| Grosse Öffnung für Dosierlanze                                  | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Einsetzbar für alle Wasserhärten                                | •                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dosierung</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| pH-Wert bei 20 °C                                               | 0,7                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hauptanwendungsbereiche</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Zahnarztpraxis                                                  | •                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
| Medienart                                                       | Saures Neutralisationsmittel                                                                                                                                                                                           |
| Aggregatsform                                                   | Flüssigkonzentrat                                                                                                                                                                                                      |
| Inhaltsstoffe                                                   | Phosphorsäure, Zitronensäure                                                                                                                                                                                           |
| Minimale Lagertemperatur in °C                                  | -15                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximale Lagertemperatur in °C                                  | 30                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
| Medienart                                                       | Saures Neutralisationsmittel                                                                                                                                                                                           |
| Aggregatsform                                                   | Flüssigkonzentrat                                                                                                                                                                                                      |
| Inhaltsstoffe                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
| Minimale Lagertemperatur in °C                                  | -15                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximale Lagertemperatur in °C                                  | 30                                                                                                                                                                                                                     |
| Geeignet für Porzellan/Keramik                                  | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium                         | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Nicht geeignet für verchromte Teile                             | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Nicht geeignet für vernickelte Teile                            | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle                      | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Geeignet für Standardinstrumente                                | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Beugt Korrosion vor                                             | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Frei von Tensiden                                               | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Neutralisation verschleppter Alkalireste                        | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Sehr gute Abspülbarkeit                                         | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Vorbeugung von Kalkablagerungen in der Spülkammer               | •                                                                                                                                                                                                                      |
| Nicht geeignet für Übertragungsinstrumente                      | Geeignet f. Standardinstr., N. geeign. f. Leicht-/Buntmet., N. geeignet f. verchrom. Teile, N. geeignet f. vernick. Teile, Nicht f. elox. Alu geeignet, N. geeignet f. Übertragungsins., Geeignet f. Porzellan/Keramik |
| <b>Masse und Gewicht</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                                     | 217                                                                                                                                                                                                                    |

ProCare Dent 30 P - 5 l  
Neutralisationsmittel, sauer, 5 l  
zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten.



EAN: 4029577157982 / Materialnummer: 12796360 / Alte Materialnummer: 66914303V1

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Aussenmass, Nettobreite in mm               | 142  |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm                | 248  |
| Bruttogewicht in kg                         | 8    |
| Füllmenge in ml                             | 5000 |
| <b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b> |      |
| CE                                          | •    |
| GHS/CLP-konform                             | •    |